



NA HIGH-TECH
VYBAVENÍ



MĚKKÉ NAPUŠTĚNÉ UBROUSKY
NA CITLIVÉ POVRCHY

TESTOVANÁ VYNIKAJÍCÍ
MATERIÁLOVÁ KOMPATIBILITA

Meliseptol® Wipes sensitive

RYCHLÁ DEZINFEKCE CITLIVÝCH POVRCHŮ



Meliseptol® Wipes sensitive

RYCHLÁ DEZINFEKCE CITLIVÝCH POVRCHŮ

Přípravek je vhodný i pro zdravotnické prostředky s citlivými povrchy, jako jsou vybavení operačních sálů, příslušenství ultrazvukových přístrojů, infuzní pumpy, speciální nemocniční lůžka, zubařská křesla, povrchy z umělé kůže v nemocnicích a ordinacích.

VLASTNOSTI:

- Rychlá a efektivní dezinfekce
- Testovaná vynikající materiálová kompatibilita
- K okamžitému použití
- Účinný během 1 minuty
- Pevný „klik-klak“ uzávěr brání vysychání náplně
- Nízký obsah alkoholu
- Bez parfemace
- Doporučuje se pro čištění a dezinfekci přístrojů Perfusor® Space a Infusomat® Space
- Vhodný do B. Braun Wipes zásobních systémů
- Použitelnost od otevření 90 dní

SLOŽENÍ:

100g přípravku obsahuje:

1-propanol 17g; didecyldimethylamoniumchlorid 0,23g;
neionogenní tenzidy < 5%; purifikovaná voda

NÁVOD K POUŽITÍ

Zvlhčete důkladně ubrouskem celý povrch, nechte působit a zaschnout. Viditelně čisté povrchy jsou takto čištěny a dezinfikovány v jednom kroku. V případě viditelné kontaminace je třeba kontaminaci nejdříve odstranit a poté provést dezinfekci otřením ubrouskem. Nepoužívejte na horké povrchy nebo na zařízení pod napětím. Před dezinfekcí odpojte zařízení od el. proudu.

Meliseptol® Wipes sensitive	Katalog. č.
Dóza, 60 ubrousků	19582
Náhradní náplň, 60 ubrousků	19530
Sáček FP, 100 ubrousků	19894

Upozornění: Používejte dezinfekční prostředek bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte informace o přípravku na etiketě nebo na informačním listu.

MATERIÁLOVÁ KOMPATIBILITA OVĚŘENA:

- Akrylátová skla, Makrolon
- Latex, guma, silikon, koženka
- Ultrazvukové sondy zn. Philips, Hitachi, ALOKA
- Konzole zn. GE
- Inkubátory
- Věže na operačních sálech
- Klávesnice, myši, monitory a další příslušenství
- Perfusor® Space a Infusomat® Space



B. Braun Medical s.r.o. | V Parku 2335/20 | 148 00 Praha 4 | Česká republika
Tel. +420-271 091 111 | info@bbraun.cz | www.bbraun.cz