



KOHOUT, KTERÝ NEPRASKNE

# Discifix<sup>®</sup> C

JEDINEČNÝ PŘÍSTUP PRO VAŠE BEZPEČÍ

# Discofix® C

## NAVRŽEN PRO KONEČKY VAŠICH PRSTŮ ...



1 Jednoduše napojte



2 Zajistěte otočením



3 Pokud je kohout správně napojen, otáčí se 360° kolem vlastní osy



4 Discofix® C s PinPad – flexibilní fixace

## VÝHODY PRO UŽIVATELE

- Odolný vůči agresivním účinkům farmak
- Těsnost napojení při dlouhodobé aplikaci
- Zabraňuje netěsnostem, kontaminaci a riziku vzduchové embolie
- Pohodlný přístup pro aplikaci a aspiraci
- Umožňuje zjistit správnou polohu hmatem
- Dlouhodobé použití (až 96 hodin)\*



## Oceňte pohodlný přístup

Otočná matice umožňuje rychlé a snadné napojení a uzamčení, které garantuje spolehlivě zabezpečený systém.

Je-li Discofix® C jednou napojen, může se stále otáčet kolem vlastní osy.

Můžete tedy během aplikace a aspirace při napojování stříkačky nebo infúzní linky otočit přístup směrem k sobě. Mimo jiné zabraňuje i nechtěnému rozpojení.



## Vnímejte hmatem správné nastavení

Při každém otočení ventilu o 45° cítíte lehké cvaknutí. Tento hmatový vjem Vám umožňuje zjistit, zda je ventil ve správné poloze. Přesné seřízení je rychlé a snadné.



\* v souladu s doporučeními CDC, RKI

# ...ŽÁDEJTE KOHOUT, KTERÝ NEPRASKNE

## Discofix® C odolává agresivním účinkům farmak a vlivům časté manipulace

Tento unikátně vyvinutý kohout zajišťuje těsnost napojení, a to bez ohledu na použité medikament a častou manipulaci.





Discofix® C eliminuje riziko náhlého prasknutí sestavy a možného nebezpečí kontaminace a vzduchové embolie v každodenní praxi.

### Discofix® C – srovnávací test s ostatními kohouty

Vynikající vlastnosti této nové generace kohoutů byly testovány nezávislou institucí a ověřeny profesionály ve zdravotnictví.

Všechny studie prokázaly, že většina vysoce koncentrovaných farmakologických přípravků nemá vliv na dlouhodobé použití kohoutů Discofix® C.

*Koncentrovaný roztok Pheniton Sodii může velmi rychle poškodit běžné kohouty vyrobené z plastu (např. polykarbonátu).*

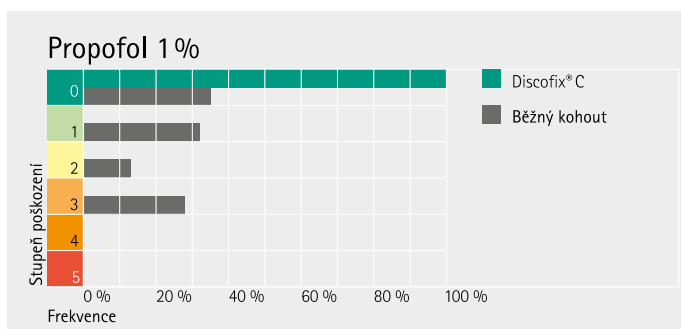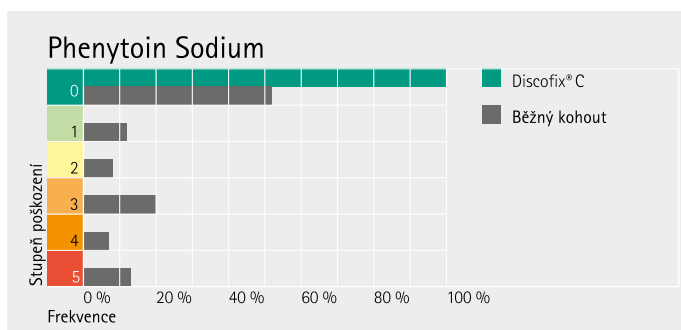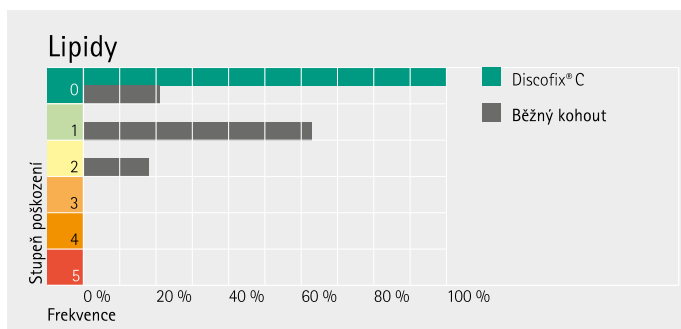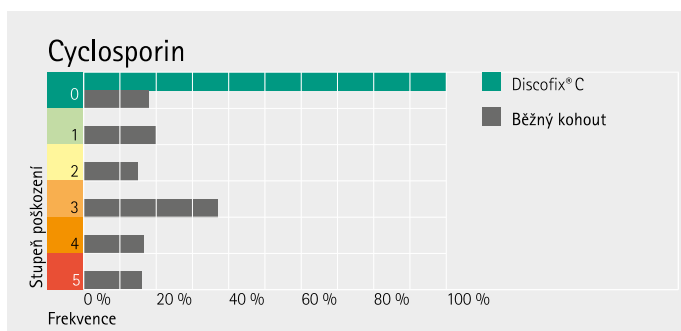

### Stupně poškození:

**Stupeň 0:**  
Žádné poškození



**Stupeň 1:**  
Vlasové praskliny



**Stupeň 2:**  
Četné vlasové praskliny



**Stupeň 3:**  
Vnitřní praskliny

















**Stupeň 4:**  
Penetrující praskliny



**Stupeň 5:**  
Velmi závažné praskliny



# Discofix® C

Produkt	Barva	Popis	Kůsu v balení	Katalog. číslo
		Sterilní kohout	100	16494C
		Sterilní kohout	100	16495C
		Sterilní kohout	100	16496C
		Sterilní kohout	100	16497C
		Sterilní kohout s 10cm prodlužovací hadičkou	50	16500C
		Sterilní kohout s 25cm prodlužovací hadičkou	50	16520C
		Sterilní kohout s bezjehlovým vstupem	100	16494CSF
		Sterilní kohout s bezjehlovým vstupem a 10cm prodlužovací hadičkou	50	16500CSF
		Sterilní, tříprvková soustava ventilů	50	16600C
		Sterilní, tříprvková soustava ventilů	50	16605C
		PinPad – klip pro snadnou fixaci kohoutů a soustav Discofix® C	25	4515510

Všechny varianty produktů Discofix® C jsou bez obsahu latexu, PVC a DEHP

B. Braun Medical s.r.o. | Divize Hospital Care | V Parku 2335/20 | 148 00 Praha 4 | Česká republika  
Tel. +420-271 091 111 | info@bbraun.cz | www.bbraun.cz