


NÁVOD NA POUŽITIE

BARLY FRANCÚZSKE PREDLAKŤOVÉ

222 KL/KS

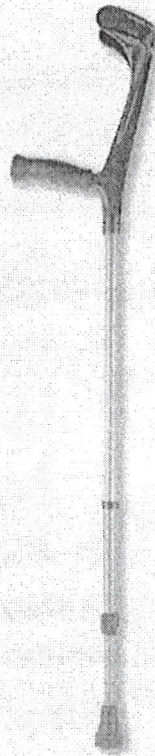

CE

a Distribútor na Slovensku:
DMA Praha s. r. o. – organizačná zložka
Pri Rajčianke 2896/33, 010 01 Žilina

e dma@dmapraha.sk
w www.dmapraha.sk

t +421 903 514 256

Výrobca : Erwin Kowsky GmbH & Co.KG, Oderstr.73, D-24539 Neumünster, Nemecko

POUŽITIE

Barly sú súčasťou rady kompenzačných pomôcok, určených pre telesne postihnuté osoby a osoby so zníženou schopnosťou mobility. Barly sú určené pre oporu a odľahčenie dolných končatín pri chôdzi, nácviku chôdze, poúrazových a pooperačných stavoch a následnej rehabilitácii.

POPIS

Konštrukcia barly je vyrobená z duralových trubiek vysokej pevnosti, doplnená otvorenou opierkou predlaktia a pohodlným ergonomickým plastovým (222 KL), vymäkčeným (222 KS) držadlom. Vymäkčené držadlá sú vymeniteľné a plastové sú doplnené bezpečnostnou odrazkou. Barly sú výškovo nastaviteľné a v spodnej časti sú vybavené maticou tlmiacou klopkanie barly a gumovým protišmykovým nastavcom. Barly sa vyrábajú s rôznym farebným vyhotovením plastových a gumových častí.

TECHNICKÉ PARAMETRE

typ barly	celková výška (cm)	od držadla k zemi (cm)	od držadla k opierke (cm)	priemer opierky (cm)	hmotnosť (kg)	nosnosť (kg)	protišmykový nastavec (typ, priemer)
222 KL	99-119	76-96	23	9	0,60	130	100 CTB/C (16 mm)
222 KS	99-119	76-96	23	9	0,60	130	100 CTB/C (16 mm)

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Pred používaním barly si starostlivo prečítajte návod na použitie a v prípade akýchkoľvek nejasností kontaktujte vášho dodávateľa.

Pred používaním barly konzultujte jej vhodnosť s ošetrojúcim lekárom.

Barly nepreťažujte a neprekračujte maximálnu nosnosť (viď tabuľka).

Pri nastavovaní výšky držadla alebo predlaktovej opierky postupujte opatrne, aby nedošlo k zachyteniu a úrazu prstov.

Dávajte veľký pozor pri chôdzi vo vlhkom prostredí - nebezpečie úrazu.

Pri chôdzi s barlou vždy používajte vhodnú obuv s pevnou pätou.


OBSAH BALENIA

Uistite sa, či ste dostali všetky časti barly - barlu s držadlom, maticou tlmiacou klopkanie, opierkou predlaktia a protišmykovým gumovým nastavcom.


NASTAVENIE VÝŠKY DRŽADLA

Pre nastavenie výšky držadla povolte maticu tlmiacu klopkanie barly (A), vyťahnite aretačnú „E“ poistku (B), ťahom/tlakom nastavte požadovanú dĺžku nohy a tým aj výšku držadla, poistku zasunúť späť a maticu dotiahnite, čím zároveň maximálne obmedzíte prípadne klopkanie barly.

Optimálne nastavenie barly vždy konzultujte s vaším ošetrojúcim lekárom alebo fyzioterapeutom.

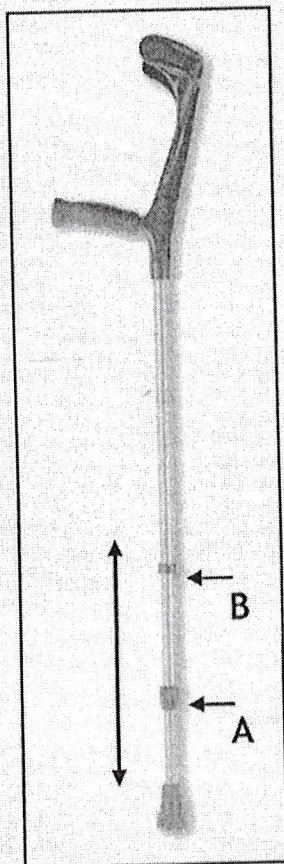

Umiestnenie aretačných poistiek

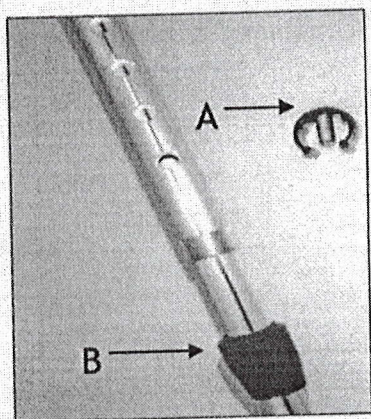

„E“ poistka, matica tlmiacu klopkanie barly a poistka opierky

ÚDRŽBA

Barly môžete udržiavať a čistiť bežnými čistiacimi, dezinfekčnými a konzervačnými prostriedkami, ktoré neobsahujú rozpúšťadlá. Pre zachovanie maximálnej funkčnosti a stability odporúčame pravidelne kontrolovať polohu všetkých istiacich prvkov, stav gumových nadstavcov a polohu aretačných poistiek, popr. odstrániť mechanické nečistoty všetkých častí. V prípade nutnosti vymeňte opotrebovaný gumový nadstavec (vid' tabuľka).

SERVIS A OPRAVY

V prípade nutnosti odstránenia vady alebo vykonania servisu, kontaktujte autorizovaného predajcu, ktorý Vám poskytne všetky informácie.