

# NÁVOD NA POUŽITIE

## ŠTVORKOLESOVÉ CHODÍTKO OSLO PREMIUM RF – 616

Maximálne bezpečné zaťaženie: 136 kg  
Nastavenie výšky rukoväte: 81-91 cm  
Šírka v rozloženom stave: 65 cm  
Šírka pri rozloženej opierke nôh: 88 cm  
Šírka v zloženom stave: 23 cm  
Celková dĺžka: 66 cm  
Priemer kolies: 19 cm  
Hrúbka pneumatiky kolesa: 3,9 cm  
Priemer rámovej rúrky: 2,5 cm  
Hrúbka rámovej rúrky: 1,4 mm  
Hmotnosť: 8,2 kg

**POZNÁMKA:** Pred použitím chodítka si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny

### ÚČEL

Chodítka je určené na pomoc osobám so zníženou pohyblivosťou, ktoré potrebujú oporu pri vstávaní, státi a chôdzi. Umožňuje používateľovi samostatne vykonávať väčšinu každodenných pohybových aktivít. Môže sa používať v interiéri aj exteriéri.

### BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ

V záujme vašej bezpečnosti dodržiavajte nasledujúce odporúčania:

1. Pred použitím chodítka sa vždy uistite, že je správne zaistené vo vysunutej polohe.
2. Neprekračujte maximálne prípustné zaťaženie chodítka.
3. V košíku nenoste predmety, ktoré prudko vyčnievajú, pretože to môže ovplyvniť stabilitu chodítka.
4. Pri používaní chodítka buďte vždy mimoriadne opatrní. Vyhnite sa všetkým potenciálnym nebezpečenstvám, ako napr. nerovný alebo mäkký povrch, prekážky na ceste, mokrá podlaha atď.
5. Používajte iba originálne príslušenstvo. Použitie neoriginálnych dielov môže mať za následok nevhodné prispôsobenie chodítka, čo môže mať za následok riziko pádu.
6. Používanie chodítka vo vlhkom prostredí (sprcha, bazén atď.) môže spôsobiť koróziu jeho pohyblivých častí, čo má za následok riziko pádu a poškodenie chodítka.
7. Nepoužívajte chodítka pri chôdzi po schodoch alebo pohyblivých schodoch.
8. Chodítka neskladujte pri teplote nižšej ako 0 °C. Nevystavujte chodítka na dlhší čas teplote nad 40 °C, pretože to môže spôsobiť prehriatie komponentov chodítka a popálenie používateľa.
9. Vždy dodržiavajte minimálnu a maximálnu povolenú výšku posuvných rúrok.
10. Na rukoväť chodítka nezavesujte tašky alebo vrecia - hrozí nebezpečenstvo prevrátenia!
11. Na strmých povrchoch používajte prevádzkovú brzdu.
12. Nikdy nepoužívajte chodítka na pohyb, keď je zložené!
13. Ak sa príliš opriete o rukoväť, chodítka sa môže prevrátiť dozadu.
14. Používanie chodítka na iné účely ako na chôdzu, napríklad na prepravu ťažkých nákladov je nevhodné a nebezpečné.
15. Používajte na rôznych a tvrdých povrchoch.
16. Nepoužívajte chodítka ako náhradu invalidného vozíka.
17. Nepoužívajte na šikmom teréne.
18. Každý vážny incident súvisiaci s pomôckou by sa mal nahlásiť výrobcovi.

**POZOR:** Nedodržanie uvedených bezpečnostných pravidiel môže viesť k vážnym nehodám.

**POZOR:** O vhodnom používaní chodítka sa poraďte s lekárom alebo fyzioterapeutom, podľa vašich funkčných schopností a každodenných činností.

**POZNÁMKA:** Nasledujúce informácie sú odporúčaním výrobcu, ale mali by ste ich konzultovať so svojím lekárom alebo fyzioterapeutom.

### POZNÁMKA!

Ak je chodítka správne nastavené, používateľ by mal byť schopný udržať vzpriamený postoj s mierne ohnutými laktami, v takom prípade časť hmotnosti tela pri chôdzi preberá chodítka.

## KOMPONENTY A MONTÁŽ RÁMU

Komponenty chodítka sú znázornené na obrázku 1.



obrázok 1

## MONTÁŽ

1. Vyberte všetky diely z kartónu: opierku chrbta, rukoväť s rúrkou, rám chodítka a košík.
2. Otvorte rám chodítka a rozložte opierku nôh. Opierku chrbta položte na rám a skontrolujte, či sú viditeľné montážne otvory na ráme a opierke chrbta. Zaskrutkujte montážne skrutky.
3. Vložte rúrkové držadlá do rámu a nastavte výšku držadiel. Zaskrutkujte upevňovacie motýliky.

## SKLADANIE A ROZKLADANIE CHODÍTKA

Rozkladanie chodítka:

1. Stiahnite sedadlo, kým sa rám úplne nerozloží a nepocítite odpor.
2. Nasad'te košík a zakryte ho sedadlom.

Zloženie chodítka:

1. Zdvihnite sedadlo a vyberte košík.
2. Zložte rám potiahnutím sedadla smerom nahor.

## BRZDY

1. Počas pohybu je možné brzdy aktivovať pritlačením brzdovej rukoväte k rukoväti chodítka. Každá brzda zaberá nezávisle.
2. Každá brzda sa dá zablokovať – zatlačte na brzdovú páku dole. Ak chcete uvoľniť zaseknutú brzdovú páku, potiahnite rukoväť brzdovej páky nahor.

**POZNÁMKA:** Pred použitím chodítka skontrolujte, či brzdy fungujú správne a či sú dobre nastavené. Uistite sa, že sú brzdy zablokované, keď používateľ sedí na sedadle. Činnosť brzd môže byť ovplyvnená opotrebovaním kolies.

## NASTAVENIE VÝŠKY RUKOVÄTE

1. Výšku rukoväti je možné nastaviť tak, aby vyhovovala používateľovi.
2. Odskrutkujte upevňovacie motýliky z rámu na pravej a ľavej strane.
3. Potiahnite rúrkovú držadlo nahor alebo nadol, kým nedosiahnete požadovanú výšku.
4. Naskrutkujte upevňovacie motýliky.

## KOŠÍK

1. Košík je možné namontovať do stredu rámu a na prednú časť rámu. Košík je odnímateľný, čo uľahčuje prepravu a čistenie. Maximálne zaťaženie košíka je 5 kg.

## PREPRAVNÁ FUNKCIA

Chodítka má transportnú funkciu, ktorá umožňuje, aby používateľa na chodítka prenášal asistent. Ak chcete použiť transportnú funkciu, presuňte operadlo na opačnú stranu k boku chodítka a odklopte opierky nôh. Opierka chrbta by mala byť na opačnej strane ako opierky nôh a rukoväte by mali smerovať k opierke chrbta.

## ČISTENIE A ÚDRŽBA

1. Odporúča sa chodítka pravidelne kontrolovať, či nie je poškodené alebo či na ňom nie sú viditeľné známky opotrebovania. Pravidelne kontrolujte, či:

- sa na ráme neobjavili žiadne praskliny alebo prehnutie;
- sú skrutky správne dotiahnuté;
- aretačné tlačidlá správne zabezpečujú nastavenú výšku rukoväti;
- brzdové lanká nie sú rozstrapkané
- sú brzdy správne nastavené;
- žiadne iné časti chodítka nie sú uvoľnené alebo poškodené.











**POZNÁMKA:** V prípade potreby by sa mali príslušné časti vymeniť alebo nastaviť. V prípade potreby namažte mechanické časti.

**POZOR:** Odporúčame chodítko pravidelne čistiť mäkkou handričkou a mydlovou vodou. Po vyčistení chodítko osušte mäkkou handričkou. Na čistenie chodítka nepoužívajte rozpúšťadlá, bieliadlá ani abrazívne čistiace prostriedky. Zariadenie môžete dezinfikovať alkoholom alebo derivátmi, ale v nízkych koncentráciách.

### ZOZNAM POUŽITÝCH MATERIÁLOV

Rám:	hliník
Kolesá:	PVC (polyvinylchlorid) + PP (polypropylén)
Rúčky:	PVC (polyvinylchlorid)
Košík:	ocel'
Predná vidlica:	PP (polypropylén)
Brzda:	PP (polypropylén) + hliník + ocel'

### VYSVETLENIE SYMBOLOV

	Výrobca
	Označenie CE
	Referenčné číslo
	Dátum výroby
	Pozri návod na použitie
	Upozornenie
	Sériové číslo
	Vrchná časť, neprevracajte
	Skladujte na suchom mieste
	Krehké, manipulujte opatrne

REHA FUND Sp. z o.o.  
 ul. Staniewicka 14, 03-310 Varšava, Poľsko  
 tel.: +48 22 594 03 00, fax.: +48 22 594 03 07  
 e-mail: [info@rehafund.pl](mailto:info@rehafund.pl)  
[www.rehafund.pl](http://www.rehafund.pl)

DOVOZCA:  
 SANITAS – zdravotnícke pomôcky, s.r.o.  
 Polárna 6  
 040 12 Košice  
 t.č.: 055/62 229 25  
 e-mail: [sanitaske@sanitaske.sk](mailto:sanitaske@sanitaske.sk)  
[www.sanitaske.sk](http://www.sanitaske.sk)

Verzia: 1.3  
 Vydané: 02/2021

**ZÁRUČNÝ LIST**  
**ŠTVORKOLESOVÉ CHODÍTKO OSLO PREMIUM RF – 616**

Model:	Sériové číslo:	Dátum predaja	Podpis a pečiatka predajcu:

**ZÁRUČNÉ PODMIENKY**

1. Výrobca ubezpečuje zákazníka, že predajný predmet, na ktorý je vydaný tento záručný list, je úplne nový a vo vysokej kvalite.
2. Na chodítko sa vzťahuje záruka 24 mesiacov od dátumu predaja v záručnom liste.
3. Základom pre posúdenie reklamácie je predloženie správne vyplneného záručného listu spolu s priloženým dokladom o kúpe.
4. Prípadné závady na zariadení odstráni REHA FUND Sp. z o. alebo autorizovaný servisný technik za predpokladu, že sa zariadenie používalo v súlade s určeným účelom a odporúčaniami v návode na použitie.
5. Oprava bude vykonaná čo najskôr, maximálne do 30 dní, odo dňa prevzatia zariadenia na servisnom mieste.
6. Záruka sa nevzťahuje na:
  - činnosti údržby, čistenia a nastavovania opísané v návode na použitie;
  - diely podliehajúce opotrebovaniu pri bežnom používaní;
  - mechanické a tepelné poškodenie
  - poškodenie spôsobené používaním zariadenia v rozpore s návodom na použitie, nedbalosťou, vykonávaním nezávislých opráv, úprav alebo konštrukčných zmien.
7. Pred odovzdaním zariadenia autorizovanému servisnému technikovi je potrebné ho vyčistiť v súlade s návodom na použitie, aby bolo vhodné na servisnú kontrolu.
8. Opravy a výmeny náhradných dielov by mali vykonávať autorizovaní servisní technici spoločnosti Reha Fund Sp. z o.
9. V prípade neoprávnenej reklamácie budú zákazníkovi účtované náklady na dopravu a reklamáciu
10. Územný rozsah záručnej ochrany pokrýva územie Slovenskej republiky.
11. Záruka na predávaný tovar nevylučuje, neobmedzuje ani nepozastavuje práva zákazníka vyplývajúce z nesúladu tovaru so zmluvou.

**ZOZNAM SERVISNÝCH OPRAV (vyplní servis)**

	Dátum nahlásenia	Objednávacie číslo	Popis závady/rozsah opravy	Dátum opravy	Pečiatka a podpis servisu
1.					
2.					