

- * vyrobené z netoxickej a antialergickej polyuretánovej peny
- * zaručuje pohodlnú stabilizáciu a bezpečné opretie chrbta
- * umožňuje, aby bolo telo vo vyšších polohách
- * klin s uhlom sklonu 45°
- * rozmery: 44,5 cm hrúbka x 44,5 cm šírka x 60 cm dĺžka
- * voliteľný bavlnený alebo nepremokavý pot'ah

Pot'ah

- bavlna
- nepremokavý

NÁVOD NA POUŽITIE 45° Klin PP-10

POUŽITIE

Antidekubitné a stabilizačné podložky sú odporúčané pri antidekubitnej profylaxii a stavoch po dekubitoch. Zabezpečujú vhodnú cirkuláciu vzduchu a správnu polohu tela.

VLASTNOSTI

Vyrobené z netoxickej a antialergickej polyuretánovej peny.
Rozmery: 44,5 x 44,5 x 60 cm

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Čistite mäkkou handričkou namočenou v teplej vode s jemným čistiacim prostriedkom.
Po čistení dobre vysušte.

POZOR! Nenamáčajte celú penu do vody.

KONTRAINDIKÁCIE

Nepoužívajte vlhký výrobok priamo v kontakte s pokožkou.
Nepoužívajte v prípade alergických kožných reakcií.
Nepoužívajte v prípade mechanického poškodenia (napr. roztrhnutie, prasknutie).
Nepoužívajte inak, ako je určené.

UPOZORNENIA

Pred použitím sa poraďte s lekárom alebo rehabilitačným pracovníkom o neprítomnosti kontraindikácií používania výrobku.
Výrobok by sa mal vyberať podľa telesnej veľkosti.
Nevystavujte výrobok otvorenému ohňu ani iným zdrojom vznietenia.
Pena vystavená otvorenému ohňu sa rýchlo vznieti.
Nevystavujte výrobok dlhodobo nízkym teplotám (pod 5 °C).
Obal výrobku nie je hračka.

POZOR! Penu treba chrániť pred slnečným žiarením, pretože pri vystavení slnečnému žiareniu môže zmeniť farbu. Zmena farby peny nemá vplyv na jej fyzikálno-mechanické vlastnosti.

ZÁRUKA

Na výrobok sa vzťahuje 24-mesačná záručná doba. Výrobok by sa malo používať v súlade s jeho určením a odporúčaniami uvedenými v návode na použitie. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené používaním výrobku v rozpore s návodom na použitie, nedbalosťou,

vykonávaním samostatných opráv, úprav alebo konštrukčných zmien. Výrobok musí byť do servisného strediska doručený čistý. V prípade neopodstatnenej reklamácie budú kupujúcemu účtované náklady na vybavenie reklamácie. Záruka sa poskytuje na základe dokladu o kúpe. Územný rozsah záručnej ochrany sa vzťahuje na územie Poľskej republiky. Záruka na predaný tovar nevylučuje, neobmedzuje ani nepozastavuje práva kupujúceho vyplývajúce z nesúladu tovaru so zmluvou.

DOVOZCA:

SANITAS – zdravotnícke pomôcky, s.r.o.

Polárna 6

040 12 Košice

t.č.: 055/62 229 25

e-mail: sanitaske@sanitaske.sk

www.sanitaske.sk