


# NÁVOD NA POUŽITIE

## Klin 60° PP-9

Klin 60

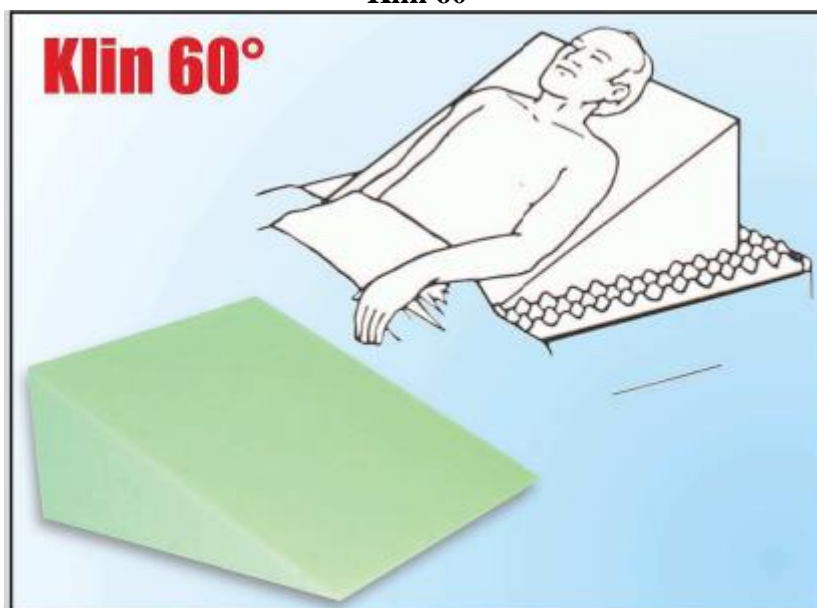

- \* vyrobený z netoxickej a antialergickej polyuretánovej peny.
- \* poskytuje pohodlnú a bezpečnú oporu chrbta.
- \* klin s uhlom 30° alebo 60°.
- \* rozmery: 22,5 cm hrúbka x 58 cm šírka x 60 cm dĺžka
- \* voliteľný bavlnený alebo nepremokavý poťah

Poťah

- bavlna
- nepremokavý

### ÚČEL

Antidekubitné a stabilizačné podložky sa odporúčajú pri antidekubitnej profylaxii a stavoch po dekubitoch. Zabezpečujú vhodnú cirkuláciu vzduchu a správnu polohu tela.

### VLASTNOSTI

Vyrobený z netoxickej a antialergickej polyuretánovej peny.  
Rozmery: 22,5 x 58 x 60 cm

### ČISTENIE A ÚDRŽBA

Čistite mäkkou handričkou namočenou v teplej vode s jemným čistiacim prostriedkom.  
Po vyčistení dobre vysušte.

**UPOZORNENIE:** Nenamáčajte celú penu do vody.

### KONTRAINDIKÁCIE

Nepoužívajte vlhký výrobok priamo v kontakte s pokožkou.  
Nepoužívajte v prípade alergických kožných reakcií.  
Nepoužívajte v prípade mechanického poškodenia (napr. roztrhnutie, prasknutie).  
Nepoužívajte ho inak, než ako je určené.

### UPOZORNENIA

Pred použitím sa poraďte s lekárom alebo rehabilitačným špecialistom, či neexistujú kontraindikácie používania výrobku.

Výrobok treba vyberať podľa telesnej veľkosti.

Výrobok nevystavujte otvorenému ohňu ani iným zdrojom vznietenia.

Pena vystavená otvorenému ohňu sa rýchlo vznieti.

Nevystavujte výrobok dlhodobo nízkym teplotám (pod 5 °C).  
Obal výrobku nie je hračka.

**UPOZORNENIE:** Penu treba chrániť pred slnečným žiarením, pretože pri vystavení slnečnému žiareniu môže zmeniť farbu. Zmena farby peny nemá vplyv na jej fyzikálno-mechanické vlastnosti.

### **ZÁRUKA**

Na zariadenie sa vzťahuje 24-mesačná záručná doba. Zariadenie by sa malo používať v súlade s jeho určením a podľa odporúčaní v návode na použitie. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené používaním zariadenia v rozpore s návodom na použitie, nedbalosťou, vykonávaním samostatných opráv, úprav alebo konštrukčných zmien. Výrobok musí byť do servisného strediska doručený čistý. V prípade neopodstatnenej reklamácie budú kupujúcemu účtované náklady na vybavenie reklamácie. Záruka sa poskytuje na základe dokladu o kúpe. Územný rozsah záručnej ochrany sa vzťahuje na územie Slovenskej republiky.

Záruka na predaný tovar nevylučuje, neobmedzuje ani nepozastavuje práva kupujúceho vyplývajúce z nesúladu tovaru so zmluvou.

### **VÝROBCA**

Reha Fund Sp. z o.o.  
ul. Staniewicka 14  
03-310 Warszawa, Poľsko  
tel. 48 22 59 40 300  
fax. 48 22 59 40 307  
e-mail: info@rehafund.pl  
www.rehafund.pl

### **DOVOZCA**

SANITAS – zdravotnícke pomôcky, s.r.o.  
Polárna 6  
040 12 Košice  
t.č.: 055/62 229 25  
e-mail: sanitaske@sanitaske.sk  
www.sanitaske.sk