

NÁVOD NA POUŽITIE

Podsedák SuperGel 681



Podsedák SuperGel

Kat. č. 681

- * Určený pre osoby, ktoré trávia veľa času sedením.
- * Má nepremokavý a paropriepustný poťah s vreckom na drobnosti a suchým zipsom na stabilizáciu vankúša
- * Výrazne znižuje a rozkladá tlak podložky na telo.
- * Vďaka gélovej vložke sa dokonale prispôbí tvaru panvy

* Medicínsky profil zabezpečuje dobrú cirkuláciu vzduchu

Rozmery (V x H) : 7 x 42 cm, Šírka (cm): 36 44 48 40 46 50

Výrobca: REHA FUND Sp. z o.o. • 03-310 Varšava, • ul. Staniewicka 14 • tel.: 22 59 40 300 • e-mail: info@rehafund.pl

POUŽITIE

Antidekubitný podsedák SuperŽel 681 sa odporúča pri antidekubitnej profylaxii a stavoch po dekubitoch. Je tiež ideálny pre ľudí, ktorí dlhodobo sedia. Jedinečný lekársky profil a otvorená štruktúra peny umožňujú voľnú cirkuláciu vzduchu a rozptyľujú teplo a vlhkosť na pokožke pacienta. Vložka vyrobená z gélu poskytuje vynikajúce prerozdelenie tlaku na širokej ploche, čím výrazne znižuje tlak na telo a dokonale ho stabilizuje. Spodná vrstva rozptyľuje tlak zeme na telo a stabilizuje vankúš.

VLASTNOSTI

Vyrobený z netoxickej a antialergickej tvarovanej polyuretánovej peny.

Rozmery (V x H): 7 x 42 cm, k dispozícii v šírkach: Rozmery: 36, 40, 44, 46, 48, 50 cm.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Čistite mäkkou handričkou namočenou v teplej vode s jemným čistiacim prostriedkom.

Po čistení dobre vysušte.

POZOR! Nenamáčajte celú penu do vody.

KONTRAINDIKÁCIE

Nepoužívajte vlhký výrobok priamo v kontakte s pokožkou.

Nepoužívajte v prípade alergických kožných reakcií.

Nepoužívajte v prípade mechanického poškodenia (napr. roztrhnutie, prasknutie).

Nepoužívajte inak, ako je určené.

UPOZORNENIA

Pred použitím sa poraďte s lekárom alebo rehabilitačným špecialistom, či nie sú prítomné kontraindikácie používania výrobku.

Výrobok by sa mal vyberať podľa telesnej veľkosti.

Výrobok nevystavujte otvorenému ohňu ani iným zdrojom vznietenia.

Pena vystavená otvorenému ohňu sa rýchlo vznieti.

Nevystavujte výrobok dlhodobo nízkym teplotám (pod 5 °C).

Obal výrobku nie je hračka.

POZOR! Penu treba chrániť pred slnečným žiarením, pretože pri vystavení slnečnému žiareniu môže zmeniť farbu. Zmena farby peny nemá vplyv na jej fyzikálno-mechanické vlastnosti.

ZÁRUKA

Na podsedák sa vzťahuje 24-mesačná záručná doba, pričom sa musí používať v súlade s jeho určením a podľa odporúčaní v návode na použitie. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené používaním zariadenia v rozpore s návodom na použitie, nedbalosťou, vykonávaním samostatných opráv, úprav alebo konštrukčných zmien. Výrobok musí byť do servisného strediska doručený čistý. V prípade neopodstatnenej reklamácie budú kupujúcemu účtované náklady na vybavenie reklamácie. Záruka sa poskytuje na základe dokladu o kúpe. Územný rozsah záručnej ochrany sa vzťahuje na územie Slovenskej republiky.

Záruka na predaný tovar nevyklučuje, neobmedzuje ani nepozastavuje práva kupujúceho vyplývajúce z nesúladu tovaru so zmluvou.

DOVOZCA:

SANITAS – zdravotnícke pomôcky, s.r.o.

Polárna 6

040 12 Košice

t.č.: 055/62 229 25

e-mail: sanitaske@sanitaske.sk

www.sanitaske.sk