

Trojuhelníková antidekubitná podložka PP-8

- * Pomáha pohodlne polohovať telo v rôznych polohách.
- * Vyrobená z netoxickéj a antialergickej polyuretánovej peny.
- * Účinne zabraňuje vzniku otlakov a stimuluje krvný obeh.
- * Odporúča sa na prevenciu a liečbu preležanín.
- * Rozmery: 19 x 19 x 43 cm
- * Voliteľné bavlnené alebo nepremokavé vrečko

Poťah

- bavlna
- nepremokavý

NÁVOD NA POUŽITIE **Trojuhelníková antidekubitná podložka PP-8**

POUŽITIE

Antidekubitné a stabilizačné podklady sa odporúčajú pri antidekubitnej profylaxii a stavoch po dekubitoch. Zabezpečujú vhodnú cirkuláciu vzduchu a správnu polohu tela.

VLASTNOSTI

Vyrobené z netoxickéj a antialergickej polyuretánovej peny.
Rozmery: 19 x 19 x 43 cm

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Čistite mäkkou handričkou namočenou v teplej vode s jemným čistiacim prostriedkom.
Po čistení dobre vysušte.

POZOR! Nenamáčajte celú penu do vody.

KONTRAINDIKÁCIE

Nepoužívajte vlhký výrobok priamo v kontakte s pokožkou.
Nepoužívajte v prípade alergických kožných reakcií.
Nepoužívajte v prípade mechanického poškodenia (napr. roztrhnutie, prasknutie).
Nepoužívajte inak, ako je určené.

UPOZORNENIA

Pred použitím sa poraďte s lekárom alebo rehabilitačným špecialistom, či nie sú prítomné kontraindikácie používania výrobku.
Výrobok treba voliť podľa telesnej veľkosti.
Výrobok nevystavujte otvorenému ohňu ani iným zdrojom vznietenia.
Pena vystavená otvorenému ohňu sa rýchlo vznieti.
Nevystavujte výrobok dlhodobo nízkym teplotám (pod 5 °C).
Obal výrobku nie je hračka.

POZOR! Penu treba chrániť pred slnečným žiarením, pretože pri vystavení slnečnému žiareniu môže zmeniť farbu. Zmena farby peny nemá vplyv na jej fyzikálno-mechanické vlastnosti.

ZÁRUKA

Na výrobok sa vzťahuje 24-mesačná záruka. Výrobok by sa mal používať v súlade s jeho určením a podľa odporúčaní v návode na použitie. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené používaním výrobku v rozpore s návodom na použitie, nedbalosťou, vykonávaním samostatných opráv, úprav alebo konštrukčných zmien. Výrobok musí byť do servisného strediska doručený čistý. V prípade neopodstatnenej reklamácie budú kupujúcemu účtované náklady na vybavenie reklamácie. Záruka sa poskytuje na základe dokladu o kúpe. Územný rozsah záručnej ochrany sa vzťahuje na územie Poľskej republiky. Záruka na predaný tovar nevylučuje, neobmedzuje ani nepozastavuje práva kupujúceho vyplývajúce z nesúladu tovaru so zmluvou.

DOVOZCA:

SANITAS – zdravotnícke pomôcky, s.r.o.

Polárna 6

040 12 Košice

t.č.: 055/62 229 25

e-mail: sanitaske@sanitaske.sk

www.sanitaske.sk