

NÁVOD NA POUŽITIE

Nastaviteľná sedačka do vane AVA RF- 853

Katalógové číslo: RF-853
Max. bezpečné zaťaženie: 150 kg
Celková šírka: 71-81cm
Rozstup bočných držiakov: 28,3 cm
Šírka sedadla: 41,6 cm
Dĺžka sedadla: 22,6 cm
Výška priehlbne: 14,5 cm
Hmotnosť: 2 kg



POZOR!

Pred použitím lavice si pozorne prečítajte nižšie uvedené pokyny.


Popis:

Sedačka do vane poskytuje stabilné sedenie pri kúpaní v štandardnej vani. Pomáha pri vstupe a vystupovaní z vane; pomáha vám sedieť nízko a/alebo vstať z dna vane. Je určený starším ľuďom a ľuďom so zdravotným postihnutím s obmedzenou pohyblivosťou (dočasná alebo trvalá) spôsobená napr. mŕtvicou, dopravnou nehodou, krehké kosti, poranenia končatín a bedier, chirurgické zákroky.

BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ

1. Lavicu nie je možné namontovať na vaňu, ak nie sú gumené podložky na bočnej strane držiakov, musí mať úplný kontakt so zvislou (alebo takmer zvislou) stenou vane, ako je znázornené na obr.
2. Pred použitím sa vždy uistite, že je lavica správne pripevnená.
3. Vymeňte opotrebovaný gumený uzáver za nový. Užívateľ je povinný skontrolovať uzáver sám, aspoň raz za mesiac.
4. Akýkoľvek vážny incident súvisiaci s výrobkom treba nahlásiť výrobcovi

ČASTI SEDAČKY

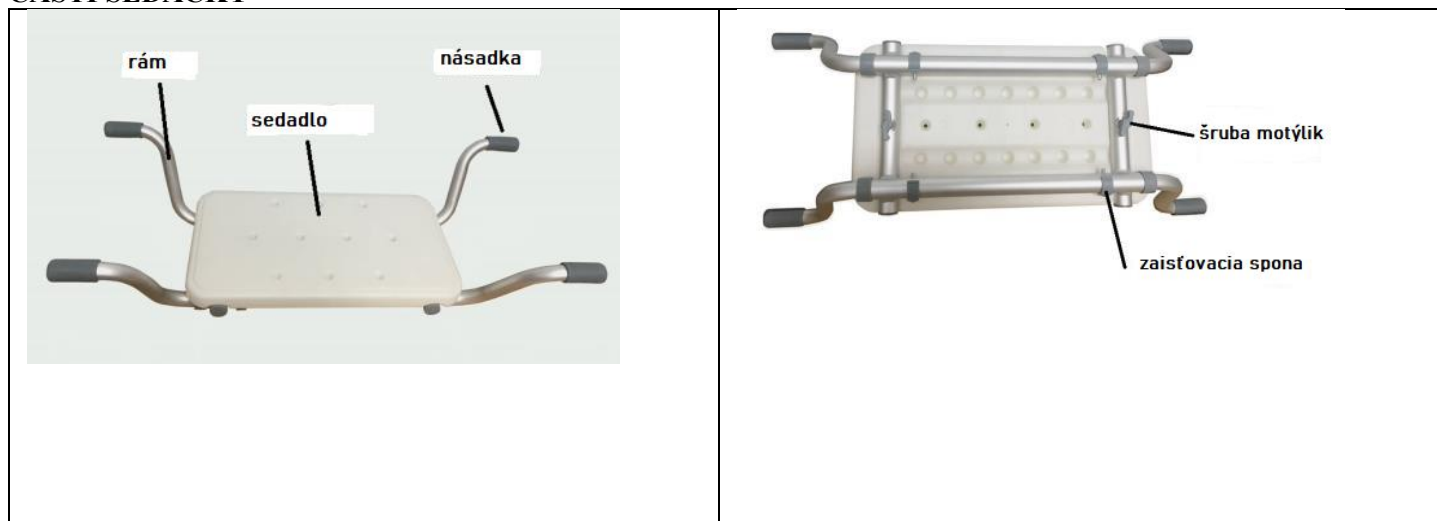

Vyššie uvedené fotografie sú len ilustračné.


INŠTALÁCIA

1. Uvoľnite krídlové skrutky na spodnej strane lavice ich otáčaním proti smeru hodinových ručičiek.
2. Odstráňte uzamykacie spony.
3. Nastavte bočné rúrky na vhodnú dĺžku šírky vane.
4. Nainštalujte zaistovacie spony.
5. Nainštalujte krídlové skrutky.

POZOR! Ak lavica na jednej strane výrazne prečnieva cez okraj vane, môže to byť pre užívateľa nebezpečné a môže hroziť pád.

POZOR! Prílišné utiahnutie krídlových skrutiek ich môže poškodiť.

6. Pred použitím skontrolujte, či je lavica bezpečne zaistená. Lavičku nie je možné umiestniť asymetricky vo vzťahu k okrajom vane a bočné držiaky sa nesmú čiastočne prilnúť na vaňu, ako je znázornené na obrázku nižšie.

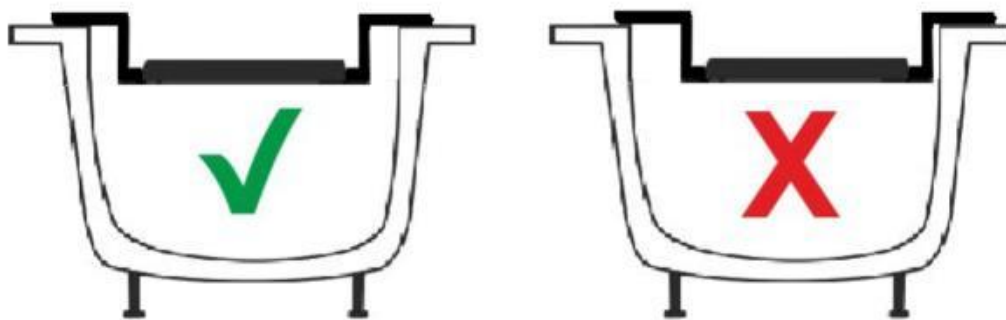

Vyššie uvedená grafika slúži len na ilustračné účely.

POZOR: Uvedený postup je potrebné dodržať pri každej inštalácii sedačky na vaňu.

VÝROBCA

Reha Fund Sp. z o.o.

ul. Staniewicka 14

03-310 Warszawa, Poľsko

tel. 48 22 59 40 300

fax. 48 22 59 40 307

e-mail: info@rehafund.pl

www.rehafund.pl

DOVOZCA

SANITAS – zdravotnícke pomôcky, s.r.o.

Polárna 6

040 12 Košice

t.č.: 055/62 229 25

e-mail: sanitaske@sanitaske.sk

www.sanitaske.sk

ZÁRUČNÝ LIST
Nastaviteľná sedačka do vane AVA RF – 853

Model	Výrobné číslo	Dátum predaja	Podpis a pečiatka predajcu

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

1. Výrobca ubezpečuje zákazníka, že predajný predmet, na ktorý je vydaný tento záručný list, je vyrobený ako nový a vysoko kvalitný.
2. Základom pre posúdenie reklamácie je predloženie správne vyplneného záručného listu spolu s priloženým dokladom o kúpe.
3. Prípadné závady na zariadení odstráni predajca za predpokladu, že zariadenie bolo používané v súlade s určeným účelom a odporúčaniami v návode na použitie.
4. Oprava bude vykonaná čo najskôr, maximálne do 30 dní, odo dňa prevzatia zariadenia .
5. Pred vrátením predajcovi do opravy ho vyčistite v súlade s návodom na použitie tak, aby bol vhodný na servisnú prehliadku.
6. Opravy a výmeny náhradných dielov by mali vykonávať autorizovaní servisní technici.
7. V prípade neoprávnenej reklamácie budú zákazníkovi účtované náklady na dopravu.
8. Územný rozsah záručnej ochrany pokrýva územie Slovenskej republiky.
9. Záruka na predávaný tovar nevylučuje, neobmedzuje ani nepozastavuje práva zákazníka vyplývajúce z nesúladu tovaru so zmluvou.

Na tento výrobok je poskytovaná záruka 2 roky od dátumu predaja.

Podmienkou poskytnutia záruky je aj predloženie kópie dokladu o kúpe výrobku.

Pokiaľ je na výrobku uvedené výrobné číslo, potom musí byť v záručnom liste tiež uvedené.

Záruku možno uplatniť pri materiálových závadách alebo pri zlej funkcii zariadenia.

Záruka sa nevzťahuje na:

- závady spôsobené nesprávnou inštaláciou a manipuláciou,
- závady spôsobené umiestnením v nevhodnom prostredí,
- závady spôsobené nesprávnou obsluhou,
- závady, ktoré vznikli zanedbaním alebo nesprávnou údržbou,
- závady, ktoré vznikli používaním neschválených prípravkov a roztokov,
- závady, ktoré vznikli laickou opravou,
- závady, ktoré vznikli prirodzeným opotrebovaním výrobku alebo jeho častí.

Výkaz servisných opráv

	Dátum podania	Číslo objednávky	Opis /nákres/foto závady	Dátum opravy	Pečiatka a podpis
1.					
2.					