

NÁVOD NA POUŽITIE

Toaletné kreslo LOUIS RF – 840

Katalógové číslo: RF-840

Celková šírka: 62 cm / 58 cm

Celková dĺžka: 55 cm / 50 cm

Výška sedu: 52 - 64 cm

Hĺbka sedadla: 44 cm

Výška chrbtovej opierky: 36 cm

Max. bezpečné zaťaženie: 130 kg

Hmotnosť: 6,6 kg

Šírka sedadla: 43 cm



POZOR! Pred použitím toaletného kresla si pozorne prečítajte nižšie uvedené pokyny.

Toaletné kreslo funguje ako prenosné WC. Kreslo je možné použiť pri lôžku pacienta. Pomáha ľuďom s obmedzenou pohyblivosťou (trvalá alebo periodická) a starším ľuďom pri základných fyziologických činnostiach. Stolička sa dá použiť aj ako záchod alebo bežná stolička na sedenie. Kreslo uľahčuje starostlivosť o pacienta. Bočné lakt'ové opierky uľahčujú vstávanie a sedenie na stoličke.

BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ

Pre vašu bezpečnosť dodržujte nasledujúce odporúčania:

1. Pred použitím toaletnej stoličky sa uistite, že:

- je správne nastavená výška stoličky;
- uzamykacie tlačidlá fungujú správne;
- gumené čiapky sú v dobrom stave;
- všetky nohy stoličky sú nastavené v rovnakej výške.

2. Používajte iba originálne príslušenstvo. Používanie neoriginálnych dielov môže mať za následok nevhodnosť prispôbenie stoličky, čo má za následok riziko pádu.


3. Neprekračujte maximálnu nosnosť kresla.

4. Kreslo neskladujte pri teplotách pod 0°C.

5. Akýkoľvek vážny incident súvisiaci s výrobkom treba nahlásiť výrobcovi.

POZOR! Nedodržanie vyššie uvedených bezpečnostných pravidiel môže viesť k vážnym nehodám.

KONŠTRUKCIA STOLIČKY

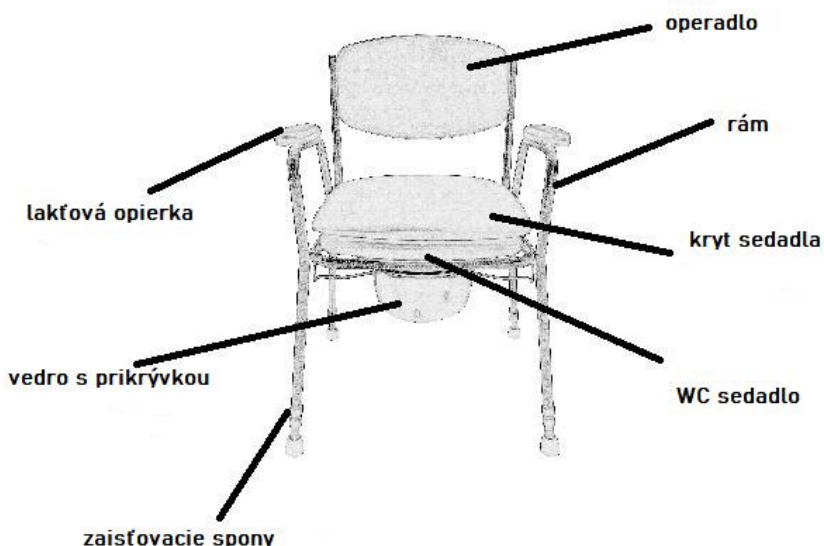


DEMONTÁŽ A INŠTALÁCIA VEDRA

Ak chcete vedro vybrať, vysuňte ho z vodidiel na boku stoličky (obr. 2) alebo ho vyberte nahor naklonením záchodovej dosky (obr.1). Ak chcete vedro vložiť, nasuňte ho na vodidlá (obr. 2) alebo ho vložte nahor naklonením záchodovej dosky (obr. 1).

VÝŠKOVÉ NASTAVENIE

1. Odstráňte zaisťovaciu sponu - uchopte ju medzi palec a ukazovák a potom ju vytiahnite smerom von (obr. 4).
2. Posuňte prítlačnú pätku nahor alebo nadol do požadovanej výšky (obr. 3).
3. Vložte uzamykaciu sponu späť do príslušného otvoru.
4. Uistite sa, že zaisťovacia spona správne zaistila prítlačnú pätku v polohe.

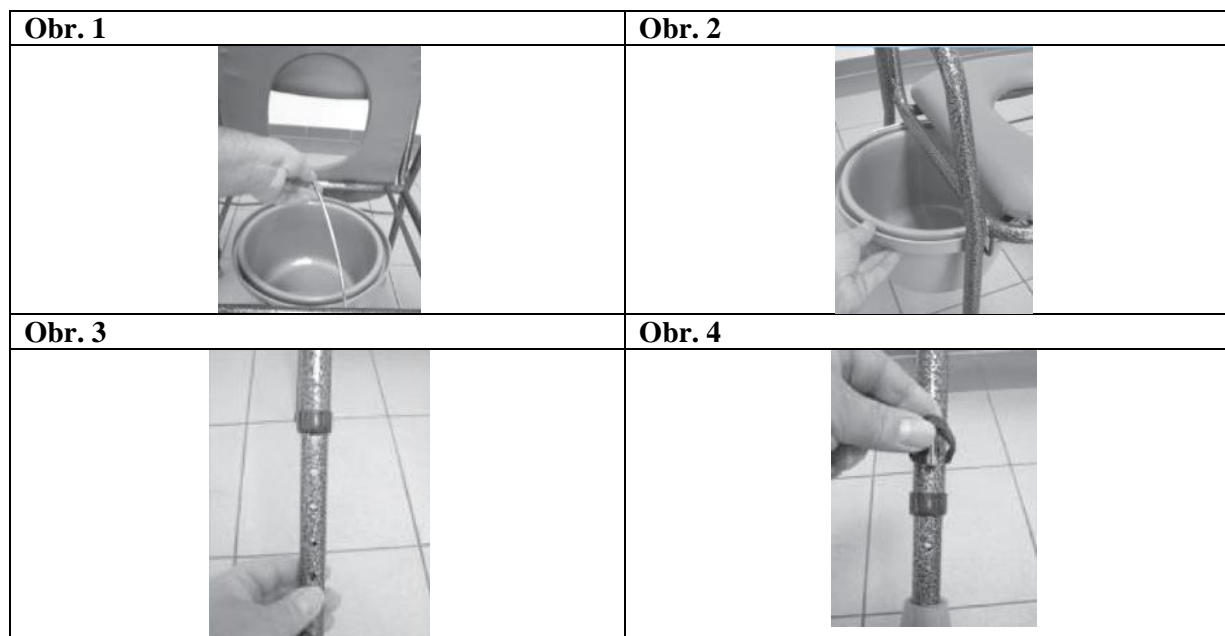

SEDENIE A VSTAVANIE

1. Skontrolujte, či je stolička stabilná a pripravená na použitie.
2. Postavte sa chrbtom k stoličke tak, aby sa vaše kolená dotýkali prednej časti stoličky.
3. Natiahnite ruky za seba a oprite sa rukami o lakt'ové opierky.
4. Pomaly sa posaďte na stoličku, pokrčte lakty a ak je to možné, kolená a boky.
5. Ak chcete vstať zo stoličky, položte ruky na opierky a vytlačte sa nahor. Predtým, ako pustíte ramená stoličky, uistite sa udržíte rovnováhu.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

1. Odporúča sa, aby bola stolička pravidelne kontrolovaná, či nie je poškodená alebo viditeľné známky opotrebovania. Pravidelne skontrolujte, či:

- na ráme nie sú žiadne praskliny ani zalomenia;
- spodné kryty nie sú opotrebované – ak áno, mali by byť vymenené;
- žiadne iné časti stoličky nie sú uvoľnené alebo poškodené.









2. Stoličku sa odporúča pravidelne čistiť mäkkou handričkou a mydlovou vodou. Po vyčistení by mala byť stolička vysušená mäkkou handričkou. Vedro je možné dezinfikovať za studena, napríklad etanolom.

POZOR! Na čistenie stoličky nepoužívajte rozpúšťadlá, bielicidlá ani abrazívne prostriedky.

ZOZNAM POUŽITÝCH MATERIÁLOV

opierka	koža, polyuretán, drevo
rám	ocel', prášková farba
kryt sedadla	PU polyuretán
zaisťovacia spona	PP polypropilén
vedro	PP polypropilén
koleso	PP polypropilén
lakt'ová opierka	koža, polyuretán, PE polyetylen

Vysvetlenie symbolov:

	Výrobca
CE	Označenie CE
	Referenčné číslo
	Pozrite si návod na použitie
	POZOR
	Výrobné číslo
	Držať hore, nepreklápať
	Skladujte na suchom mieste
	Krehké, zaobchádzajte opatrne

**REHA FUND Sp. z o.o.**

ul. Staniewicka 14, 03-310 Warszawa, Polska
tel.: +48 22 594 03 00, fax.: +48 22 594 03 07
e-mail: info@rehafund.pl www.rehafund.pl

Dovozca: SANITAS - zdravotnícke pomôcky, s.r.o.,
Polárna 6, 040 12 Košice,
Tel: +421556222925
e-mail: sanitaske@sanitaske.sk
www.sanitaske.sk

ZÁRUČNÝ LIST
Toaletné kreslo LOUIS RF – 840

Model	Výrobné číslo	Dátum predaja	Podpis a pečiatka predajcu

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

1. Výrobca ubezpečuje zákazníka, že predajný predmet, na ktorý je vydaný tento záručný list, je vyrobený ako nový a vysoko kvalitný.
2. Základom pre posúdenie reklamácie je predloženie správne vyplneného záručného listu spolu s priloženým dokladom o kúpe.
3. Prípadné závady na zariadení odstráni predajca za predpokladu, že zariadenie bolo používané v súlade s určeným účelom a odporúčaniami v návode na použitie.
4. Oprava bude vykonaná čo najskôr, maximálne do 30 dní, odo dňa prevzatia zariadenia .
5. Pred odovzdaním predajcovi do opravy ho vyčistite v súlade s návodom na použitie tak, aby bol vhodný na servisnú prehliadku.
6. Opravy a výmeny náhradných dielov by mali vykonávať autorizovaní servisní technici.
7. V prípade neoprávnenej reklamácie budú zákazníkovi účtované náklady na dopravu.
8. Územný rozsah záručnej ochrany pokrýva územie Slovenskej republiky.
9. Záruka na predávaný tovar nevylučuje, neobmedzuje ani nepozastavuje práva zákazníka vyplývajúce z nesúladu tovaru so zmluvou.

Na tento výrobok je poskytovaná záruka 2 roky od dátumu predaja. Podmienkou poskytnutia záruky je aj predloženie kópie dokladu o kúpe výrobku. Pokiaľ je na výrobku uvedené výrobné číslo, potom musí byť v záručnom liste tiež uvedené.

Záruku možno uplatniť pri materiálových vadách alebo pri zlej funkcii zariadenia.

Záruka sa nevzťahuje na:

- závady spôsobené nesprávnou inštaláciou a manipuláciou,
- závady spôsobené umiestnením v nevhodnom prostredí,
- závady spôsobené nesprávnou obsluhou,
- závady, ktoré vznikli zanedbaním alebo nesprávnou údržbou,
- závady, ktoré vznikli používaním neschválených prípravkov a roztokov,
- závady, ktoré vznikli laickou opravou,
- závady, ktoré vznikli prirodzeným opotrebovaním výrobku alebo jeho častí.

Výkaz servisných opráv

	Dátum podania	Číslo objednávky	Opis /nákres/foto závady	Dátum opravy	Pečiatka a podpis
1.					
2.					