

NÁVOD NA POUŽITIE

ŠTVORNOŽKA - ŠTVORBODOVÁ VYCHÁDZKOVÁ PALICA RF-400

Č. kat.: RF-400

Max. bezpečné zaťaženie: 127 kg

Nastaviteľná výška: 77 - 103 cm

Hmotnosť: 1,15 kg

Výška nožičiek: 14,5 cm

Rozstup nožičiek medzi násadkami: 21 cm



POZOR!

Pred tým, než začnete používať štvorbodovú palicu, si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny.

POUŽITIE

Štvorbodová palica je určená pre osoby, ktoré potrebujú oporu pri zaistení mobility, pomoc pri chôdzi, pri udržiavaní rovnováhy a pri prenášaní telesnej hmotnosti, v prípadoch traumatických a ortopedických stavov dolných končatín. Štvorbodová palica obsahuje štyri oporné body, ktoré poskytujú používateľovi väčšiu stabilitu pri chôdzi. Je určená pre pacientov s problémami s rovnováhou, po úrazoch, pri liečbe degeneratívnych zmien, po operáciách, keď je vhodné odľahčiť tlak na jednu končatinu.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

V záujme bezpečnosti je potrebné dodržiavať nasledujúce odporúčania:

1. Neprekračujte maximálne prípustné zaťaženie.
2. Pri používaní štvorbodovej palice vždy dbajte na maximálnu opatrnosť. Vyhýbajte sa všetkým potenciálnym nebezpečenstvám, ako sú: nerovný alebo mäkký povrch, prekážky na ceste, mokrá podlaha atď.
3. Používajte len originálne príslušenstvo. Použitie neoriginálnych dielov môže spôsobiť nevhodné prispôbenie výrobku, čo môže mať za následok riziko pádu.
4. Nahláste akúkoľvek závažnú udalosť súvisiacu s výrobkom výrobcovi

NASTAVENIE VÝŠKY

Pri nastavení výšky štvorbodovej palice:

- Stlačte uvoľňovacie tlačidlo a mierne otočte základňu;
- nastavte požadovanú výšku;
- otočte základňou tak, aby sa tlačidlo uzamklo v otvoroch.

Dôkladne skontrolujte, či je tlačidlo v otvoroch zaistené.

POZOR!

Nasledujúce odporúčania sú odporúčaniami výrobcu, ale mali by ste ich konzultovať so svojim lekárom alebo fyzioterapeutom.

Výška palice by mala byť nastavená tak, aby používateľ mohol udržať vzpriamený postoj s nohou mierne pokrčenou v kolennom kĺbe. Rukoväť by mala byť nastavená tak, aby ruka zostala mierne ohnutá v laktovom kĺbe a aby skutočná hmotnosť tela spočívala na rukách, a nie na podpazuší.

ČISTENIE

1. Plastové časti treba čistiť len teplou mydlovou vodou.
2. Kovové časti by sa mali čistiť suchou handričkou.

POZOR!

Na čistenie štvorbodovej palice nepoužívajte rozpúšťadlá, bieliadlá ani abrazívne prostriedky.

ÚDRŽBA

Odporúča sa pravidelná kontrola štvorbodovej palice, aby sa zabezpečilo, že:

1. neobjavili sa žiadne praskliny alebo prehnutie;
2. blokovacie tlačidlo správne zabezpečuje výškovú súpravu;
3. otvory v rúrke nie sú zväčšené alebo predĺžené;
4. v rukoväti alebo v podperách osí nie je žiadna vôľa;
5. spodný gumený násadec sa neopotreboval - ak áno, vymeňte ho.

POZOR!

Ak máte akékoľvek pochybnosti o vhodnosti výrobku na používanie, obráťte sa na servisné oddelenie výrobcu.

KONŠTRUKCIA ŠTVORBODOVEJ PALICE

rukoväť




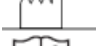


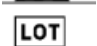
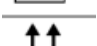
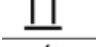

rám

gumený násadec

ZOZNAM POUŽITÝCH MATERIÁLOV

Rám	hliník
Rukoväť	PA (polyamid)
Násadec	Železo + guma bez lateksu

VYSVETLENIE SYMBOLOV

	Výrobca
	Označenie CE
	Referenčné číslo
	Dátum výroby
	Pozri návod na použitie
	Upozornenie
	Číslo šarže
	Vrchná časť, neprevracajte
	Skladujte na suchom mieste
	Krehké, zaobchádzajte opatrne

VÝROBCA

Reha Fund Sp. z o.o.
ul. Staniewicka 14
03-310 Warszawa, Poľsko
tel. 48 22 59 40 300
fax. 48 22 59 40 307
e-mail: info@rehafund.pl
www.rehafund.pl

DOVOZCA

SANITAS – zdravotnícke pomôcky, s.r.o.
Polárna 6
040 12 Košice
t.č.: 055/62 229 25
e-mail: sanitaske@sanitaske.sk
www.sanitaske.sk

ZÁRUČNÝ LIST
ŠTVORBODOVÁ PALICA RF-400

Model	Sériové číslo	Dátum predaja	Podpis a pečiatka predajcu

PODMIENKY ZÁRUKY

- (1) Výrobca ubezpečuje zákazníka, že predmet predaja, na ktorý je vystavený tento záručný list, je úplne nový a kvalitný.
- (2) Na štvorbodovú palicu sa vzťahuje záručná doba 24 mesiacov od dátumu predaja v záručnom liste.
- (3) Základom pre posúdenie záručnej reklamácie je doručenie správne vyplneného záručného listu s priloženým dokladom o kúpe.
4. Prípadné závady zariadenia budú odstránené spoločnosťou REHA FUND Sp. z o.o. alebo autorizovanými servisnými technikmi za predpokladu, že zariadenie bolo používané v súlade s jeho určením a odporúčaniami v návode na použitie.
- (5) Oprava bude vykonaná v čo najkratšom možnom čase, najneskôr do 30 dní, odo dňa prijatia zariadenia v servisnom stredisku.
- (6) Záruka sa nevzťahuje na
 - úkony údržby, čistenia a nastavovania opísané v návode na použitie;
 - diely podliehajúce opotrebovaniu počas bežného používania;
 - mechanické a tepelné poškodenie, napr. ohnutie, poškriabanie, zlomenie atď;
 - poškodenia spôsobené používaním zariadenia v rozpore s návodom na použitie, nedbalosťou, vykonávaním samostatných opráv, úprav alebo konštrukčných zmien.
- (7) Pred odovzdaním zariadenia autorizovanému servisnému technikovi na servis sa musí zariadenie vyčistiť v súlade s návodom na použitie.
- (8) Opravy a výmenu náhradných dielov by mali vykonávať autorizovaní servisní technici spoločnosti Reha Fund s.r.o.
- (9) V prípade neopodstatnenej reklamácie budú zákazníkovi účtované náklady na dopravu a vybavenie reklamácie
- (10) Územný rozsah záručnej ochrany sa vzťahuje na územie Slovenskej republiky.
- (11) Záruka na predaný tovar nevyklučuje, neobmedzuje ani nepozastavuje práva zákazníka vyplývajúce z nesúladu tovaru so zmluvou.

ZOZNAM SERVISNÝCH OPRÁV (vyplňa servis)

	Dátum podania žiadosti	Objednávka č.	Popis závady/rozsah opravy	Dátum vykonania opravy	Pečiatka a podpis servisu
1.					
2.					