

# NÁVOD NA POUŽITIE

## TROJNOŽKA – TROJBODOVÁ VYCHÁDZKOVÁ PALICA RF-300

Katalógové č.: RF-300

Max. bezpečné zaťaženie: 127 kg

Výškové nastavenie: 76 - 101 cm

Hmotnosť výrobku: 1,15 kg

Rozstup nôh medzi násadkami: 30 cm; 36 cm



### POZOR!

**Predtým, než začnete používať trojpodovú palicu pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny.**

### ÚČEL

Trojpodová palica je určená pre osoby, ktoré potrebujú oporu pri zaistení mobility, pomoc pri chôdzi, udržiavanie rovnováhy a prenášanie telesnej hmotnosti v prípadoch traumatických a ortopedických stavov dolných končatín. Trojpodová palica má tri oporné body, ktoré poskytujú používateľovi väčšiu stabilitu pri chôdzi. Je určená pre pacientov s problémami s rovnováhou, po úrazoch, počas liečby degeneratívnych zmien, po operáciách, keď je vhodné odľahčiť tlak na jednu končatinu.

### BEZPEČNOSTNÉ POKYNY NA POUŽÍVANIE

V záujme bezpečnosti je potrebné dodržiavať nasledujúce odporúčania:

1. Neprekračujte maximálne prípustné zaťaženie.
2. Pri používaní trojpodovej palice vždy dbajte na zvýšenú opatrnosť. Vyhýbajte sa všetkým potenciálnym nebezpečenstvám, ako sú nerovný alebo mäkký povrch, prekážky na ceste, mokrá podlaha atď.
3. Používajte iba originálne príslušenstvo. Použitie neoriginálnych dielov môže mať za následok nedostatočné prispôsobenie, čo môže viesť k riziku pádu.
4. Každú závažnú udalosť týkajúcu sa pomôcky nahláste výrobcovi.

### NASTAVENIE VÝŠKY

Na nastavenie trojnožky do požadovanej výšky:

- Stlačte uvoľňovacie tlačidlo a mierne otočte základňu;
- nastavte na požadovanú výšku;
- otočte základňu tak, aby sa tlačidlo uzamklo v otvoroch.

Dôkladne skontrolujte, či je tlačidlo v otvoroch zaistené.



### POZOR!

**Nasledujúce odporúčania sú odporúčaniami výrobcu, ale mali by ste ich konzultovať so svojim lekárom alebo fyzioterapeutom.**

Výška trojbodovej palice by mala byť nastavená tak, aby používateľ mohol udržať vzpriamený postoj s nohou mierne pokrčenou v kolennom kĺbe. Rukoväť by mala byť nastavená tak, aby ruka zostala mierne ohnutá v lakt'ovom kĺbe a správna váha tela spočívala na rukách, a nie na ramenných jamkách.

## ČISTENIE

1. Plastové časti by sa mali čistiť len teplou vodou a mydlom.
2. Kovové časti by sa mali čistiť suchou handričkou.

## POZOR!

**Na čistenie trojbodovej palice nepoužívajte rozpúšťadlá, bielidlá ani abrazívne prostriedky.**

## ÚDRŽBA

Odporúča sa pravidelná kontrola palice, aby sa zabezpečilo, že:

1. sa neobjavili praskliny alebo prehnutie;
2. blokovacie tlačidlo správne zabezpečuje nastavenú výšku;
3. otvory v rúrke nie sú zväčšené alebo predĺžené;
4. v rukoväti alebo osovej opierke nie je žiadna vôľa;
5. násadec sa neopotreboval - ak sa opotreboval, vymeňte ho.

## POZOR!

**V prípade akýchkoľvek pochybností o vhodnosti výrobku na použitie sa obráťte na servisné oddelenie výrobcu.**




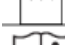



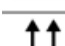
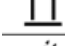

## KONŠTRUKCIA TROJNOŽKY

rukoväť  
rám  
násadec

## ZOZNAM POUŽITÝCH MATERIÁLOV

Rám	železo + hliník
Rukoväť	PA (polyamid)
Násadec	železo + guma bez latexu

## VYSVETLENIE SYMBOLOV

	Výrobca
	Označenie CE
	Referenčné číslo
	Dátum výroby
	Pozri návod na použitie
	Upozornenie
	Číslo šarže
	Vrchná časť, neprevracajte
	Skladujte na suchom mieste
	Krehké, zaobchádzajte opatrne

## VÝROBCA

Reha Fund Sp. z o.o.  
ul. Staniewicka 14  
03-310 Warszawa, Poľsko  
tel. 48 22 59 40 300  
fax. 48 22 59 40 307  
e-mail: info@rehafund.pl  
www.rehafund.pl

## DOVOZCA

SANITAS – zdravotnícke pomôcky, s.r.o.  
Polárna 6  
040 12 Košice  
t.č.: 055/62 229 25  
e-mail: sanitaske@sanitaske.sk  
www.sanitaske.sk

**ZÁRUČNÝ LIST**  
**TROJNOŽKA – TROJBODOVÁ VYCHÁDZKOVÁ PALICA RF-300**

Model	Sériové číslo	Dátum predaja	Podpis a pečiatka predajcu

**PODMIENKY ZÁRUKY**

- (1) Výrobca zaručuje zákazníkovi, že predaný predmet, na ktorý je vystavený tento záručný list, je úplne nový a kvalitný.
- (2) Na trojbodovú palicu sa vzťahuje záručná doba 24 mesiacov od dátumu predaja uvedeného v záručnom liste.
- (3) Podkladom pre posúdenie záručnej reklamácie je doručenie správne vyplneného záručného listu s priloženým dokladom o kúpe.
4. Prípadné závady zariadenia budú odstránené spoločnosťou REHA FUND Sp. z o.o. alebo autorizovanými servisnými technikmi za predpokladu, že zariadenie bolo používané v súlade s jeho účelom a odporúčaniami v návode na použitie.
- (5) Oprava bude vykonaná v čo najkratšom možnom čase, najneskôr do 30 dní, odo dňa prijatia zariadenia v servisnom stredisku.
- (6) Záruka sa nevzťahuje na
  - úkony údržby, čistenia a nastavovania opísané v návode na použitie;
  - diely podliehajúce opotrebovaniu počas bežného používania;
  - mechanické a tepelné poškodenie, napr. ohnutie, poškrabanie, zlomenie atď;
  - poškodenia spôsobené používaním zariadenia v rozpore s návodom na použitie, nedbalosťou, vykonávaním samostatných opráv, úprav alebo konštrukčných zmien.
- (7) Pred odovzdaním zariadenia autorizovanému servisnému technikovi na servis sa musí zariadenie vyčistiť v súlade s návodom na použitie.
- (8) Opravy a výmenu náhradných dielov by mali vykonávať autorizovaní servisní technici spoločnosti Reha Fund s.r.o.
- (9) V prípade neopodstatnenej reklamácie budú zákazníkovi účtované náklady na dopravu.
- (10) Územný rozsah záručnej ochrany sa vzťahuje na územie Slovenskej republiky.
- (11) Záruka na predaný tovar nevyklučuje, neobmedzuje ani nepozastavuje práva zákazníka vyplývajúce z nesúladu tovaru so zmluvou.

**Zoznam servisných opráv (vyplňa servis)**

	Dátum podania žiadosti	Objednávka č.	Popis závady/rozsah opravy	Dátum vykonania opravy	Pečiatka a podpis servisu
1.					
2.					