

NÁVOD NA POUŽITIE
PREDĹŽENÁ RUKA – UCHOPOVAČ – PODÁVAČ PREDMETOV RF-750, RF-751

PRODUKT		
Katalógové číslo	RF-750	RF-751
Názov modelu	Krátka predĺžená ruka	Dlhá predĺžená ruka
Dĺžka	66 cm	76 cm
Max. zaťaženie	1 kg	1 kg



POZOR: Pred použitím predĺženej ruky – uchopovača - si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny.

ÚČEL

Predĺžená ruka je určená pre osoby, ktoré majú problémy s pohyblivosťou rúk, najčastejšie následkom ochorenia chrbtice alebo po úrazoch, pre ktoré je zohýbanie problematické. Predĺžená ruka umožňuje používateľovi zdvíhať malé predmety bez toho, aby sa musel zohýbať alebo znižovať vzdialenosť. Hlava so zabudovaným magnetom umožňuje aj zdvíhanie malých kovových predmetov, ako sú napríklad špendlíky, ihly, kancelárske sponky atď.

BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ

V záujme bezpečnosti je potrebné dodržiavať nasledujúce odporúčania:

1. Neprekračujte maximálne prípustné zaťaženie.
2. výrobok používajte ho len v súlade s jeho určením.
3. používajte iba originálne príslušenstvo.

POZOR! Nedodržanie uvedených bezpečnostných pravidiel môže viesť k vážnym nehodám.

POZOR! O vhodnom používaní predĺženej ruky sa poraďte s lekárom alebo fyzioterapeutom podľa vašich funkčných schopností a každodenných činností.

POZOR! Nasledujúce informácie sú odporúčaním výrobcu, ale mali by ste ich konzultovať so svojim lekárom alebo rehabilitačným pracovníkom.

POZOR: Predĺžená ruka má obmedzenú kontaktnú plochu s manipulovaným predmetom a nie je vhodná na manipuláciu s predmetmi, ktoré si vyžadujú stabilnú polohu (napr. šálka čaju).

PRVKY PREDĹŽENEJ RUKY A POUŽITIE

Prvky predĺženej ruky sú znázornené na obrázku 1.


Spôsob použitia:

1. Umiestnite predĺženú ruku na predmet, ktorý chcete uchopiť.
2. Utiahnite predĺženú ruku pomocou spínača.
3. Uchopte výrobok.
4. Uvoľnite svorku, ak chcete predmet odložiť.
5. Na konci predĺženej ruky je magnet, ktorý priťahuje kovové predmety.

ČISTENIE

1. Plastové časti čistite len teplou mydlovou vodou.
2. Kovové časti čistite suchou handričkou.



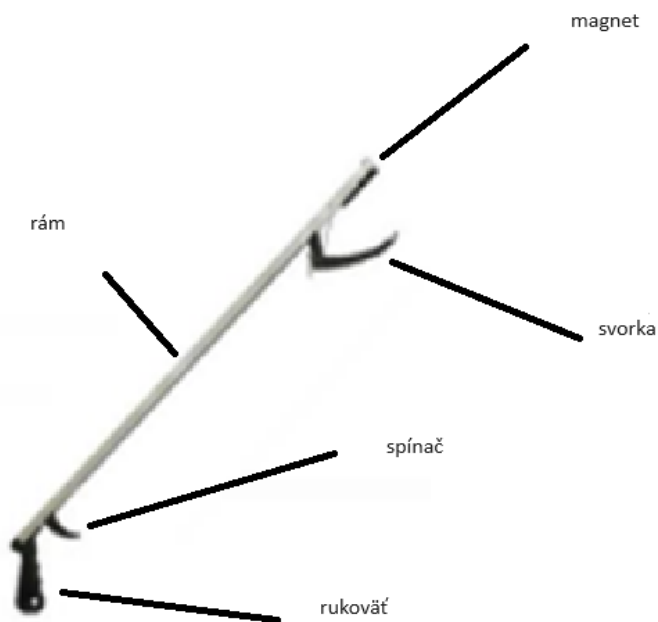



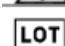
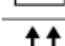


POZOR! Na čistenie predĺženej ruky nepoužívajte rozpúšťadlá, bielidlá ani abrazívne čistiace prostriedky.



ZOZNAM POUŽITÝCH MATERIÁLOV

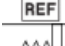Rukoväť	PA (polyamid)
Spínač	PA (polyamid)
Svorka	PA (polyamid)
Magnet	Magnet
Rám	Hliník

VYSVETLENIE SYMBOLOV

	Výrobca
	Označenie CE
	Referenčné číslo
	Dátum výroby
	Pozri návod na použitie
	Upozornenie
	Číslo šarže
	Vrchná časť, neprevracat'
	Skladujte na suchom mieste
	Krehké, zaobchádzať opatrne

ZÁRUČNÝ LIST
PREDLŽENÁ RUKA – UCHOPOVAČ – PODÁVAČ PREDMETOV RF-750, RF-751

Model:	Sériové číslo	Dátum predaja	Podpis a pečiatka predajcu:

PODMIENKY ZÁRUKY

- (1) Výrobca ubezpečuje zákazníka, že predaný predmet, na ktorý je vystavený tento záručný list, je úplne nový a kvalitný.
- (2) Na predĺženú ruku sa vzťahuje záručná doba 24 mesiacov od dátumu predaja uvedeného v záručnom liste.
- (3) Podkladom pre posúdenie záručnej reklamácie je doručenie správne vyplneného záručného listu s priloženým dokladom o kúpe.
- (4) Prípadné závady zariadenia budú odstránené spoločnosťou REHA FUND Sp. z o.o. alebo autorizovanými servisnými technikmi za predpokladu, že zariadenie bolo používané v súlade s jeho určením a odporúčaniami v návode na obsluhu.
- (5) Oprava bude vykonaná v čo najkratšom možnom čase, najneskôr do 30 dní, odo dňa prijatia zariadenia v servisnom stredisku.
- (6) Záruka sa nevzťahuje na
 - úkony údržby, čistenia a nastavovania opísané v návode na použitie;
 - diely podliehajúce opotrebovaniu počas bežného používania;
 - mechanické a tepelné poškodenie, napr. ohnutie, poškrabanie, zlomenie atď. ;
 - poškodenia spôsobené používaním zariadenia v rozpore s návodom na použitie, nedbalosťou, vykonávaním samostatných opráv, prestavieb alebo konštrukčných zmien.
- (7) Pred odovzdaním zariadenia do autorizovaného servisného strediska treba zariadenie vyčistiť v súlade s návodom na použitie, aby bolo vhodné na servis.
- (8) Opravy a výmenu náhradných dielov by mali vykonávať autorizovaní servisní technici spoločnosti Reha Fund s.r.o.
- (9) V prípade neopodstatnenej reklamácie budú zákazníkovi účtované náklady na dopravu.
- (10) Územný rozsah záručnej ochrany sa vzťahuje na územie Slovenskej republiky.
- (11) Záruka na predaný tovar nevylučuje, neobmedzuje ani nepozastavuje práva zákazníka vyplývajúce z nesúladu tovaru so zmluvou.

ZOZNAM SERVISNÝCH OPRAV (vyplní servis)

	Dátum podania žiadosti	Objednávka č.	Popis závady/rozsah opravy	Dátum vykonania opravy	Pečiatka a podpis servisu
1.					
2.					

VÝROBCA
Reha Fund Sp. z o.o.
ul. Staniewicka 14
03-310 Warszawa, Poľsko
tel. 48 22 59 40 300
fax. 48 22 59 40 307
e-mail: info@rehafund.pl
www.rehafund.pl

DOVOZCA
SANITAS – zdravotnícke pomôcky, s.r.o.
Polárna 6
040 12 Košice
t.č.: 055/62 229 25
e-mail: sanitaske@sanitaske.sk
www.sanitaske.sk