

Hygienická podložka pre deti a dospelých 3045

- + NEPREMOKAVÁ
- + NA VIACNÁSOBNÉ POUŽITIE (ĽAHKO UMÝVATEĽNÁ)
- + ODOLNÁ VOČI PÔSOBENIU DEZINFEKČNÝCH PROSTRIEDKOV
- + HYGIENICKÝ CERTIFIKÁT PZH (Štátneho ústavu verejného zdravia)
- + K DISPOZÍCII V DVOCH FARBÁCH: ZELENEJ A MODREJ

VEĽKOSŤ:

□ 70 x 100 cm □ 70 x 140 cm □ 140 x 100 cm □ 140 x 200 cm

NÁVOD NA POUŽITIE HYGIENICKÁ PODLOŽKA 3045

ÚČEL POUŽITIA

Hygienická podložka je určená na ochranu povrchu (napr. matracu, posteľ) pred znečistením telesnými exkrementami (napr. močom, krvou).

POPIS VÝROBKU

Vyrobená z nepremokavého materiálu: PVC vnútorná tkanina, PES/BAV vonkajšia tkanina.

ČISTENIE

Umývajte špongiou namočenou vo vodnom kúpeli s jemným čistiacim prostriedkom. Materiál možno dezinfikovať parou pri teplote 121 °C počas 20 minút, min. 50 cyklov.

KONTRAINDIKÁCIE

Nepoužívajte vlhký výrobok priamo v kontakte s pokožkou.

Nepoužívajte v prípade výskytu alergických kožných reakcií.

Nepoužívajte, ak dôjde k mechanickému poškodeniu výrobku (napr. prasknutie, roztrhnutie).

UPOZORNENIA!

Pred použitím sa poraďte s lekárom alebo rehabilitačným pracovníkom.

Nechlórujte (nepoužívajte na bieliace zmesi emitujúce voľný chlór).

Nečistite chemicky.

Nežehlite (nedovoľte kontakt s vyhrievanými povrchmi, napr. radiátorom).

Používajte na jednej strane (povrch PVC obráťte smerom nahor).

POZOR!

Zhoršenie vizuálno-estetických vlastností (napr. zvrásnenie povrchu) nemá vplyv na úžitkové vlastnosti materiálu (fyzikálno-mechanické vlastnosti).



PRAŤ PRI TEPLOTE.
MAX. 95° C

NEBIELIŤ

NEŽEHLIŤ

MOŽNO SUŠIŤ
V BUBNOVEJ SUŠIČKE

NEČISTIŤ CHEMICKY

MYŤ MOKROU
HUBKOU

VÝROBCA

Reha Fund Sp. z o.o.

ul. Staniewicka 14

03-310 Warszawa, Poľsko

tel. 48 22 59 40 300

fax. 48 22 59 40 307

e-mail: info@rehafund.pl

www.rehafund.pl

DOVOZCA

SANITAS – zdravotnícke pomôcky, s.r.o.

Polárna 6

040 12 Košice

t.č.: 055/62 229 25

e-mail: sanitaske@sanitaske.sk

www.sanitaske.sk