

# NÁVOD NA POUŽITIE

## SIETĚKOVÝ ZÁVES NA HORNÚ KONČATINU O-1501

### **POZOR! Pred prvým použitím výrobku si prečítajte tento dokument.**

Pri kúpe skontrolujte kompletnosť a kvalitatívny stav výrobku. Akékoľvek výhrady nahláste osobe, ktorá výrobok vydala. Pri nahlasovaní kvantitatívnych/kvalitatívnych výhrad postupujte podľa pokynov uvedených na záručnom liste, t. j. predložte doklad o kúpe a záručný list vyplnený predajcom.

### **I. OPIS VÝROBKU**

Sieťkový záves je vyrobený z odolnej a vzdušnej sieťoviny. Vďaka otvorenej konštrukcii a rozdeleniu podľa veľkosti umožňuje dokonalé prispôbenie telu.

### **II. VLASTNOSTI**

Sieťový záves sa môže používať na pravom alebo ľavom ramene. Končatinu podopiera nastaviteľný ramenný pás, ktorý umožňuje presné nastavenie polohy končatiny v správnej výške. Široký podporný pás zabezpečuje rovnomerné rozloženie hmotnosti tela po celej dĺžke chrbta.

### **III. SPÔSOB POUŽITIA**

- Uistite sa, či je veľkosť výrobku primeraná,
- Nasadíte si ortézu na rameno, v prípade potreby vložte palec do špeciálneho držiaka.
- Navlečte pás na rameno a zapnite ho klipsou,
- Pomocou nastavovača upravte dĺžku pásu.

### **IV. ROZMEROVÁ TABUĽKA**

Rozmer	Dĺžka predlaktia meraná v ohybe (od lakt'a po zápästie)
S	18-24 cm
M	21-27 cm
L	28-33 cm
XL	34-40 cm

### **V. ZLOŽENIE**

- sieťovina

### **VI. NÁVOD NA POUŽITIE**

- Spôsob nasadenia ortézy by mal predviesť kvalifikovaný zdravotnícky personál za prítomnosti osoby, ktorá sa stará o pacienta - používateľa (pokiaľ je to aktuálne),
- Výrobok a jeho súčasti by sa mali používať len na určený účel,
- Výrobok by sa mal nosiť priamo na tele alebo na odevu
- Výrobok sa musí udržiavať v čistote v súlade s pokynmi uvedenými v tomto návode a na štítku priloženom k výrobku.
- Nesprávne čistenie a údržba výrobku môže viesť k zmenám na pokožke

### **VII. POUŽITIE**

Výrobok sa môže používať

- Na podopretie sadrového obväzu, ako ochrana a zmiernenie tlaku po odstránení sadry,
- V prípade čiastočného poškodenia väzov ramenného kĺbu, rameno-klavikulárneho kĺbu, lakt'ového kĺbu,
- pri paréze hornej končatiny

### **VIII. KONTRAINDIKÁCIE**



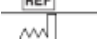


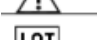
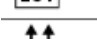
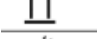







- Ak sa v miestach, kde ortéza prilieha, nachádzajú kožné zmeny, jej použitie je obmedzené a možné len pod lekárskej dohľadom,
- Je potrebné, aby ošetrojúci lekár posúdil použitie ortézy u osôb s poruchami pamäti rôzneho pôvodu, u osôb s psychickými poruchami a u detí.

## IX. ČISTENIE A ÚDRŽBA

Výrobok sa odporúča pravidelne umývať. Pred praním zapnite všetky suché zipsy ortézy.

- Perte ručne pri teplote do 30 °C vo vode s neutrálnym antialergickým pracím prostriedkom,
- Opláchnite vo vlažnej vode, nepoužívajte zmäkčovadlá,
- Nebiel'te,
- Nežehlite,
- Nečistite chemicky,
- Nesušte v bubnovej sušičke,
- Sušte na rovnom, tienenom a dobre vetranom mieste - výrobok nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.

## VYSVETLENIE SYMBOLOV

	Výrobca
	Označenie CE
	Referenčné číslo
	Dátum výroby
	Pozri návod na použitie
	Upozornenie
	Číslo šarže
	Vrchná časť, neprevracat'
	Skladujte na suchom mieste
	Krehké, manipulujte s ním opatrne
	Nprezávajte
	Obal je recyklovateľný
	Umývajte ručne
	Nebielit'
	Nežehlit'

### VÝROBCA

**Reha Fund Sp. z o.o.**

ul. Staniewicka 14  
03-310 Warszawa, Poľsko  
tel. 48 22 59 40 300  
fax. 48 22 59 40 307  
e-mail: info@rehafund.pl  
www.rehafund.pl

### DOVOZCA

SANITAS – zdravotnícke pomôcky, s.r.o.  
Polárna 6  
040 12 Košice  
t.č.: 055/62 229 25  
e-mail: sanitaske@sanitaske.sk  
www.sanitaske.sk

**ZÁRUČNÝ LIST**  
**SIETĚKOVÝ ZÁVES NA HORNÚ KONČATINU O-1501**

Model	Sériové číslo:	Dátum predaja	Podpis a pečiatka predajcu:

**PODMIENKY ZÁRUKY**

- (1) Výrobca zaručuje zákazníkovi, že výrobok, na ktorý je vystavený tento záručný list, je nový a kvalitný.
- (2) Na výrobok sa vzťahuje 24-mesačná záručná doba od dátumu predaja uvedeného v záručnom liste.
- (3) Podkladom pre posúdenie reklamácie je doručenie riadne vyplneného záručného listu spolu s dokladom o kúpe.
- (4) Prípadné závady budú odstránené spoločnosťou REHA FUND Sp. z o.o. alebo autorizovanými servisnými technikmi za predpokladu, že výrobok bol používaný v súlade s jeho určením a odporúčaniami uvedenými v návode na použitie.
- (5) Oprava/výmena sa vykoná najneskôr do 30 dní odo dňa prijatia výrobku v servisnom stredisku.
- (6) Záruka sa nevzťahuje na:
  - údržbu, čistenie a nastavenie pásu, ako je opísané v návode na použitie;
  - diely podliehajúce opotrebovaniu počas bežného používania;
  - mechanické a tepelné poškodenie pásu, napr. prasknutie, roztrhnutie atď;
  - poškodenia spôsobené používaním zariadenia v rozpore s návodom na použitie, nedbalosťou, neoprávnenými opravami, úpravami alebo konštrukčnými zmenami.
- (7) Pred odovzdaním výrobku autorizovanému servisnému technikovi ho treba vyčistiť v súlade s návodom na použitie.
- (8) Opravy a výmeny by mali vykonávať autorizovaní servisní technici spoločnosti Reha Fund s.r.o.
- (9) V prípade neopodstatnenej reklamácie budú zákazníkovi účtované náklady na dopravu.
- (10) Územná pôsobnosť záručnej ochrany sa vzťahuje na územie Slovenskej republiky.
- (11) Záruka na predaný tovar nevylučuje, neobmedzuje ani nepozastavuje práva zákazníka vyplývajúce z nesúladu tovaru so zmluvou.

**ZOZNAM SERVISNÝCH OPRAV (vyplní servis)**

	Dátum nahlásenia	Objednávacie číslo	Popis závady/rozsah opravy	Dátum opravy	Pečiatka a podpis servisu
1.					
2.					