

NÁVOD NA POUŽITIE
STOLIČKA NA OSOBNÚ HYGIENU OLIVER RF-810
ZDRAVOTNÍCKY VÝROBOK

Katalógové č: RF-810
Celková šírka: 48,5 cm
Šírka sedadla: 48,5 cm
Celková výška: 72,5 - 82,5 cm
Celková dĺžka: 47 cm
Výška sedadla: 39 - 49 cm
Hĺbka sedadla: 39 cm
Výška operadla: 36 cm
Maximálne bezpečné zaťaženie: 110 kg
Hmotnosť: 2,6 kg



POZOR! Pred použitím stoličky si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny.

ÚČEL

Stolička umožňuje osobám s obmedzenou pohyblivosťou, osobám po operáciách, seniorom udržiavať každodennú osobnú hygienu pri zachovaní značnej nezávislosti. Špeciálny výrez umožňuje aj starostlivosť o hygienu intímnych miest. Vďaka tomuto zariadeniu sa výrazne znižuje riziko pádu alebo iného zranenia, ku ktorým môže dôjsť v sprche.

BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ

V záujme vašej bezpečnosti dodržiavajte nasledujúce odporúčania:

1. Pred použitím stoličky sa uistite, že:
 - a. výška sedadla je správne nastavená;
 - b. uzamykacie tlačidlá fungujú správne;
 - c. gumové krytky sú v dobrom stave;
 - d. všetky nožičky sú nastavené v rovnakej výške.
2. Používajte iba originálne príslušenstvo. Použitie neoriginálnych dielov môže spôsobiť nesprávne nastavenie stoličky, čo môže viesť k nebezpečenstvu pádu.
3. Neprekračujte maximálne prípustné zaťaženie stoličky.
4. Neskladujte pri teplotách nižších ako 0 °C.
5. Pred použitím sa uistite, či sú rúrky na nohy v rovnakej výške.
6. Nepokúšajte sa pohybovať stoličkou do alebo zo sklonu s vodou, ľadom alebo olejom.
7. Stolička sa musí používať na rovnom povrchu.
8. Pred každým použitím skontrolujte stabilitu stoličky a úroveň utiahnutia skrutiek.
9. Každý závažný incident týkajúci sa pomôcky sa musí nahlásiť výrobcovi.

POZOR!

Nedodržanie týchto bezpečnostných opatrení môže viesť k vážnym nehodám.

NASTAVENIE VÝŠKY

1. Stlačte bezpečnostné tlačidlo na nohe stoličky a jemne ním otočte.
2. Nastavte požadovanú výšku.
3. Nasmerujte tlačidlo na príslušný otvor, čím sa nožička stoličky zablokuje v požadovanej výške.
4. Zopakujte vyššie uvedené kroky na každej nohe, čím zabezpečíte, že všetky nohy budú nastavené v rovnakej výške.

POZOR!

Uistite sa, že sú všetky nožičky správne zaistené a nastavené na rovnakú výšku.

SEDENIE A VSTÁVANIE

1. Uistite sa, že stolička stojí stabilne a je pripravená na použitie.
2. Postavte sa chrbtom k stoličke tak, aby ste sa zadnou časťou kolien dotýkali prednej časti stoličky.
3. Natiahnite ruky dozadu a oprite sa dlaňami o sedadlo.
4. Pomaly si sadnite na stoličku, pričom ohýbajte lakty a podľa možnosti aj kolena a boky.
5. Ak chcete vstať zo stoličky, oprite sa rukami o sedadlo a zdvihnite sa.

MONTÁŽ

1. Pripravte si montážnu súpravu (obr. 1).
2. Prekrižte nohy stoličky (obr. 2).
3. Pripevnite ich k sedadlu zospodu (obr. 3).
4. Naskrutkujte skrutku s podložkou do stredu sedadla. Skrutku však nedotiahnite úplne (obr. 4).
5. Pripevnite rúrky operadla pomocou skrutiek spolu s podložkami. Skrutku však nedotiahnite úplne (obr. 5).
6. Pripevnite operadlo pomocou skrutiek a podložiek. Skrutky však nedotiahnite úplne (obr. 6).
7. Teraz utiahnite všetky skrutky, jednu po druhej, po troške. Ak skrutky utiahnete skôr, môžete mať problémy s montážou.



Vyššie uvedené obrázky slúžia len na ilustráciu.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

1 Odporúča sa pravidelne kontrolovať stoličku, či nie je poškodená alebo nemá viditeľné známky opotrebenia. Pravidelne kontrolujte, či:



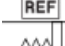



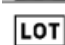
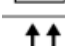
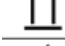

- a. sa na ráme neobjavujú praskliny alebo prehnutie;
 - b. aretačné tlačidlo správne zabezpečuje nastavenú výšku;
 - c. otvory v trubkách nie sú zväčšené alebo predĺžené;
 - d. spodné krytky nie sú opotrebované – v takom prípade ich treba vymeniť;
 - e. žiadne iné časti stoličky nie sú uvoľnené alebo poškodené.
2. Odporúča sa pravidelné čistenie stoličky mäkkou handričkou a mydlovou vodou.
 3. Stolička by sa mala po čistení vysušiť mäkkou handričkou.
 4. Pred použitím skontrolujte dotiahnutie skrutiek a stabilitu stoličky.
 5. Pravidelné čistenie zabráni znečisteniu rúrok a zabezpečí správnu funkciu stoličky.

POZOR! Na čistenie stoličky nepoužívajte rozpúšťadlá, bielidlá ani abrazívne čistiace prostriedky.

ZOZNAM POUŽITÝCH MATERIÁLOV

Rám	Hliník
Sedadlo	PE (polyetylén)
Operadlo	PE (polyetylén)
Násadka	TPR (termoplastická guma)
Uzamykacie tlačidlo	ocel'

VYSVETLENIE SYMBOLOV

	Výrobca
	Označenie CE
	Referenčné číslo
	Dátum výroby
	Pozri návod na použitie
	Upozornenie
	Číslo šarže
	Vrchná časť, neprevracajte
	Skladujte na suchom mieste
	Krehké, zaobchádzať opatrne

VÝROBCA

Reha Fund Sp. z o.o.
ul. Staniewicka 14
03-310 Warszawa, Poľsko
tel. 48 22 59 40 300
fax. 48 22 59 40 307
e-mail: info@rehafund.pl
www.rehafund.pl

DOVOZCA

SANITAS – zdravotnícke pomôcky, s.r.o.
Polárna 6
040 12 Košice
t.č.: 055/62 229 25
e-mail: sanitaske@sanitaske.sk
www.sanitaske.sk

ZÁRUČNÝ LIST
STOLIČKA NA OSOBNÚ HYGIENU OLIVER RF-810

Model:	Sériové číslo:	Dátum predaja:	Podpis a pečiatka predajcu:

PODMIENKY ZÁRUKY

- (1) Výrobca ubezpečuje zákazníka, že predmet predaja, na ktorý je vystavený tento záručný list, je úplne nový a kvalitný.
- (2) Na stoličku sa vzťahuje záručná doba 24 mesiacov od dátumu predaja v záručnom liste.
- (3) Základom pre posúdenie reklamácie je doručenie správne vyplneného záručného listu s priloženým dokladom o kúpe.
- (4) Prípadné závady zariadenia budú odstránené spoločnosťou REHA FUND Sp. z o.o. alebo autorizovanými servisnými technikmi za predpokladu, že stolička bola používaná v súlade s jej určením a odporúčaniami v návode na použitie.
- (5) Oprava bude vykonaná v čo najkratšom možnom čase, najneskôr do 30 dní, odo dňa prijatia zariadenia v servisnom mieste.
- (6) Záruka sa nevzťahuje na:
 - úkony údržby, čistenia a nastavenia opísané v návode na použitie;
 - diely podliehajúce opotrebovaniu počas bežného používania;
 - mechanické a tepelné poškodenie, napr. ohnutie, poškrabanie, zlomenie atď. ;
 - poškodenia spôsobené používaním zariadenia v rozpore s návodom na použitie, nedbalosťou, vykonávaním samostatných opráv, prestavieb alebo konštrukčných zmien.
- (7) Pred odovzdaním zariadenia do autorizovaného servisného strediska treba zariadenie vyčistiť v súlade s návodom na použitie, aby bolo vhodné na servis.
- (8) Opravy a výmenu náhradných dielov by mali vykonávať autorizovaní servisní technici spoločnosti Reha Fund s.r.o.
- (9) V prípade neopodstatnenej reklamácie budú zákazníkovi účtované náklady na dopravu.
- (10) Územný rozsah záručnej ochrany sa vzťahuje na územie Slovenskej republiky.
- (11) Záruka na predaný tovar nevylučuje, neobmedzuje ani nepozastavuje práva zákazníka vyplývajúce z nesúladu tovaru so zmluvou.

ZOZNAM SERVISNÝCH OPRAV (vyplní servis)

	Dátum podania žiadosti	Objednávka č.	Popis závady/rozsah opravy	Dátum vykonania opravy	Pečiatka a podpis servisu
1.					
2.					