

NÁVOD NA POUŽITIE REHABILITAČNÝ POLVALČEK AD-8

Tove

Určený je na použitie počas rehabilitácie, korekčnej gymnastiky alebo pri masážach. Môže sa používať na rehabilitačných klinikách i doma.

Pomáha udržiavať správnu polohu tela

Je v nepremokavom, ľahko umývateľnom poťahu so zipsom.

Je vyrobený z peny s vysokou hustotou - odolný voči deformácii

Vyrobeneý v Poľsku

ÚČEL

Rehabilitačný penový polvalček v nepremokavom poťahu je určený na používanie pri rehabilitáciách, korekčnej gymnastike alebo masážach. Môže sa používať na rehabilitačných klinikách i doma.

VLASTNOSTI

Vyrobeneý z polyuretánovej peny. Poťah je z nepremokavej tkaniny (umelej kože). Balenie obsahuje jeden kus.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Poťah čistíte špongiou alebo mäkkou kefou namočenou v teplej vode s jemným čistiacim prostriedkom. Nakoniec vyčistenú plochu pretrite vlhkou handričkou a vytrite do sucha. Celú penu nenamáčajte do vody.

KONTRAINDIKÁCIE

Nepoužívajte vlhký výrobok priamo v kontakte s pokožkou.

Nepoužívajte v prípade výskytu alergických kožných reakcií.

Nepoužívajte, ak dôjde k mechanickému poškodeniu výrobku (napr. prasknutie, roztrhnutie).

UPOZORNENIA

Pred použitím konzultujte vhodnosť použitia, výber výrobku a spôsob použitia s lekárom alebo rehabilitačným špecialistom. Pred prvým použitím umyte obal, v ktorom je polvalec umiestnený.

Výrobok by sa mal vyberať podľa telesnej veľkosti.

Výrobok nevystavujte otvorenému ohňu ani iným zdrojom vznietenia. Pena vystavená otvorenému ohňu sa rýchlo vznieti.

Výrobok nevystavujte dlhodobo nízkym teplotám (pod 5 °C).

Obal výrobku nie je hračka.

Akýkoľvek závažný incident súvisiaci s výrobkom treba nahlásiť výrobcovi.

POZOR

Nevystavujte výrobok dlhodobému priamemu slnečnému žiareniu, pretože sa môže pod vplyvom slnečného žiarenia sfarbiť. Zmena farby peny nemá vplyv na fyzikálne a mechanické vlastnosti výrobku.

ZÁRUKA

Na výrobok sa vzťahuje 24-mesačná záručná doba. Má sa používať v súlade s jeho určením a podľa odporúčaní uvedených v návode na použitie. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené používaním výrobku v rozpore s návodom na použitie, nedbalosťou, vykonávaním samostatných opráv, úprav alebo konštrukčných zmien. Výrobok musí byť do servisného strediska doručený čistý. V prípade neopodstatnenosti reklamácie budú kupujúcemu účtované náklady na spracovanie a reklamáciu. Záruka sa poskytuje na základe dokladu o kúpe. Územný rozsah záručnej ochrany sa vzťahuje na územie Slovenskej republiky. Záruka na predaný tovar nevyučuje, neobmedzuje ani nepozastavuje práva kupujúceho vyplývajúce z nesúladu tovaru so zmluvou.

VÝROBCA

Reha Fund Sp. z o.o.

ul. Staniewicka 14

03-310 Warszawa, Poľsko

tel. 48 22 59 40 300

fax. 48 22 59 40 307

e-mail: info@rehafund.pl

www.rehafund.pl

DOVOZCA

SANITAS – zdravotnícke pomôcky, s.r.o.

Polárna 6

040 12 Košice

t.č.: 055/62 229 25

e-mail: sanitaske@sanitaske.sk

www.sanitaske.sk