

NÁVOD NA POUŽITIE SPRCHOVÁ STOLIČKA NATHAN RF-820

Katalógové č: RF-820
Celková šírka: 50 cm
Šírka sedadla: 50 cm
Celková výška: 75-85 cm
Celková dĺžka: 48 cm
Výška sedadla: 39-49 cm
Hĺbka sedadla: 35 cm
Výška operadla: 37 cm
Maximálne bezpečné zaťaženie: 110 kg
Hmotnosť: 2,9 kg



POZOR! Pred prvým použitím stoličky si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny.

ÚČEL

Stolička umožňuje seniorom, ľuďom s obmedzenou pohyblivosťou, udržiavať každodennú osobnú hygienu pri zachovaní značnej nezávislosti. S týmto zariadením sa výrazne znižuje riziko pádu alebo iného zranenia, ku ktorému môže dôjsť v sprche.

BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ

V záujme zachovania bezpečnosti je potrebné dodržiavať nasledujúce odporúčania:

1. Pred použitím sprchovej stoličky sa uistite, že
 - a. výška sedadla je správne nastavená;
 - b. uzamykacie tlačidlá fungujú správne;
 - c. gumové krytky sú v dobrom stave;
 - d. všetky nožičky sú nastavené v rovnakej výške.
2. Používajte iba originálne príslušenstvo. Použitie neoriginálnych dielov môže spôsobiť nesprávne nastavenie stoličky, čo môže viesť k nebezpečenstvu pádu.
3. Neprekračujte maximálne prípustné zaťaženie stoličky.
4. Neskladujte pri teplotách nižších ako 0 °C.
5. Pred použitím sa uistite, či sú rúrky na nohy v rovnakej výške.
6. Nepokúšajte sa posúvať stoličku nahor alebo nadol po naklonenej rovine s vodou, ľadom alebo olejom.
7. Stolička sa musí používať na rovnom povrchu.
8. Pred každým použitím skontrolujte stabilitu stoličky a úroveň utiahnutia skrutiek.
9. Každá závažná udalosť súvisiaca s pomôckou sa musí nahlásiť výrobcovi.

POZOR! Nedodržanie uvedených bezpečnostných opatrení môže viesť k vážnym nehodám.

NASTAVENIE VÝŠKY

1. Stlačte bezpečnostné tlačidlo na nohe stoličky a jemne ním otočte.
2. Nastavte požadovanú výšku.
3. Nasmerujte tlačidlo na požadovaný otvor, aby sa noha stoličkyablokovala v požadovanej výške.
4. Zopakujte vyššie uvedené kroky na každej nohe, čím zabezpečíte, že všetky nohy budú nastavené v rovnakej výške.



POZOR! Uistite sa, že sú všetky nožičky správne zablokované a nastavené do rovnakej výšky.


ČASTI STOLIČKY



Vyššie uvedená fotografia slúži len na porovnanie.

MONTÁŽ

1. Pripravte si montážnu súpravu (obr. 1).
2. Namontujte nohy stoličky zo spodnej strany sedadla (obr. 2).
3. Potom namontujte rúrky operadla (obr. 3).
4. Vložte skrutky do otvorov a rovnomerne ich zaskrutkujte - každú skrutku zaskrutkujte postupne. Ak skrutky zaskrutkujete úplne jednu po druhej, môžete mať problémy s montážou (obr. 4).
5. Zostavte zadnú opierku (obr. 5).
6. Skontrolujte, či je stolička priskrutkovaná skrutkami stabilná (obr. 6).

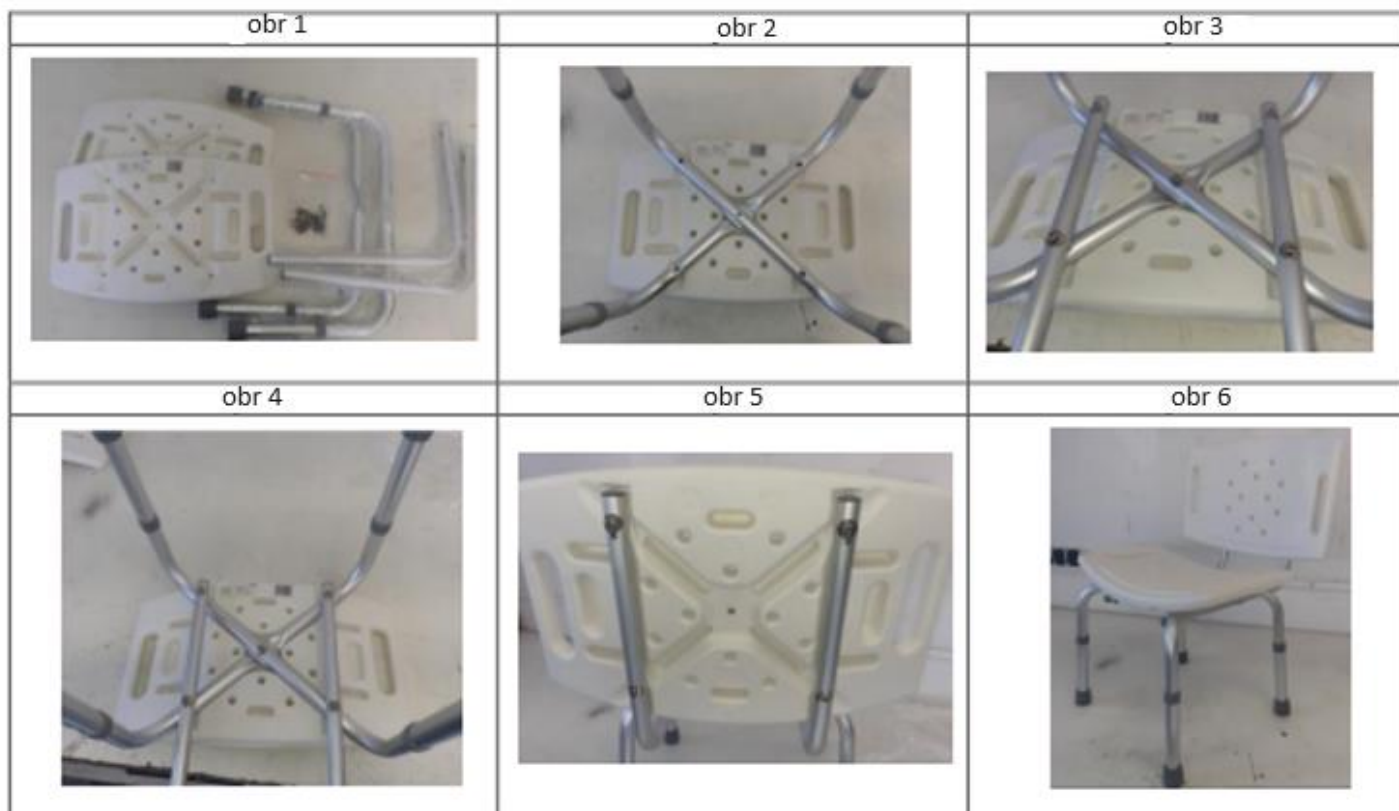

Uvedené obrázky slúžia len na ilustračné účely.

SEDENIE A VSTÁVANIE

1. Uistite sa, že stolička je stabilná a pripravená na použitie.
2. Postavte sa chrbtom k stoličke tak, aby ste sa zadnou časťou kolien dotýkali prednej časti stoličky.
3. Natiahnite ruky dozadu a oprite si dlane o sedadlo.
4. Pomaly si sadnite na stoličku, pričom ohýbajte lakte a podľa možnosti aj kolená a boky.
5. Ak chcete vstať zo stoličky, oprite sa rukami o sedadlo a zdvihnite sa.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

1. Odporúča sa pravidelne kontrolovať stoličku, či nie je poškodená alebo nemá viditeľné známky opotrebovania. Pravidelne kontrolujte, či:
 - a. na ráme sa neobjavujú praskliny alebo prehnutie;
 - b. aretačné tlačidlo správne zabezpečuje nastavenú výšku;
 - c. otvory v trubkách nie sú zväčšené alebo predĺžené;
 - d. spodné krytky nie sú opotrebované - ak áno, mali by sa vymeniť;
 - e. žiadne iné časti stoličky nie sú uvoľnené alebo poškodené.
2. Odporúča sa pravidelné čistenie stoličky mäkkou handričkou a mydlovou vodou.
3. Po vyčistení treba stoličku vysušiť mäkkou handričkou.
4. Pravidelné čistenie zabráni znečisteniu rúrok a zabezpečí správnu funkciu stoličky.

POZOR! Na čistenie stoličky nepoužívajte rozpúšťadlá, bielidlá ani abrazívne čistiace prostriedky.

ZOZNAM POUŽITÝCH MATERIÁLOV

Rám	Hliník
Sedadlo	PE (polyetylén)
Operadlo	PE (polyetylén)
Násadka	TPR (termoplastická guma)
Uzamykacie tlačidlo	ocel'

VYSVETLENIE SYMBOLOV

	Výrobca
	Označenie CE
	Referenčné číslo
	Dátum výroby
	Pozri návod na použitie
	Upozornenie
	Číslo šarže
	Vrchná časť, neprevracat'
	Skladujte na suchom mieste
	Krehké, zaobchádzat' opatrne

VÝROBCA

Reha Fund Sp. z o.o.
ul. Staniewicka 14
03-310 Warszawa, Poľsko
tel. 48 22 59 40 300
fax. 48 22 59 40 307
e-mail: info@rehafund.pl
www.rehafund.pl

DOVOZCA

SANITAS – zdravotnícke pomôcky, s.r.o.
Polárna 6
040 12 Košice
t.č.: 055/62 229 25
e-mail: sanitaske@sanitaske.sk
www.sanitaske.sk

ZÁRUČNÝ LIST
SPRCHOVÁ STOLIČKA NATHAN RF-820

Model:	Sériové číslo:	Dátum predaja:	Podpis a pečiatka predajcu:

PODMIENKY ZÁRUKY

- (1) Výrobca ubezpečuje zákazníka, že predmet predaja, na ktorý je vystavený tento záručný list, je úplne nový a kvalitný.
- (2) Na stoličku sa vzťahuje záručná doba 24 mesiacov od dátumu predaja v záručnom liste.
- (3) Základom pre posúdenie reklamácie je doručenie správne vyplneného záručného listu s priloženým dokladom o kúpe.
- (4) Prípadné závady zariadenia budú odstránené spoločnosťou REHA FUND Sp. z o.o. alebo autorizovanými servisnými technikmi za predpokladu, že stolička bola používaná v súlade s jej určením a odporúčaniami v návode na použitie.
- (5) Oprava bude vykonaná v čo najkratšom možnom čase, najneskôr do 30 dní, odo dňa prijatia zariadenia v servisnom mieste.
- (6) Záruka sa nevzťahuje na:
 - úkony údržby, čistenia a nastavenia opísané v návode na použitie;
 - diely podliehajúce opotrebovaniu počas bežného používania;
 - mechanické a tepelné poškodenie, napr. ohnutie, poškriabanie, zlomenie atď. ;
 - poškodenia spôsobené používaním zariadenia v rozpore s návodom na použitie, nedbalosťou, vykonávaním samostatných opráv, prestavieb alebo konštrukčných zmien.
- (7) Pred odovzdaním zariadenia do autorizovaného servisného strediska treba zariadenie vyčistiť v súlade s návodom na použitie, aby bolo vhodné na servis.
- (8) Opravy a výmenu náhradných dielov by mali vykonávať autorizovaní servisní technici spoločnosti Reha Fund s.r.o.
- (9) V prípade neopodstatnenej reklamácie budú zákazníkovi účtované náklady na dopravu.
- (10) Územný rozsah záručnej ochrany sa vzťahuje na územie Slovenskej republiky.
- (11) Záruka na predaný tovar nevyklučuje, neobmedzuje ani nepozastavuje práva zákazníka vyplývajúce z nesúladu tovaru so zmluvou.

ZOZNAM SERVISNÝCH OPRAV (vyplní servisné stredisko)

	Dátum podania žiadosti	Objednávka č.	Popis závady/rozsah opravy	Dátum vykonania opravy	Pečiatka a podpis servisu
1.					
2.					