

NÁVOD NA POUŽITIE ANTIDEKUBITNÉ KOLESO AD-3

Penové koleso proti dekubitom v pot'ahu z froté. Poskytuje primeranú stabilizáciu a zníženie tlaku podkladu na mäkké tkanivá, oblasť lakt'ov, päty, hlavy a kostrče. Podporuje antidekubitný účinok.

Pot'ah z froté s vysokým obsahom bavlny so zapínaním na suchý zips.

Vyrobený z peny s vysokou hustotou - odolný voči deformácii. Vyrobené v Poľsku.

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> ϕ 13cm, výška 5cm | <input type="checkbox"/> ϕ 25cm, výška 7cm |
| <input type="checkbox"/> ϕ 15cm, výška 5cm | <input type="checkbox"/> ϕ 40cm, výška 5cm |
| <input type="checkbox"/> ϕ 18cm, výška 5cm | <input type="checkbox"/> ϕ 40cm, výška 8cm |
| <input type="checkbox"/> ϕ 20cm, výška 6cm | |

ÚČEL

Penové antidekubitné koleso v pot'ahu z froté zabezpečuje vhodnú stabilizáciu a zníženie tlaku podkladu na mäkké tkanivá, v oblasti lakt'ov, päty, hlavy a kostrče.

VLASTNOSTI

Koleso je vyrobené z polyuretánovej peny. Koleso je v pot'ahu z froté tkaniny s vysokým obsahom bavlny, zapínanie je na suchý zips.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Pot'ah perie pri teplote do 40 °C. Penu čistite mäkkou handričkou namočenou v teplej vode s jemným čistiacim prostriedkom. Po čistení dobre vysušte. Nenamáčajte celú penu do vody.

KONTRAINDIKÁCIE

Nepoužívajte vlhký výrobok priamo v kontakte s pokožkou.

Nepoužívajte v prípade výskytu alergických kožných reakcií.

Nepoužívajte, ak dôjde k mechanickému poškodeniu výrobku (napr. prasknutie, roztrhnutie).

UPOZORNENIA

Pred použitím sa poraďte o vhodnosti, výbere výrobku a spôsobe použitia so zdravotníckym alebo rehabilitačným pracovníkom.

Pot'ah, do ktorého je vankúš vložený, treba pred prvým použitím vyprať.

Výrobok by sa mal vyberať podľa telesnej veľkosti.

Výrobok nevystavujte otvorenému ohňu ani iným zdrojom vznietenia. Pena vystavená otvorenému ohňu sa rýchlo vznieti.

Nevystavujte výrobok dlhodobo nízkym teplotám (pod 5 °C).

Obal výrobku nie je hračka.

Akýkoľvek závažný incident súvisiaci s výrobkom treba nahlásiť výrobcovi.

POZOR!

Nevystavujte výrobok dlhodobému priamemu slnečnému žiareniu, pretože sa môže vplyvom slnečného žiarenia sfarbiť. Zmena farby peny nemá vplyv na fyzikálne a mechanické vlastnosti výrobku.

ZÁRUKA

Na predmet sa vzťahuje 24-mesačná záručná doba. Musí sa používať v súlade s jeho určením a v súlade s pokynmi uvedenými v návode na použitie. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené používaním výrobku v rozpore s návodom na použitie, nedbalosťou, vykonávaním samostatných opráv, úprav alebo konštrukčných zmien. Výrobok musí byť do servisného strediska doručený čistý. V prípade neopodstatnenej reklamácie budú kupujúcemu účtované náklady na opravu a výmenu. Záruka sa poskytuje na základe dokladu o kúpe. Územná pôsobnosť záruky sa vzťahuje na územie Slovenskej republiky. Záruka na predaný tovar nevylučuje, neobmedzuje ani nepozastavuje práva kupujúceho vyplývajúce z nesúladu tovaru so zmluvou.

VÝROBCA

Reha Fund Sp. z o.o.

ul. Staniewicka 14

03-310 Warszawa, Poľsko

tel. 48 22 59 40 300

fax. 48 22 59 40 307

e-mail: info@rehafund.pl

www.rehafund.pl

DOVOZCA

SANITAS – zdravotnícke pomôcky, s.r.o.

Polárna 6

040 12 Košice

t.č.: 055/62 229 25

e-mail: sanitaske@sanitaske.sk

www.sanitaske.sk