

# NÁVOD NA POUŽITIE

## ORTOPEDICKÝ VANKÚŠ MORPHEUSZ DELICATE 664

Katalógové č.: 664

Rozmery: 48 cm x 30 cm x 1 1/4 cm

Pred použitím vankúša si pozorne prečítajte nižšie uvedené pokyny.

### ÚČEL POUŽITIA

Vankúš je určený na používanie pri prevencii a predchádzaní degenerácii a bolesti krčnej chrbtice spôsobenej nesprávnou polohou počas spánku, pre osoby, ktoré majú problémy kvôli nesprávnej polohe krku a hlavy počas spánku (napr. bolesti chrbta, svalové napätie, mravčenie a necitlivosť končatín a pod.), ktoré počas spánku potrebujú stabilnú opierku krku a hlavy. Pre všetky typy postavy a telesné výšky, pre osoby spiace na chrbte alebo na boku.

### ČISTENIE A ÚDRŽBA

Čistite mäkkou handričkou namočenou v teplej vode s jemným čistiacim prostriedkom. Obliečku na vankúš perte a čistite podľa informácií na štítku. Po čistení dobre vysušte.

**POZNÁMKA:** Nenamáčajte celú penu do vody.

### KONTRAINDIKÁCIE

Nepoužívajte mokrý výrobok priamo v kontakte s pokožkou.

Nepoužívajte v prípade alergických kožných reakcií.

Nepoužívajte, ak došlo k mechanickému poškodeniu (napr. roztrhnutiu, prasknutiu).

Nepoužívajte inak, ako je určené.

### UPOZORNENIA

Pred použitím sa poraďte s lekárom alebo rehabilitačným špecialistom, či nie sú prítomné kontraindikácie používania výrobku.

Výrobok by sa mal prispôbiť veľkosti tela s použitím podložky na nastavenie výšky alebo bez nej.

Výrobok nevystavujte otvorenému ohňu ani iným zdrojom vznetenia. Pena vystavená otvorenému ohňu sa rýchlo vznieti.

Výrobok dlhodobo nevystavujte nízkym teplotám (pod 5 °C).

Obal výrobku nie je hračka.







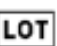

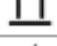






Akýkoľvek závažný incident týkajúci sa výrobku je potrebné nahlásiť výrobcovi a Úradu pre registráciu liekov pre zdravotnícke pomôcky a biocídne výrobky.

**POZOR!** Penu treba chrániť pred slnečným žiarením, pretože pri vystavení slnečnému žiareniu môže zmeniť farbu. Zmena farby peny nemá vplyv na jej fyzikálne a mechanické vlastnosti.

### ZOZNAM POUŽITÝCH MATERIÁLOV

Penová vložka	100% polyuretánová pena
Podšívka	100% polyester
Obliečka	100% bavlna

## VYSVETLENIE SYMBOLOV

	Výrobca
	Označenie CE
	Referenčné číslo
	Dátum výroby
	Pozri návod na použitie
	Upozornenie
	Číslo šarže
	Vrchná časť, neprevracajte
	Skladujte na suchom mieste
	Krehký, manipulujte s ním opatrne
	Neperte
	Nebielite
	Nežehlite
	Nečistite chemicky
	Sušte rozložené plocho v tieni

**CE**

verzia 1.3

vydané: 01/2021

### VÝROBCA

Reha Fund Sp. z o.o.  
ul. Staniewicka 14  
03-310 Warszawa, Poľsko  
tel. 48 22 59 40 300  
fax. 48 22 59 40 307  
e-mail: info@rehafund.pl  
www.rehafund.pl

### DOVOZCA

SANITAS – zdravotnícke pomôcky, s.r.o.  
Polárna 6  
040 12 Košice  
t.č.: 055/62 229 25  
e-mail: sanitaske@sanitaske.sk  
www.sanitaske.sk

**ZÁRUČNÝ LIST**  
**ORTOPEDICKÝ VANKÚŠ MORPHEUSZ DELICATE**

Model:	Sériové číslo:	Dátum predaja:	Podpis a pečiatka predávajúceho:

**ZÁRUČNÉ PODMIENKY**

- (1) Výrobca zaručuje zákazníkovi, že predmet, na ktorý je vystavený tento záručný list, je úplne nový a kvalitný.
- (2) Na vankúš sa vzťahuje 24-mesačná záručná doba od dátumu predaja v záručnom liste.
- (3) Podkladom pre posúdenie reklamácie je doručenie správne vyplneného záručného listu s priloženým dokladom o kúpe.
4. Prípadné závady zariadenia budú odstránené spoločnosťou REHA FUND Sp. z o.o. alebo autorizovanými servisnými technikmi za predpokladu, že vankúš bol používaný v súlade s jeho určením a odporúčaniami uvedenými v návode na použitie.
- (5) Oprava bude vykonaná v čo najkratšom možnom čase, maximálne do 30 dní odo dňa prijatia výrobku v servisnom stredisku.
- (6) Záruka sa nevzťahuje na:
  - údržbu, čistenie a nastavenie vankúša, ako je popísané v návode na použitie;
  - diely opotrebené počas bežného používania;
  - mechanické a tepelné poškodenie, napr. deformáciu, roztrhnutie;
  - poškodenia vyplývajúce z používania zariadenia, ktoré nie je v súlade s návodom na použitie, z nedbalosti, vykonávania samostatných opráv, úprav alebo konštrukčných zmien.
- (7) Pred odovzdaním výrobku do autorizovaného servisného strediska je potrebné ho vyčistiť v súlade s návodom na použitie, aby bol vhodný na servis.
- (8) Opravy a výmenu náhradných dielov by mali vykonávať autorizovaní servisní technici spoločnosti Reha Fund Ltd.
- (9) V prípade neopodstatnenej reklamácie budú zákazníkovi účtované náklady na doručenie.
- (10) Územná pôsobnosť záručnej ochrany sa vzťahuje na územie Slovenskej republiky.
- (11) Záruka na predaný tovar nevylučuje, neobmedzuje ani nepozastavuje práva zákazníka vyplývajúce z nesúladu tovaru so zmluvou.

**ZOZNAM SERVISNÝCH OPRAV (vyplní servis)**

	Dátum nahlásenia	Objednávacie číslo	Popis závady/rozsah opravy	Dátum opravy	Pečiatka a podpis servisu
1.					
2.					