

ELASTICKÝ POŤAH NEPREMOKAVÝ 15/P/EN

Katalógové č. 15/P/EN

- nepremokavý
- opakovane použiteľný (ľahko umývateľný)
- vhodný pre penové a nafukovacie matrace
- elastický
- so sťahovacou šnúrkou
- biela farba

ROZMERY: 90 x 200 x 15 cm

Vhodný pre všetky modely penových a nafukovacích matracov od spoločnosti RehaFund Ltd.

NÁVOD NA POUŽITIE NEPREMOKAVÝ ELASTICKÝ POŤAH

ÚČEL POUŽITIA

Nepremokavý elastický poťah je určený na ochranu povrchu (napr. matraca, lôžka) pred znečistením telesnými exkrementmi (napr. močom, krvou).

POPIS VÝROBKU

Vyrobený z nepremokavého materiálu: polyesterová pletenina, polyuretánová ochranná vrstva.

ČISTENIE

Šetrne prať pri teplote do 90 °C.

KONTRAINDIKÁCIE

Nepoužívajte mokrý poťah priamo v kontakte s pokožkou.

Nepoužívajte v prípade výskytu alergických kožných reakcií.

Nepoužívajte, ak došlo k mechanickému poškodeniu výrobku (napr. prasknutie, roztrhnutie).

UPOZORNENIA!

Pred použitím sa poraďte s lekárom alebo rehabilitačným pracovníkom.

Nechlórujte (na bielenie nepoužívajte zlúčeniny vylučujúce voľný chlór).

Nečistite chemicky.

Nežehlite (nedovoľte kontakt s vyhrievanými povrchmi, napr. radiátorom).

Používajte na jednej strane (poťah má byť pletenou stranou nahor).

Nesušte v bubnovej sušičke.

POZOR!

Zhoršenie vizuálno-estetických vlastností (napr. pokrčenie povrchu) nemá vplyv na úžitkové vlastnosti tkaniny (fyzikálno-mechanické vlastnosti).



PERTE PRI TEPLOTE.
MAX. 90°C



NEBIELTE



NEŽEHLITE



SUŠTE PRI TEPLOTE
DO 70°C



NEČISTITE CHEMICKY



MYTE MOKROU
HUBKOU

VÝROBCA

Reha Fund Sp. z o.o.

ul. Staniewicka 14

03-310 Warszawa, Poľsko

tel. 48 22 59 40 300

fax. 48 22 59 40 307

e-mail: info@rehafund.pl

www.rehafund.pl

DOVOZCA

SANITAS – zdravotnícke pomôcky, s.r.o.

Polárna 6

040 12 Košice, SK

t.č.: 055/62 229 25

email: sanitaske@sanitaske.sk

www.sanitaske@sanitaske.sk