

## NÁVOD NA POUŽITIE CHODÍTKO ŠTVORKOLESOVÉ RF-610

Katalógové číslo: RF-610  
Max. bezpečné zaťaženie: 136 kg  
Nastavenie výšky rukoväte: 79-92,5 cm  
Šírka v rozloženom stave: 61,5 cm  
Šírka v zloženom stave: 27,5 cm  
Celková dĺžka: 64 cm  
Priemer kruhu: 20 cm  
Hmotnosť: 7,8 kg



**⚠️ POZOR!** Pred použitím chodca si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny.

### POUŽITIE

Chodítko je určené na pomoc ľuďom s obmedzenou pohyblivosťou, ktorí potrebujú oporu pri vstávaní, státi a chôdzi. Umožňuje vám samostatne vykonávať väčšinu vašich každodenných fyzických aktivít. Možno použiť v interiéri aj exteriéri.

### BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ

Pre vašu bezpečnosť dodržujte nasledujúce odporúčania:

1. Pred použitím chodítka sa vždy uistite, že je správne zaistené v rozloženej polohe.
2. Neprekračujte maximálne povolené zaťaženie chodítka.
3. V košíku neprevádzajte predmety, ktoré výrazne prečnievajú cez jeho plochu, pretože to môže ovplyvniť stabilitu chodítka.
4. Pri používaní chodítka buďte vždy mimoriadne opatrní. Vyhnite sa všetkým potenciálnym nebezpečenstvám, ako sú nerovné alebo mäkké povrchy, prekážky v ceste, mokré podlahy atď.
5. Používajte iba originálne príslušenstvo. Používanie neoriginálnych dielov môže mať za následok nesprávne prispôbenie chodítka, čo môže mať za následok riziko pádu.
6. Používanie chodítka v prostredí s vysokou vlhkosťou (sprcha, bazén a pod.) môže spôsobiť koróziu jeho pohyblivých častí, čo môže mať za následok poškodenie chodítka.
7. Chodítko nepoužívajte pri chôdzi po schodoch alebo eskalátoroch.
8. Chodítko neskladujte pri teplotách pod 0°C. Chodítko nevystavujte dlhodobo teplotám nad 40°C, pretože by mohlo dôjsť k prehriatiu súčastí chodítka a popáleniu používateľa.
9. Vždy dodržujte minimálne a maximálne povolené výšky posuvných rúrok.
10. Tašky a kabley nevešajte na rukoväte - nebezpečenstvo prevrátenia!
11. Na strmých povrchoch používajte prevádzkovú brzdu.
12. Nikdy nepoužívajte chodítko na mobilitu, keď je zložené!
13. Ak sa príliš opriete o rukoväte, chodítko sa môže nakloniť dozadu.
14. Používanie chodítka na iné účely ako na chôdzu, ako je preprava ťažkých nákladov, je nevhodné a nebezpečné.
15. Použitie na tvrdých povrchoch.
16. Nepoužívajte ako náhradu za invalidný vozík.
17. Nepoužívajte na svahovitý terén.
18. Akýkoľvek vážny incident súvisiaci s pomôckou sa musí nahlásiť výrobcovi

**⚠️ POZOR!** Nedodržanie vyššie uvedených bezpečnostných pravidiel môže viesť k vážnym nehodám.

**⚠️ POZOR!** Poradte sa so svojim lekárom alebo fyzioterapeutom, aby ste určili vhodný spôsob používania chodítka podľa vašich funkčných možností a každodenných činností.

**⚠️ POZOR!** Nižšie uvedené informácie sú odporúčaním výrobcu, ale je potrebné ich konzultovať s lekárom alebo fyzioterapeutom.

**⚠️ POZOR!** Ak je chodítko správne nastavené, používateľ by mal byť schopný udržať vzpriamený postoj s mierne pokrčenými laktami a chodítko pri chôdzi nesie časť telesnej hmotnosti.

## PRVKY CHODÍTKA A INŠTALÁCIA

Prvky chodítka sú znázornené na obr. 1.



Montáž chodítka:

1. Vyberte zo škatule všetky diely: operadlo, rukoväť s rúrkou, rám chodítka.
2. Otvorte rám chodidla. Priložte operadlo k rámu a skontrolujte, či sú viditeľné montážne otvory na ráme a operadle. Zaskrutkujte upevňovacie skrutky.
3. Vložte rukoväťe rúr do rámu a nastavte rukoväťe do vhodnej výšky. Zaskrutkujte montážne motýlinky.

### SKLADANIE A ROZKLADANIE CHODÍTKA

Rozložiť:

1. Potiahnite sedadlo nadol, kým sa rám úplne nevytiahne a nepocítite odpor.

Zložiť:

1. Zdvihnute sedadlo.
2. Zložte rám vytiahnutím sedadla nahor.

### BRZDY

1. Počas pohybu je možné brzdy aktivovať pritlačením brzdovej rukoväte k rukoväti chodítka. Každá brzda zaberá nezávisle.
2. Každá brzda sa dá zablokovať – zatlačte na brzdovú páku dole. Ak chcete uvoľniť zaseknutú brzdú, potiahnite rukoväť brzd nahor.

**⚠ POZOR!** Pred použitím chodítka skontrolujte, či brzdy správne fungujú a sú správne nastavené. Keď používateľ sedí, uistite sa, že sú zatiahnuté brzdy. Brzdový výkon môže byť ovplyvnený odieraním kolies.

### NASTAVENIE VÝŠKY RÚČKY

1. Výšku rukoväti je možné prispôbiť užívateľovi.
2. Odskrutkujte montážne spony z rámu na pravej a ľavej strane.
3. Ťahajte trubicu nahor alebo nadol, kým nedosiahnete požadovanú výšku.
4. Naskrutkujte montážne spony.


### TAŠKA

1. Maximálne zaťaženie tašky je 5 kg.

### ČISTENIE A ÚDRŽBA

1. Chodítka sa odporúča pravidelne kontrolovať, či nie je poškodené alebo čo nemá viditeľné známky opotrebovania. Pravidelne kontrolujte, či:
  - na ráme sa neobjavili žiadne praskliny ani zalomenia;
  - skrutky sú riadne utiahnuté;
  - uzamykacie tlačidlá správne zaisťujú nastavenú výšku rukoväti;
  - brzdové lanky nie sú rozstrapkané;
  - sú brzdy správne nastavené;
  - žiadne iné časti chodítka nie sú uvoľnené alebo poškodené.

**⚠ POZOR!** V prípade potreby vymeňte alebo upravte príslušné diely. V prípade potreby namažte mechanické časti.

 **POZOR!** Chodítka sa odporúča pravidelne čistiť mäkkou handričkou a mydlovou vodou. Po vyčistení treba chodítka osušiť mäkkou handričkou. Na čistenie chodítka nepoužívajte rozpúšťadlá, bielidlá ani abrazívne prostriedky. Zariadenie je možné dezinfikovať alkoholom alebo derivátmi, ale v nízkych koncentráciách.




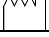






#### FARBA

Chodítka je dostupné v modrej, červenej, čiernej a šedej farbe.

#### Zoznam použitých materiálov

Rám	ocel'
Koleso	PVC (polyvinylchlorid)
Rukoväta	PVC (polyvinylchlorid)
Taška	polyester
Vidlica kolesa	PA (polyamid)
Brzdy	PA (polyamid) +20% GF (sklolaminát)

#### Vysvetlenie symbolov


	Výrobca
	Označenie CE
	Referenčné číslo
	Dátum výroby
	Pozrite si návod na použitie
	POZOR
	Sériové číslo
	Hore, neprevracat'
	Skladovať na suchom mieste
	Krehké, zaobchádzajte opatrne

#### VÝROBCA

**Reha Fund Sp. z o.o.**  
ul. Staniewicka 14  
03-310 Warszawa, Poľsko  
tel. 48 22 59 40 300  
fax. 48 22 59 40 307  
e-mail: [info@rehafund.pl](mailto:info@rehafund.pl)  
[www.rehafund.pl](http://www.rehafund.pl)

#### DOVOZCA

SANITAS – zdravotnícke pomôcky, s.r.o.  
Polárna 6  
040 12 Košice  
t.č.: 055/62 229 25  
e-mail: [sanitaske@sanitaske.sk](mailto:sanitaske@sanitaske.sk)  
[www.sanitaske.sk](http://www.sanitaske.sk)

 Verzia: 1.2  
Vydané: 07/2021

**Záručný list**  
**Chodítko štvorkolesové RF-610**

Model	Sériové číslo	Dátum predaja	Podpis a pečiatka predajcu

**ZÁRUČNÉ PODMIENKY**

1. Výrobca ubezpečuje zákazníka, že predajný predmet, na ktorý je vydaný tento záručný list, je úplne nový a vo vysokej kvalite.
2. Na chodítko sa vzťahuje záruka 24 mesiacov od dátumu predaja v záručnom liste.
3. Základom pre posúdenie reklamácie je predloženie správne vyplneného záručného listu spolu s priloženým dokladom o kúpe.
4. Prípadné závady na zariadení odstráni REHA FUND Sp. z o. alebo autorizovaným servisným technikom za predpokladu, že sa zariadenie používalo v súlade s určeným účelom a odporúčaniami v používateľskej príručke.
5. Oprava bude vykonaná čo najskôr, maximálne do 30 dní, odo dňa prevzatia zariadenia na servisnom mieste.
6. Záruka sa nevzťahuje na:
  - činnosti údržby, čistenia a nastavovania opísané v návode na použitie;
  - diely podliehajúce opotrebovaniu pri bežnom používaní;
  - mechanické a tepelné poškodenie, napr.
  - poškodenie spôsobené používaním zariadenia v rozpore s návodom na obsluhu, nedbalosťou, vykonávaním nezávislých opráv, úprav alebo konštrukčných zmien.
7. Pred vrátením zariadenia autorizovaným servisným technikom je potrebné ho vyčistiť v súlade s návodom na použitie, aby bolo vhodné na servisnú kontrolu.
8. Opravy a výmeny náhradných dielov by mali vykonávať autorizovaní servisní technici spoločnosti Reha Fund Sp. z o.
9. V prípade neoprávnenej reklamácie budú zákazníkovi účtované náklady na dopravu.
10. Územný rozsah záručnej ochrany pokrýva územie Slovenskej republiky.
11. Záruka na predávaný tovar nevyklučuje, neobmedzuje ani nepozastavuje práva zákazníka vyplývajúce z nesúladu tovaru so zmlouvou.

**ZOZNAM SERVISNÝCH OPRAV (vyplní servis)**

	Dátum nahlásenia	Objednávacie číslo	Popis závady/rozsah opravy	Dátum opravy	Pečiatka a podpis servisu
1.					
2.					