


# NÁVOD NA POUŽITIE

## MADLO SKLOPNÉ DANIEL RF-920

Katalógové číslo: RF-920  
Max. bezpečné zaťaženie: 136 kg  
Hmotnosť: 2,85 kg  
Celková dĺžka: 75 cm  
Celková výška: 23 cm

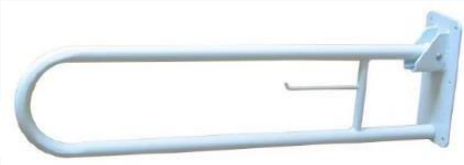

### **! POZOR!**

Pred použitím držiaka si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny.

### **POUŽITIE**

Madlo pomáha udržiavať rovnováhu a pohyb pre osoby s obmedzenou pohyblivosťou, zvyšuje bezpečnosť osôb používajúcich sociálne zariadenia a je možné ju namontovať vedľa umývadla, WC alebo iného požadovaného miesta v kúpeľni. Držiak je určený na použitie v bytoch, opatrovateľských domoch a zariadeniach obývaných osobami so zdravotným postihnutím.

### **BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ**

1. Po inštalácii držiaka sa uistite, že je bezpečne pripevnený k zemi a nehrozí, že spadne. Príliš slabé upevnenie môže spôsobiť pád a zranenie používateľa.
2. Venujte zvláštnu pozornosť tomu, aby ste pevne uchopili madlo (najmä ak je mokré) predtým, ako na madlo položíte celú váhu svojho tela. Príliš slabé uchopenie madla môže spôsobiť pád používateľa a zranenie.
3. Akýkoľvek vážny incident súvisiaci s pomôckou sa musí nahlásiť výrobcovi
4. Neprekračujte maximálne povolené zaťaženie madla.
5. Používajte iba originálne príslušenstvo. Používanie neoriginálnych dielov môže mať za následok nesprávne prispôbenie rukoväte, čo môže mať za následok riziko pádu.
6. Držiak neskladujte pri teplotách nižších ako 0°C.

### **! POZOR!**

Nedodržanie vyššie uvedených bezpečnostných pravidiel môže viesť k vážnym nehodám.

### **! POZOR!**

Poradte sa so svojím lekárom alebo fyzioterapeutom, aby ste určili vhodný spôsob použitia madla v súlade s vašimi funkčnými možnosťami a každodennými aktivitami.

### **INŠTALÁCIA**

1. Vytvárajte šesť otvorov do steny vo vhodnej polohe, zarovnajte otvor v doske a stene, potom vložte hmoždinky a skrutky dovnútra. Montážna sada je k dispozícii s madlom.
2. Utiahnite skrutky a skontrolujte, či je madlo pevne pripevnené.

### **SPÔSOB POUŽITIA**

1. Rukou pevne uchopte madlo. Dbajte na to, aby sa vám ruka nešmýkala po madle, najmä ak je rukoväť mokrá.
2. Vytiahnite madlo a vykonajte zamýšľanú činnosť
3. Pred uvoľnením madla sa uistite, že polohu možno bezpečne udržať bez podpory madla.

### **ČISTENIE A ÚDRŽBA**


- Počas používania rukoväte pravidelne kontrolujte, či sú upevňovacie kolíky uvoľnené. Ak zistíte akékoľvek uvoľnenie, skontrolujte príčinu a dotiahnite skrutky alebo ich vymeňte za nové spolu so spojovacími telesami.
- Podporu sa odporúča pravidelne čistiť mäkkou handričkou a mydlovou vodou. Po vyčistení by mala byť podpera vysušená mäkkou handričkou.

### **! POZOR!**

Na čistenie madla nepoužívajte rozpúšťadlá, bielidlá ani abrazívne prostriedky.

### **! POZOR!**

Pravidelne kontrolujte upevnenie rukoväte, aby ste sa uistili, že je bezpečná

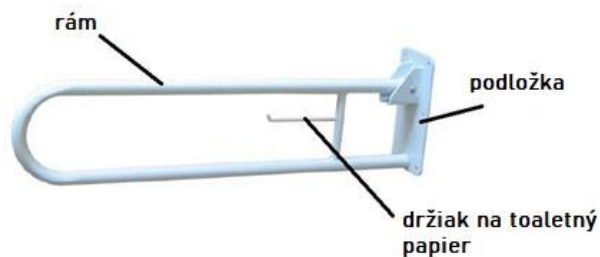

**Zoznam použitých materiálov**

Rám	železo
Držiak na toaletný papier	železo
Podložka	aluminium

**Vysvetlenie symbolov**

	Výrobca
	Označenie CE
	Referenčné číslo
	Dátum výroby
	Pozrite si návod na použitie
	Pozor
	Sériové číslo
	Hore, neprevracajte
	Skladujte na suchommi mieste
	Krehké, zaobchádzajte opatrne

VÝROBCA  
**Reha Fund Sp. z o.o.**  
 ul. Staniewicka 14  
 03-310 Warszawa, Poľsko  
 tel. 48 22 59 40 300  
 fax. 48 22 59 40 307  
 e-mail: [info@rehafund.pl](mailto:info@rehafund.pl)  
[www.rehafund.pl](http://www.rehafund.pl)

DOVOZCA  
 SANITAS – zdravotnícke pomôcky, s.r.o.  
 Polárna 6  
 040 12 Košice  
 t.č.: 055/62 229 25  
 e-mail: [sanitaske@sanitaske.sk](mailto:sanitaske@sanitaske.sk)  
[www.sanitaske.sk](http://www.sanitaske.sk)

CE Verzia: 1.2  
 Vydané: 06/2021

**ZÁRUČNÝ LIST MADLO  
SKLOPNÉ KÚPEĽŇOVÉ DANIEL RF-920**

<b>Model:</b>	<b>Sériové číslo:</b>	<b>Dátum predaja:</b>	<b>Podpis a pečiatka predávajúceho:</b>

**ZÁRUČNÉ PODMIENKY**

1. Výrobca ubezpečuje zákazníka, že predajný predmet, na ktorý je vydaný tento záručný list, je úplne nový a vo vysokej kvalite.
2. Na madlo sa vzťahuje záruka 24 mesiacov od dátumu predaja v záručnom liste.
3. Základom pre posúdenie reklamácie je predloženie správne vyplneného záručného listu spolu s priloženým dokladom o kúpe.
4. Prípadné závady na zariadení odstráni REHA FUND Sp. z o. alebo autorizovaným servisným technikom za predpokladu, že sa madlo používalo v súlade s jej účelom a odporúčaniami v používateľskej príručke.
5. Oprava bude vykonaná čo najskôr, maximálne do 30 dní, odo dňa prevzatia zariadenia na servisnom mieste.
6. Záruka sa nevzťahuje na:
  - činnosti súvisiace s údržbou, čistením a nastavovaním rukoväte popísané v návode na použitie;
  - diely podliehajúce opotrebovaniu pri bežnom používaní;
  - mechanické a tepelné poškodenie rukoväte, napr.
  - poškodenie spôsobené používaním zariadenia v rozpore s návodom na obsluhu, nedbalosťou, vykonávaním nezávislých opráv, úprav alebo konštrukčných zmien.
7. Pred odovzdaním zariadenia autorizovanému servisnému technikovi je potrebné ho vyčistiť v súlade s návodom na použitie, aby bolo vhodné na servisnú kontrolu.
8. Opravy a výmeny náhradných dielov by mali vykonávať autorizovaní servisní technici spoločnosti Reha Fund Sp. z o.
9. V prípade neoprávnenej reklamácie budú zákazníkovi účtované náklady na dopravu.
10. Územný rozsah záručnej ochrany pokrýva územie Slovenskej republiky.
11. Záruka na predávaný tovar nevyučuje, neobmedzuje ani nepozastavuje práva zákazníka vyplývajúce z nesúladu tovaru so zmluvou.

**ZOZNAM SERVISNÝCH OPRAV (vyplní servis)**

	<b>Dátum nahlásenia</b>	<b>Objednávacie číslo</b>	<b>Popis závady/rozsah opravy</b>	<b>Dátum opravy</b>	<b>Pečiatka a podpis servisu</b>
1.					
2.					

