

NÁVOD NA POUŽITIE CHODÍTKO ŠTVORKOLESOVÉ PREMIUM LIZBONA RF-620

Katalógové číslo: RF-620
Max. bezpečné zaťaženie: 136 kg
Nastavenie výšky rukoväte: 81-93 cm
Šírka v rozloženom stave: 67 cm
Celková dĺžka: 70 cm
Priemer kruhu: 20 cm
Hmotnosť: 6,9 kg
Výška sedadla: 54,5 cm
Šírka sedadla: 45 cm
Nosnosť tašky: 5 kg



⚠ POZOR! Pred použitím chodítka si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny.

POUŽITIE

Chodítko je určené na pomoc ľuďom s obmedzenou pohyblivosťou, ktorí potrebujú oporu pri vstávaní, státi a chôdzi. Umožňuje vám samostatne vykonávať väčšinu vašich každodenných fyzických aktivít. Možno použiť v interiéri aj exteriéri.

BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ

Pre vašu bezpečnosť dodržujte nasledujúce odporúčania:

1. Pred použitím chodítka sa vždy uistite, že je správne zaistené v rozloženej polohe.
2. Neprekračujte maximálne povolené zaťaženie chodítka.
3. V košíku neprevážajte predmety, ktoré výrazne prečnievajú cez jeho plochu, pretože to môže ovplyvniť stabilitu chodítka.
4. Pri používaní chodítka buďte vždy mimoriadne opatrní. Vyhnite sa všetkým potenciálnym nebezpečenstvám, ako sú nerovné alebo mäkké povrchy, prekážky v ceste, mokré podlahy atď.
5. Používajte iba originálne príslušenstvo. Používanie neoriginálnych dielov môže mať za následok nesprávne prispôsobenie chodítka, čo môže mať za následok riziko pádu.
6. Používanie chodítka v prostredí s vysokou vlhkosťou (sprcha, bazén a pod.) môže spôsobiť koróziu jeho pohyblivých častí, čo môže mať za následok poškodenie chodítka.
7. Chodítko nepoužívajte pri chôdzi po schodoch alebo eskalátoroch.
8. Chodítko neskladujte pri teplotách pod 0°C. Chodítko nevystavujte dlhodobo teplotám nad 40°C, pretože by mohlo dôjsť k prehriatiu súčastí chodítka a popáleniu používateľa.
9. Vždy dodržujte minimálne a maximálne povolené výšky posuvných rúrok.
10. Tašky a batohy nevesajte na rukičky - nebezpečenstvo prevrátenia!
11. Na strmých povrchoch používajte prevádzkovú brzdu.
12. Nikdy nepoužívajte chodítko na mobilitu, keď je zložené!
13. Ak sa príliš opriete o rukoväť, chodítko sa môže nakloniť dozadu.
14. Používanie chodítka na iné účely ako na chôdzu, ako je preprava ťažkých nákladov, je nevhodné a nebezpečné.
15. Použitie na tvrdých povrchoch.
16. Nepoužívajte ako náhradu za invalidný vozík.
17. Nepoužívajte na svahovitý terén.
18. Akýkoľvek vážny incident súvisiaci s pomôckou sa musí nahlásiť výrobcovi.

⚠ POZOR! Nedodržanie vyššie uvedených bezpečnostných pravidiel môže viesť k vážnym nehodám.

⚠ POZOR! Poradte sa so svojím lekárom alebo fyzioterapeutom, aby ste určili vhodný spôsob používania chodítka podľa vašich funkčných možností a každodenných činností.

⚠ POZOR! Nižšie uvedené informácie sú odporúčaním výrobcu, ale je potrebné ich konzultovať s lekárom alebo fyzioterapeutom.

⚠ POZOR! Ak je chodítko správne nastavené, používateľ by mal byť schopný udržať vzpriamený postoj s mierne pokrčenými laktami a chodítko pri chôdzi nesie časť telesnej hmotnosti.

PRVKY CHODNÍKA

Prvky chodítka sú znázornené na obr.1.



SKLADANIE A ROZKLADANIE CHODÍTKA

Rozkladanie:


1. Potiahnite rukoväť smerom von a potom súčasne uchopte dve sedlové trubky.
2. Ťahajte rúrky nadol, kým nepocítite odpor a nebudete počuť kliknutie.

Skladanie:

1. Potiahnite rukoväť na sedadle nahor.
2. Voliteľne môžete vybrať vrečko z tuby.

BRZDY

1. Počas pohybu je možné brzdy aktivovať pritlačením brzdovej rukoväte k rukoväti chodítka. Každá brzda zaberá nezávisle.
2. Každá brzda sa dá zablokovat' – zatlačte na brzdovú páku dole. Ak chcete uvoľniť zaseknutú brzdú, potiahnite rukoväť brzdou nahor.

 **POZOR!** Pred použitím chodítka skontrolujte, či brzdy správne fungujú a sú správne nastavené.

NASTAVENIE VÝŠKY RÚČKY

Výšku rukoväti je možné prispôbiť užívateľovi.


1. Stlačte uzamykacie tlačidlá na pravej a ľavej strane rámu.
2. Ťahajte trubicu smerom nahor, kým nedosiahnete požadovanú výšku.
3. Uzamykacie tlačidlá zapadnú automaticky.

TAŠKA

Taška je namontovaná na rúrke v blízkosti sedadla chodítka. Taška je vyrobená z nepremokavého materiálu. Taška je odnímateľná, čo uľahčuje prepravu a čistenie.

INŠTALÁCIA

1. Vyberte všetky diely z krabice (obr. 2).
2. Nainštalujte predné koleso na prednú časť rámu a utiahnite krídlovú skrutku (obr. 3).
3. Namontujte zadné koleso pomocou zaisťovacieho tlačidla (obr. 4).
4. Vyklapte sedadlo (obr. 5).
5. Nainštalujte rúrky s držadlami a nastavte ich do vhodnej výšky (obr. 6).
6. Zaveste tašku na rám (obr. 7).

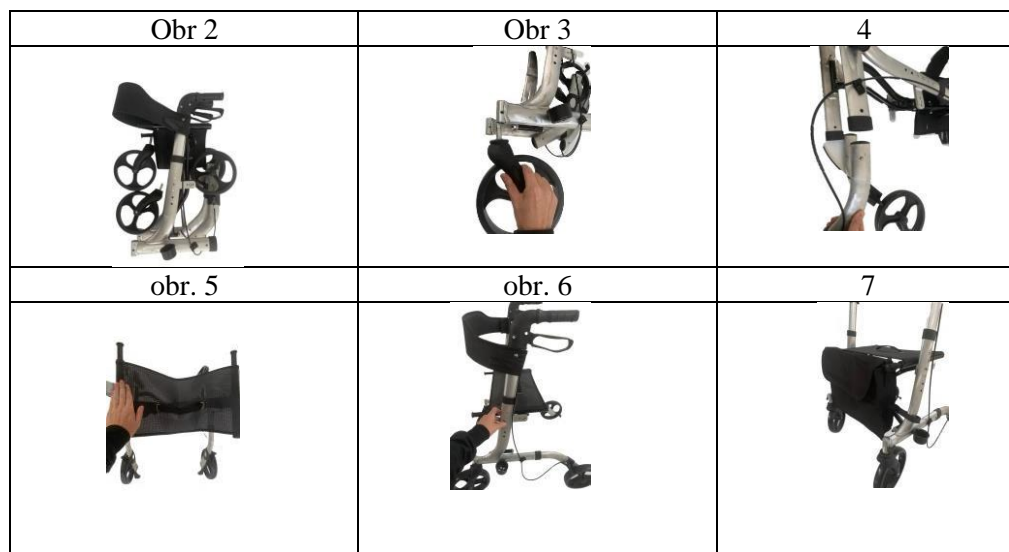

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Chodítka sa odporúča pravidelne kontrolovať, či nie je poškodené alebo viditeľné známky opotrebovania. Pravidelne kontrolujte, či:

- na ráme sa neobjavili žiadne praskliny ani zalomenia;
- skrutky sú riadne utiahnuté;
- uzamykacie tlačidlá správne zaisťujú nastavenú výšku rúkaví;
- brzdové lanká nie sú rozstrapkané;
- sú brzdy správne nastavené;
- žiadne iné časti chodítka nie sú uvoľnené alebo poškodené.

POZOR! V prípade potreby vymeňte alebo upravte príslušné diely. V prípade potreby namažte mechanické časti.

! POZOR! Chodítka sa odporúča pravidelne čistiť mäkkou handričkou a mydlovou vodou. Po vyčistení treba chodítka osušiť mäkkou handričkou. Na čistenie chodítka nepoužívajte rozpúšťadlá, bieliná ani abrazívne prostriedky. Zariadenie je možné dezinfikovať alkoholom alebo derivátmi, ale v nízkych koncentráciách. abrazíva.

Zoznam použitých materiálov

Rám	aluminium
Kolesá	PP (polypropylen) + PVC (polyvinylchlorid)
Rúkaväť	PVC (polyvinylchlorid)
Taška	Nylon
Predná vdlica	PA (polyamid)
Brzdy	PA (polyamid) +20% GF (skllaminát)

Vysvetlenie symbolov

	Výrobca
	Označenie CE
	Referenčné číslo
	Dátum výroby
	Pozrite si návod na použitie
	POZOR
	Sériové číslo
	Hore, neprevracat'
	Skladovať na suchom mieste
	Krehké, zaobchádzajte opatrne

VÝROBCA

Reha Fund Sp. z o.o.

ul. Staniewicka 14

03-310 Warszawa, Poľsko

tel. 48 22 59 40 300

fax. 48 22 59 40 307

e-mail: info@rehafund.pl

www.rehafund.pl

DOVOZCA

SANITAS – zdravotnicke pomôcky, s.r.o.

Polárna 6

040 12 Košice

t.č.: 055/62 229 25

e-mail: sanitaske@sanitaske.sk

www.sanitaske.sk

CE Verzia: 1.2

Vydané: 11/2021

Záručný list
Chodítko štvorkolesové LIZBONA PREMIUM RF-620

Model:	Sériové číslo:	Dátum predaja:	Podpis a pečiatka predajcu:

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

1. Výrobca ubezpečuje zákazníka, že predajný predmet, na ktorý je vydaný tento záručný list, je úplne nový a vo vysokej kvalite.
2. Na chodítko sa vzťahuje záruka 24 mesiacov od dátumu predaja v záručnom liste.
3. Základom pre posúdenie reklamácie je predloženie správne vyplneného záručného listu spolu s priloženým dokladom o kúpe.
4. Prípadné závady na zariadení odstráni REHA FUND Sp. z o. alebo autorizovaným servisným technikom za predpokladu, že sa zariadenie používalo v súlade s určeným účelom a odporúčaniami v používateľskej príručke.
5. Oprava bude vykonaná čo najskôr, maximálne do 30 dní, odo dňa prevzatia zariadenia na servisnom mieste.
6. Záruka sa nevzťahuje na:
 - činnosti údržby, čistenia a nastavovania opísané v návode na použitie;
 - diely podliehajúce opotrebovaniu pri bežnom používaní;
 - mechanické a tepelné poškodenie, napr.
 - poškodenie spôsobené používaním zariadenia v rozpore s návodom na obsluhu, nedbalosťou, vykonávaním nezávislých opráv, úprav alebo konštrukčných zmien.
7. Pred vrátením zariadenia autorizovaným servisným technikom je potrebné ho vyčistiť v súlade s návodom na použitie, aby bolo vhodné na servisnú kontrolu.
8. Opravy a výmeny náhradných dielov by mali vykonávať autorizovaní servisní technici spoločnosti Reha Fund Sp. z o.
9. V prípade neoprávnenej reklamácie budú zákazníkovi účtované náklady na dopravu a reklamáciu.
10. Územný rozsah záručnej ochrany pokrýva územie Slovenskej republiky.
11. Záruka na predávaný tovar nevylučuje, neobmedzuje ani nepozastavuje práva zákazníka vyplývajúce z nesúladu tovaru so zmluvou.

ZOZNAM SERVISNÝCH OPRAV (vyplní servis)

	Dátum nahlásenia	Objednávacie číslo	Popis závady/rozsah opravy	Dátum opravy	Pečiatka a podpis servisu
1.					
2.					