


NÁVOD NA POUŽITIE
BAZÉN NA UMÝVANIE HLAVY RF-960
BAZÉN NA UMÝVANIE HLAVY SO SPRCHOU RF-961

PRODUKT	Shampoo Basin	Shampoo Basin with Water Bag	
Rozmery po nafúknutí	53 cm (dĺžka) x 61 cm (šírka) x 20 cm (výška)	53 cm (dĺžka) x 61 cm (šírka) x 20 cm (výška)	
Rozmery po zložení a vyprázdnení	22 cm (dĺžka) x 25 cm (šírka) x 4 cm (výška)	22 cm (dĺžka) x 25 cm (šírka) x 4 cm (výška)	
Dĺžka odtokovej hadice	118 cm	118 cm	

POZOR!

Pred prvým použitím misky si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny.

POZOR!

Obrázky použité v návode slúžia len na ilustračné účely! Špecifikačné údaje zobrazené na obrázkoch a nachádzajúce sa v konečnom výrobku sa môžu líšiť.

ÚČEL

Určené pre osoby pripútané na lôžko alebo imobilné osoby.

OBSAH

1. Miska na šampón s pripojenou vypúšťacou hadicou.
2. Vrečko na vodu so sprchovacou rukoväťou a klipom (len pre verziu so sprchou).
3. Plastová hadička a šnúrka na lepšie držanie a zavesenie vodného vaku (len pre verziu so sprchou).
4. Opravná sada.
5. Pumpa.

	
Miska na umývanie vlasov	Sprcha

VLASTNOSTI

1. 20 cm hlboká umývací miska so šampónovou hlavicou s dvojitými rúrkami pre robustnosť a pohodlie.
2. Je vybavená vypúšťacou zátkou s hadicou na jednoduché vypúšťanie znečistenej vody počas používania alebo po použití.
3. Samostatné vrečko na vodu na jednoduchú prepravu vody tam, kde nemusí byť vhodne dostupný zdroj vody. Je tiež vybavená sprchovacou hlavicou a nastaviteľnou sponou na jednoduché ovládanie prietoku vody (len pre verziu so sprchou).

MONTÁŽ

1. Napustite umývaciu misku hlavy pomocou vzduchovej pumpy .

POZOR!


Vzduchový ventil má vo vnútri jednosmerný ventil, ktorý zabraňuje úniku vzduchu. Ak chcete misku nafúknuť, stlačte vzduchový ventil za hrdlo, aby ste pomohli otvoriť jednosmerný ventil vo vnútri.

2. Misku umiestnite na rovný a polotuhý povrch, aby sa lepšie využívala.
3. Umiestnite odtokovú hadicu do vedra na vodu. Vedro nie je súčasťou súpravy.

POZOR!

Vedro na vodu musí byť umiestnené nižšie než šampónová misa, aby špinavá voda stekala smerom nadol.

4. Odpojte vypúšťaciu zátku, aby ste mohli vodu počas používania vypúšťať.

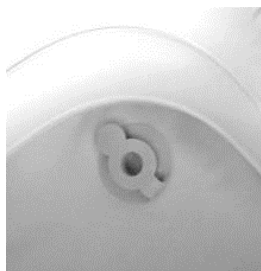

Vypúšťacia zátku

5. Umiestnite misku pod krk pacienta, v prípade potreby ju upravte pre väčšie pohodlie.



Zmontovaná súprava

ZOZNAM POUŽITÝCH MATERIÁLOV

Výrobok je vyrobený z PVC (polyvinylchlorid) s hrúbkou 0,35 mm.

Verzia 1 05/2023

VÝROBCA

Reha Fund Sp. z o.o.
ul. Staniewicka 14
03-310 Warszawa, Poľsko
tel. 48 22 59 40 300
fax. 48 22 59 40 307
e-mail: info@rehafund.pl
www.rehafund.pl

DOVOZCA

SANITAS – zdravotnícke pomôcky, s.r.o.
Polárna 6
040 12 Košice
t.č.: 055/62 229 25
e-mail: sanitaske@sanitaske.sk
www.sanitaske.sk

ZÁRUČNÝ LIST
BAZÉN NA UMÝVANIE HLAVY RF-960
BAZÉN NA UMÝVANIE HLAVY SO SPRCHOU RF-961

Model:	Sériové číslo:	Dátum predaja	Podpis a pečiatka predajcu:

PODMIENKY ZÁRUKY

- (1) Výrobca zaručuje zákazníkovi, že predaný predmet, na ktorý je vystavený tento záručný list, je úplne nový a kvalitný.
- (2) Na bazén sa vzťahuje záručná doba 24 mesiacov od dátumu predaja v záručnom liste.
- (3) Podkladom pre posúdenie záručnej reklamácie je doručenie správne vyplneného záručného listu s priloženým dokladom o kúpe.
- (4) Prípadné závady zariadenia budú odstránené spoločnosťou REHA FUND Sp. z o.o. alebo autorizovanými servisnými technikmi za predpokladu, že misa bola používaná v súlade s jej účelom a odporúčaniami v návode na použitie.
- (5) Oprava bude vykonaná v čo najkratšom možnom čase, najneskôr do 30 dní, odo dňa prijatia zariadenia v servisnom stredisku.
- (6) Záruka sa nevzťahuje na:
 - údržbu, čistiace operácie opísané v návode na použitie;
 - diely podliehajúce opotrebovaniu počas bežného používania, napr. gumové diely, plastové lišty atď.
 - mechanické a tepelné poškodenie, napr. praskliny, rezy atď.;
 - poškodenia spôsobené používaním zariadenia v rozpore s návodom na použitie, nedbalosťou, vykonávaním samostatných opráv, úprav alebo konštrukčných zmien. Poškodenia spôsobené používaním zariadenia v rozpore s návodom na použitie.
- (7) Pred odovzdaním zariadenia autorizovanému servisnému stredisku na servis je potrebné zariadenie vyčistiť v súlade s návodom na použitie.
- (8) Opravy a výmenu náhradných dielov by mali vykonávať autorizovaní servisní technici spoločnosti Reha Fund s.r.o.
- (9) V prípade neopodstatnenej reklamácie budú zákazníkovi účtované náklady na dopravu.
- (10) Územný rozsah záručnej ochrany sa vzťahuje na územie Slovenskej republiky.
- (11) Záruka na predaný tovar nevyklučuje, neobmedzuje ani nepozastavuje práva zákazníka vyplývajúce z nesúladu tovaru so zmluvou.

ZOZNAM SERVISNÝCH OPRAV (vyplní servis)

	Dátum podania žiadosti	Objednávka č.	Popis závady/rozsah opravy	Dátum vykonania opravy	Pečiatka a podpis servisu
1.					
2.					