

NÁVOD NA POUŽITIE NEOPRÉNOVÝ STABILIZÁTOR NA ZÁPÄSTIE O-1721



⚠️ POZOR! Pred prvým použitím produktu si prečítajte tento dokument.

I. POPIS PRODUKTU


Neoprénový stabilizátor zápästia s lakt'ovou opierkou "LIGAMAX PALM" je vyrobený z prémiového neoprénu. Vďaka otvorenému dizajnu umožňuje dokonalé prispôsobenie stabilizátora končatine. Suché zipsy umožňujú nastaviť úroveň stabilizácie bez obmedzenia voľnosti pohybu.

II. VLASTNOSTI

Stabilizátor tesne prilieha k zápästiu a poskytuje vynikajúce spevnenie kĺbov. Udržiava primeranú telesnú teplotu, zlepšuje krvný obeh, čím výrazne znižuje opuchy a pocit stuhnutosti kĺbu a zmierňuje bolesť. Mierne stabilizuje zápästie, čím poskytuje úľavu.

III. AKO POUŽIŤ

- Uistite sa, že veľkosť produktu je vhodná,
- Pred nasadením uvoľnite všetky suché zipsy a nechajte ich voľné,
- Vložte palec do otvoru v ortéze
- Omotajte si zápästie v naznačenom smere a zapnite suchý zips

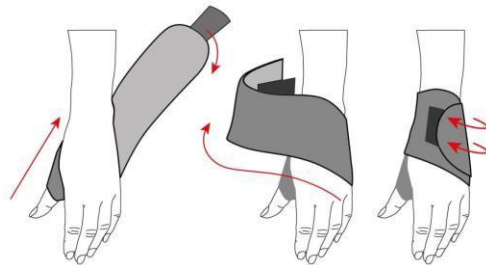

IV. TABUĽKA VEĽKOSTI

Univerzálna veľkosť na obvod zápästia do 23 cm

V. ZLOŽENIE

100% neoprén

VI. PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA

- Tento produkt sa môže používať len podľa pokynov lekára,
- Spôsob nasadenia ortézy by mal predviesť kvalifikovaný zdravotnícky personál v prítomnosti osoby, ktorá sa o používateľa stará (ak je to potrebné),
- Výrobok a jeho súčasti by sa mali používať iba na určený účel,
- Produkt sa má aplikovať priamo na telo,
- Výrobok by sa mal udržiavať v čistote v súlade s odporúčaniami uvedenými v tomto návode a na štítku umiestnenom na výrobku. Nesprávne čistenie a údržba produktu môže viesť k kožným léziám,

VII. APLIKÁCIA

Produkt je možné použiť:

- Preventívne počas rehabilitácie, po úrazoch zápästného kĺbu,
- Preventívne pri športe a pri intenzívnom cvičení,
- Pri preťaženi, degeneratívnych a zápalových zmenách,
- Nestabilita metakarpálneho kĺbu

VIII. KONTRAINDIKÁCIE


















- Ak dôjde k kožným zmenám v miestach priľnutia ortézy, jej použitie je obmedzené a možné len pod dohľadom lekára,
- Je potrebné, aby ošetrojúci lekár posúdil používanie ortézy u osôb s poruchami pamäti rôzneho pôvodu, osôb s duševnými poruchami a detí.

IX. ČISTENIE A ÚDRŽBA

Výrobok sa odporúča pravidelne umývať. Pred praním zatvorte všetky suché zipsy na ortéze.

- Prať ručne pri teplote do 30°C vo vode s neutrálnym, antialergickým pracím prostriedkom,
- Opláchnite vo vlažnej vode, nepoužívajte aviváže,
- Nebieliť,
- Nežehliť,
- Nečistite na sucho,
- Nie v sušičke,
- Sušte na plochu na tienenom a vetranom mieste – nevystavujte výrobok priamemu slnečnému žiareniu.

Vysvetlenie symbolov

	Výrobca
	Označenie CE
	Referenčné číslo
	Dátum výroby
	Pozrite si návod na použitie
	POZOR
	Sériové číslo
	Hore, neprevracat'
	Skladujte na suchom mieste
	Krehké, zaobchádzajte opatrne
	Nestrihajte
	Obal je recyklovateľný
	Ručné pranie
	Nebieliť
	Nežehliť
	Chemicky nečistiť
	Nesušiť v sušičke

VÝROBCA
Reha Fund Sp. z o.o.
ul. Staniewicka 14
03-310 Warszawa, Poľsko
tel. 48 22 59 40 300
fax. 48 22 59 40 307
e-mail: info@rehafund.pl
www.rehafund.pl

DOVOZCA
SANITAS – zdravotnícke pomôcky, s.r.o.
Polárna 6
040 12 Košice
t.č.: 055/62 229 25
e-mail: sanitaske@sanitaske.sk
www.sanitaske.sk

© Verzia: 1.1
Vydané:

Záručný list
NEOPRÉNOVÝ STABILIZÁTOR NA ZÁPÄSTIE O-1721

Model:	Sériové číslo:	Dátum predaja	Podpis a pečiatka predajcu:

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

1. Výrobca ubezpečuje zákazníka, že predajný predmet, na ktorý je vydaný tento záručný list, je úplne nový a vo vysokej kvalite.
2. Na výrobok sa vzťahuje záruka 24 mesiacov od dátumu predaja v záručnom liste.
3. Základom pre posúdenie reklamácie je predloženie správne vyplneného záručného listu spolu s priloženým dokladom o kúpe.
4. Prípadné závady na zariadení odstráni REHA FUND Sp. z o. alebo autorizovaným servisným technikom, za predpokladu, že výrobok bol používaný v súlade s určeným účelom a odporúčaniami v používateľskej príručke.
5. Oprava/výmena bude vykonaná čo najskôr, maximálne však do 30 dní od dátumu prevzatia zariadenia na servisnom mieste.
6. Záruka sa nevzťahuje na:
 - činnosti súvisiace s údržbou, čistením a nastavovaním remeňa popísané v návode na použitie;
 - diely podliehajúce opotrebovaniu pri bežnom používaní;
 - mechanické a tepelné poškodenie remeňa, napr.
 - poškodenie spôsobené používaním zariadenia v rozpore s návodom na obsluhu, nedbalosťou, vykonávaním nezávislých opráv, úprav alebo konštrukčných zmien.
7. Pred vrátením zariadenia autorizovaným servisným technikom je potrebné ho vyčistiť v súlade s návodom na použitie, aby bolo vhodné na servisnú kontrolu.
8. Opravy a výmeny by mali vykonávať autorizovaní servisní technici spoločnosti Reha Fund Sp. z o.
9. V prípade neoprávnenej reklamácie budú zákazníkovi účtované náklady na dopravu.
10. Územný rozsah záručnej ochrany pokrýva územie Slovenskej republiky.
11. Záruka na predávaný tovar nevylučuje, neobmedzuje ani nepozastavuje práva zákazníka vyplývajúce z nesúladu tovaru so zmluvou.

ZOZNAM SERVISNÝCH OPRAV (vyplní servis)

	Dátum nahlásenia	Objednávacie číslo	Popis závady/rozsah opravy	Dátum opravy	Pečiatka a podpis servisu
1.					
2.					