

NÁVOD NA POUŽITIE MADLO KOVOVÉ CEZAR RF-911

Pred použitím madla si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny.



Model	RF 910/20	RF-910/30	RF 910/40	RF 910/50	RF 910/60	RF 910/70	RF 910/80	RF 910/90	RF 910/100
Dĺžka rukoväte	20 cm	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm
Priemer trubice	3,2 cm	3,2 cm	3,2 cm	3,2 cm	3,2 cm	3,2 cm	3,2 cm	3,2 cm	3,2 cm
Vzdialenosť od steny k vonkajšej stene rukoväte	11 cm	11 cm	11 cm	11 cm	11 cm	11 cm	11 cm	11 cm	11 cm
Farba	biely	biely	biely	biely	biely	biely	biely	biely	biely
Maximálna hmotnosť užívateľa	135 kg	135 kg	135 kg	135 kg	135 kg	135 kg	135 kg	135 kg	135 kg
Hmotnosť	0,35 kg	0,40 kg	0,55 kg	0,7 kg	0,85 kg	1 kg	1,15 kg	1,3 kg	1,45 kg

POUŽITIE

Madlo pomáha udržiavať rovnováhu a pohyb osobám s obmedzenou pohyblivosťou, zvyšuje bezpečnosť osôb používajúcich sociálne zariadenia a je vhodná na inštaláciu do kúpeľne a WC. Madlo je určené na použitie v bytoch, opatrovateľských domoch a zariadeniach obývaných osobami so zdravotným postihnutím. Produkt sa používa hlavne na prevenciu pádov.

BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ

- Po nainštalovaní madla sa uistite, že je dobre pripevnené k stene a nehrozí ich pád. Ak sú madlá pripevnené príliš slabo, hrozí nebezpečenstvo pádu a poranenia užívateľa.
- Je zakázané inštalovať konzoly na slabé steny, napr. sadrokartónové dosky, pretože počas používania môže dôjsť k zrúteniu steny a následkom toho môže dôjsť k vážnemu zraneniu užívateľa.
- Venujte zvláštnu pozornosť tomu, aby ste pevne uchopili madlo (najmä ak je mokré) predtým, ako na madlo položíte celú váhu svojho tela. Príliš slabé uchopenie madla môže spôsobiť pád užívateľa a zranenie.
- Ľudia alergickí na oceľ nemôžu výrobok používať.
- Neinštalujte toto zariadenie bez toho, aby ste si najprv prečítali a neporozumeli tomuto návodu. Ak týmto varovaniam a pokynom nerozumiете, pred pokusom o inštaláciu tohto zariadenia sa obráťte na svojho zdravotníckeho pracovníka, predajcu alebo technický personál so žiadosťou o pomoc, inak môže dôjsť k zraneniu.
- Madlá zvyšujú bezpečnosť v kúpeľniach a toaletách, ak sú pripevnené podľa návodu. Umiestnenie, veľkosť a uhol rukoväte by mal určiť kvalifikovaný odborník, aby bola zaistená optimálna bezpečnosť a funkčnosť.
- Buďte opatrní na mokrych povrchoch vane alebo podlahy.
- Používatelia s obmedzenými fyzickými schopnosťami by mali byť pod dohľadom alebo pomocou pomoci v kúpeľniach a toaletách, a to aj pri použití madiel.
- Madlo môže poskytnúť oporu a zvýšenú stabilitu až do 135 kg. Madlá nie sú navrhnuté tak, aby uniesli celkovú hmotnosť osoby. Madlo používajte iba na podporu.
- Madlo možno použiť len na účel, na ktoré je určený. Nepoužívajte ho na viazanie predmetov, vešanie predmetov naň ani na pripevňovanie predmetov. To môže mať vážny negatívny vplyv na jeho výkon a bezpečnosť.
- Akýkoľvek vážny incident súvisiaci s pomôckou sa musí nahlásiť výrobcovi.
- Madlo sa má používať iba ako pomôcka na vyváženie a nie ako nosné zariadenie.

POZOR!


Nedodržanie vyššie uvedených bezpečnostných pravidiel môže viesť k vážnym nehodám.

POZOR!

Poradte sa so svojím lekárom alebo fyzioterapeutom, aby ste určili vhodný spôsob použitia madla v súlade s vašimi funkčnými možnosťami a každodennými aktivitami.

INŠTALÁCIA

1. Pripravte si montážnu súpravu (obr.1).
2. Vyvrtajte otvory pre spojovacie telesá s priemerom zodpovedajúcim priemeru spojovacieho telesa, ktorých usporiadanie v stene bude zodpovedať usporiadaniu otvorov v základni držiaka. Hĺbka otvoru v podklade by sa mala rovnať hĺbke zapustenia konektora zvýšenej o 10 mm (obr. 2).
3. Vyčistite otvor od prachu.
4. Vložte spojovacie teleso do vyvrtaných otvorov (obr. 3).
5. Medzi základňu a rukoväť umiestnite plastové podložky (obr. 3).
6. Oceľové skrutky zaskrutkujte do spínacích telies po celej dĺžke. Pre skrutky, ktoré sú súčasťou rukoväte, použite základňu z plnej keramickej a silikónovej tehly alebo obyčajného betónu. Uistite sa, že otvor v spoji nevypadne. Neodporúča sa inštalovať držiak na podložku zo sadrokartónu.
7. Na hlavy oceľových skrutiek nasadte ukončovacie hmoždinky (obr. 4)

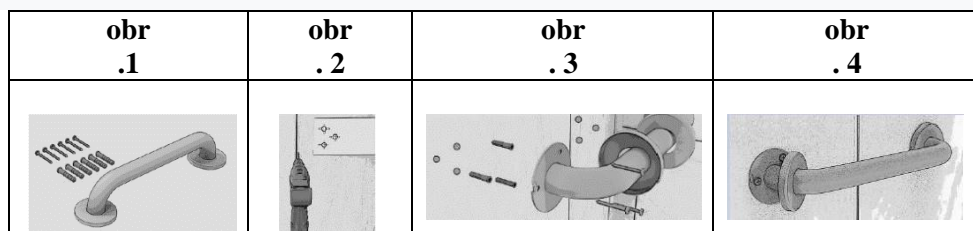

SPÔSOB POUŽITIA

1. Rukou pevne uchopte madlo. Dbajte na to, aby sa vám ruka nešmýkala po madle, najmä ak je madlo mokré.
2. Uchopte madlo a vykonajte zamýšľanú činnosť
3. Pred uvoľnením madla sa uistite, že vašu polohu možno bezpečne udržať bez podpory madla.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Počas používania madla pravidelne kontrolujte, či nie sú upevňovacie kolíky uvoľnené. Ak zistíte akékoľvek uvoľnenie, skontrolujte príčinu a dotiahnite skrutky alebo ich vymeňte za nové spolu so spojovacími telesami.
- Ak rameno madla samovoľne spadne zo zvislej polohy, utiahnite upevňovaciu skrutku.
- Madlo by sa malo pravidelne kontrolovať a udržiavať a mali by sa odstrániť všetky viditeľné poškodenia alebo znaky nesprávneho používania.
- Udržujte madlo v čistote. Tento výrobok by ste mali pravidelne čistiť bežnými čistiacimi prostriedkami na kúpeľňu. Po vyčistení madla vždy opláchnite vodou a potom dôkladne utrite vlhkou handričkou, aby ste odstránili zvyšky čistiaceho materiálu. Nepoužívajte silné alebo koncentrované kyslé, alkalické alebo iné čistiace prostriedky, pretože môžu odfarbiť alebo poškodiť produkt.
- Ak je potrebná dezinfekcia, mali by sa použiť štandardné postupy dezinfekcie zariadenia.
- Madlo sa dodáva zabalené, aby zostal produkt neznečistený až do inštalácie. Obal je recyklovateľný a mal by byť zlikvidovaný v súlade s miestnymi predpismi.
 - Po každom nastavení, oprave alebo servise sa pred opätovným použitím uistite, že sú všetky upevňovacie prvky bezpečne utiahnuté.
- Uistite sa, že sú madlá nainštalované správne a bezpečne. Nikdy nepoužívajte madlo, ak spozorujete akúkoľvek vôľu.

⚠ POZOR!

Na čistenie madla nepoužívajte rozpúšťadlá, bieliadlá ani abrazívne prostriedky.











⚠ POZOR!

Pravidelne kontrolujte upevnenie madla, aby ste sa uistili, že je bezpečné.

ZOZNAM POUŽITÝCH MATERIÁLOV

Rukoväť je vyrobená z ocele - 100%.

Vysvetlenie symbolov

	Výrobca
	Označenie CE
	Referenčné číslo
	Dátum výroby
	Pozrite si návod na použitie
	Pozor
	Sériové číslo
	Hore, neprevracajte
	Skladujte na suchom mieste
	Krehké, zaobchádzajte opatrne

VÝROBCA

Reha Fund Sp. z o.o.

ul. Staniewicka 14

03-310 Warszawa, Poľsko

tel. 48 22 59 40 300

fax. 48 22 59 40 307

e-mail: info@rehafund.pl

www.rehafund.pl

DOVOZCA

SANITAS – zdravotnícke pomôcky, s.r.o.

Polárna 6

040 12 Košice

t.č.: 055/62 229 25

e-mail: sanitaske@sanitaske.sk

www.sanitaske.sk

CE Verzia: 1.2

Vydané: 08/2021

ZÁRUČNÝ LIST
MADLO KOVOVÉ CEZAR RF-911

Model:	Sériové číslo:	Dátum predaja:	Podpis a pečiatka predávajúceho:

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

1. Výrobca ubezpečuje zákazníka, že predajný predmet, na ktorý je vydaný tento záručný list, je úplne nový a vo vysokej kvalite.
2. Na madlo sa vzťahuje záruka 24 mesiacov od dátumu predaja v záručnom liste.
3. Základom pre posúdenie reklamácie je predloženie správne vyplneného záručného listu spolu s priloženým dokladom o kúpe.
4. Prípadné závady na zariadení odstráni REHA FUND Sp. z o. alebo autorizovaným servisným technikom za predpokladu, že sa madlo používalo v súlade s jej účelom a odporúčaniami v návode na použitie.
5. Oprava bude vykonaná čo najskôr, maximálne do 30 dní, odo dňa prevzatia zariadenia na servisnom mieste.
6. Záruka sa nevzťahuje na:
 - činnosti súvisiace s údržbou, čistením a nastavovaním rukoväte popísané v návode na použitie;
 - diely podliehajúce opotrebovaniu pri bežnom používaní;
 - mechanické a tepelné poškodenie rukoväte, napr.
 - poškodenie spôsobené používaním zariadenia v rozpore s návodom na obsluhu, nedbalosťou, vykonávaním nezávislých opráv, úprav alebo konštrukčných zmien.
7. Pred odovzdaním zariadenia autorizovanému servisnému technikovi je potrebné ho vyčistiť v súlade s návodom na použitie, aby bolo vhodné na servisnú kontrolu.
8. Opravy a výmeny náhradných dielov by mali vykonávať autorizovaní servisní technici spoločnosti Reha Fund Sp. z o.
9. V prípade neoprávnenej reklamácie budú zákazníkovi účtované náklady na dopravu.
10. Územný rozsah záručnej ochrany pokrýva územie Slovenskej republiky.
11. Záruka na predávaný tovar nevyučuje, neobmedzuje ani nepozastavuje práva zákazníka vyplývajúce z nesúladu tovaru so zmluvou.

ZOZNAM SERVISNÝCH OPRAV (vyplní servis)

	Dátum nahlásenia	Objednávacie číslo	Popis závady/rozsah opravy	Dátum opravy	Pečiatka a podpis servisu
1.					
2.					