

**NÁVOD NA POUŽITIE**  
**VAŇOVÝ STOLČEK A SCHOD 2V1 JOHN RF-823**



<b>Katalógové číslo</b>	<b>RF-823</b>
<b>Max. Bezpečné zaťaženie</b>	120 kg
<b>Hmotnosť</b>	1,3 kg
<b>Nastavenie výšky sedadla</b>	20,5-26,5 cm
<b>Šírka sedadla</b>	41 cm
<b>Hrúbka sedadla</b>	3,3 cm
<b>Farba sedadla</b>	biely

**POZOR!**

Pred použitím produktu si pozorne prečítajte nižšie uvedené pokyny.

**POUŽITIE**

Vaňový schodík/stolička umožňuje ľuďom s obmedzenou pohyblivosťou každodennú osobnú hygienu pri zachovaní značnej nezávislosti. Vďaka tejto výbave sa výrazne znižuje riziko pádu alebo iných zranení, ktoré môžu vo vani nastať. Stupienok uľahčuje používanie vane, pomáha pri každodennej hygiene a zvyšuje bezpečnosť. Stupienok uľahčuje ľuďom s obmedzenou pohyblivosťou vstup a výstup z vane. Môže slúžiť aj ako stabilná opora pri kúpaní vo vani.

**BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ**

Pre vašu bezpečnosť dodržujte nasledujúce odporúčania:

1. Pred použitím stoličky/schodík sa uistite, že:
  - výška sedadla je správne nastavená,
  - uzamykacie tlačidlá fungujú správne,
  - gumené čiapky sú v dobrom stave,
  - všetky nohy sú nastavené v rovnakej výške.
2. Používajte iba originálne príslušenstvo. Použitie neoriginálnych dielov môže viesť k nesprávnemu nastaveniu stoličky/schodíka, čo môže mať za následok riziko pádu.
3. Neprekračujte maximálne povolené zaťaženie stupienka/stoličky.
4. Neskladujte pri teplotách pod 0°C.
5. Akýkoľvek vážny incident súvisiaci s pomôckou sa musí nahlásiť výrobcovi.

**POZOR!**

Nedodržanie vyššie uvedených bezpečnostných pravidiel môže viesť k vážnym nehodám.



**VÝŠKOVÉ NASTAVENIE**

1. Stlačte bezpečnostné tlačidlo na nohe stoličky/stupienka a jemne ním otáčajte, ako je znázornené na obrázku nižšie.
2. Nastavte vhodnú výšku.
3. Nasmerujte tlačidlo na príslušný otvor, aby ste zaistili prítlačnú pätku v požadovanej výške.
4. Opakujte vyššie uvedené kroky na každej prítlačnej pätky a uistite sa, že sú všetky prítlačné pätky nastavené v rovnakej výške.

**POZOR!**

Uistite sa, že sú všetky nožičky správne zaistené a nastavené na rovnakú výšku.

## SEDENIE A VSTAVANIE; VSTUP A ODCHOD Z VANE

	<b>Funkcia: vaňová stolička</b>	<b>Funkcia: schodík do vane</b>
1.	Uistite sa, že stolička/schodík je stabilný a pripravený na použitie	Uistite sa, že stolička /schodík je stabilný a pripravený na použitie
2.	Postavte sa chrbtom k stoličke tak, aby sa predná časť dotýkala zadnej časti vašich kolien	Vykročte na stoličku/schodík
3.	Natiahnite ruky za seba a oprite sa rukami o sedadlo	Opatrne vložte prvú nohu do vane
4.	Pomaly si sadnite na stoličku, ohnite lakty a ak je to možné tak aj kolena a boky	Opatrne presuňte druhú nohu do vane
5.	Ak chcete vstať zo stoličky, položte ruky na sedadlo a zdvihnite sa	Pre funkciu schodov do vane: Vstúpte do vane. Vystupovanie z vane je opakom vstupu do vane.

## ČISTENIE A ÚDRŽBA

1. Odporúča sa pravidelne kontrolovať stoličku/schodík, či nie je poškodená alebo či nie sú viditeľné známky opotrebovania. Pravidelne kontrolujte, či:

- na ráme nie sú žiadne praskliny ani zalomenia,
- uzamykacie tlačidlo správne zaisťuje nastavenú výšku,
- otvory v rúrkach nie sú zväčšené alebo predĺžené,
- spodné kryty nie sú opotrebované – ak áno, mali by byť vymenené,
- žiadne iné časti stoličky/schodíka nie sú uvoľnené alebo poškodené.

2. Stoličku/schodík sa odporúča pravidelne čistiť mäkkou handričkou a mydlovou vodou. Po vyčistení treba stoličku/schodík osušiť mäkkou handričkou.

## POZOR!

Na čistenie stoličky/schodíka nepoužívajte rozpúšťadlá, bielidlá ani abrazívne prostriedky.

## KOMPONENTY PRODUKTU













## SPÔSOB INŠTALÁCIE

1. Položte sedadlo na tvrdý povrch plochou stranou nadol.
2. Umiestnite konštrukciu nohovej časti nôh na sedadlo a zarovnajte otvory pre skrutky s otvormi sedadla.
3. Umiestnite kovové podložky na montážne skrutky a vložte ich do otvorov pre nohy a sedadlo. Otáčajte skrutkami, kým nezapadnú.

## ZOZNAM POUŽITÝCH MATERIÁLOV

Rám	aluminium
Sedadlo	PE (polyetylen)
Násadka	TPR (termoplastická guma)

## Vysvetlenie symbolov

	Výrobca
	Označenie CE
	Referenčné číslo
	Dátum výroby
	Pozrite si návod na použitie
	Pozor
	Sériové číslo
	Hore, neprevracajte
	Skladujte na suchommi mieste
	Krehké, zaobchádzajte opatrne

### VÝROBCA

**Reha Fund Sp. z o.o.**

ul. Staniewicka 14

03-310 Warszawa, Poľsko

tel. 48 22 59 40 300

fax. 48 22 59 40 307

e-mail: [info@rehafund.pl](mailto:info@rehafund.pl)

[www.rehafund.pl](http://www.rehafund.pl)

### DOVOZCA

SANITAS – zdravotnicke pomôcky, s.r.o.

Polárna 6

040 12 Košice

t.č.: 055/62 229 25

e-mail: [sanitaske@sanitaske.sk](mailto:sanitaske@sanitaske.sk)

[www.sanitaske.sk](http://www.sanitaske.sk)

CE Verzia: 1.2

Vydané: 07/2021

**Záručný list**  
**Vaňový stolček a schod 2v1 JOHN RF-823**

**ZÁRUČNÉ PODMIENKY**

1. Výrobca ubezpečuje zákazníka, že predajný predmet, na ktorý je vydaný tento záručný list, je úplne nový a vo vysokej kvalite.
2. Na stoličku/schodík sa vzťahuje záruka 24 mesiacov od dátumu predaja v záručnom liste.
3. Základom pre posúdenie reklamácie je predloženie správne vyplneného záručného listu spolu s priloženým dokladom o kúpe.
4. Prípadné závady na zariadení odstráni REHA FUND Sp. z o. alebo autorizovaným servisným technikom, za predpokladu, že stolička/schodík bola používaná v súlade s jej určeným účelom a odporúčaniami v návode na použitie.
5. Oprava bude vykonaná čo najskôr, maximálne do 30 dní, odo dňa prevzatia zariadenia na servisnom mieste.
6. Záruka sa nevzťahuje na:
  - činnosti údržby, čistenia a nastavovania opísané v návode na použitie;
  - diely podliehajúce opotrebovaniu pri bežnom používaní;
  - mechanické a tepelné poškodenie, napr.
  - poškodenie spôsobené používaním zariadenia v rozpore s návodom na obsluhu, nedbalosťou, vykonávaním nezávislých opráv, úprav alebo konštrukčných zmien.
7. Pred odovzdaním zariadenia autorizovanému servisnému technikovi je potrebné ho vyčistiť v súlade s návodom na použitie, aby bolo vhodné na servisnú kontrolu.
8. Opravy a výmeny náhradných dielov by mali vykonávať autorizovaní servisní technici spoločnosti Reha Fund Sp. z o.
9. V prípade neoprávnenej reklamácie budú zákazníkovi účtované náklady na dopravu.
10. Územný rozsah záručnej ochrany pokrýva územie Slovenskej republiky.
11. Záruka na predávaný tovar nevylučuje, neobmedzuje ani nepozastavuje práva zákazníka vyplývajúce z nesúladu tovaru so zmlouvou.

**ZOZNAM SERVISNÝCH OPRAV (vyplní servis)**

	Dátum nahlásenia	Objednávacie číslo	Popis závady/rozsah opravy	Dátum opravy	Pečiatka a podpis servisu
1.					
2.					