

NÁVOD NA POUŽITIE CHODÍTKO ŠTVORKOLESOVÉ PREMIUM RF-615

Katalógové číslo: RF-615
Max. bezpečné zaťaženie: 136 kg
Nastavenie výšky rukoväte: 82-93 cm
Šírka v rozloženom stave: 61 cm
Šírka v zloženom stave: 23 cm
Celková dĺžka: 69 cm
Priemer kruhu: 15 cm
Hrúbka plášt'a kolesa: 4,4 cm
Priemer trubky rámu: 2,5 cm
Hrúbka rámovej trubky: 1,4 mm
Hmotnosť: 7,5 kg



⚠ POZOR! Pred použitím chodítka si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny.

POUŽITIE

Chodítka je určené na pomoc ľuďom s obmedzenou pohyblivosťou, ktorí potrebujú oporu pri vstávaní, státi a chôdzi. Umožňuje vám samostatne vykonávať väčšinu vašich každodenných fyzických aktivít. Možno použiť v interiéri aj exteriéri.

BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ

Pre vašu bezpečnosť dodržujte nasledujúce odporúčania:

1. Pred použitím chodítka sa vždy uistite, že je správne zaistené v rozloženej polohe.
2. Neprekračujte maximálne povolené zaťaženie chodítka.
3. V košíku neprevážajte predmety, ktoré výrazne prečnievajú cez jeho plochu, pretože to môže ovplyvniť stabilitu chodítka.
4. Pri používaní chodítka buďte vždy mimoriadne opatrní. Vyhnite sa všetkým potenciálnym nebezpečenstvám, ako sú nerovné alebo mäkké povrchy, prekážky v ceste, mokré podlahy atď.
5. Používajte iba originálne príslušenstvo. Používanie neoriginálnych dielov môže mať za následok nesprávne prispôsobenie chodítka, čo môže mať za následok riziko pádu.
6. Používanie chodítka v prostredí s vysokou vlhkosťou (sprcha, bazén a pod.) môže spôsobiť koróziu jeho pohyblivých častí, čo môže mať za následok poškodenie chodítka.
7. Chodítka nepoužívajte pri chôdzi po schodoch alebo eskalátoroch.
8. Chodítka neskladujte pri teplotách pod 0°C. Chodítka nevystavujte dlhodobo teplotám nad 40°C, pretože by mohlo dôjsť k prehriatiu súčastí chodítka a popáleniu používateľa.
9. Vždy dodržujte minimálne a maximálne povolené výšky posuvných rúrok.
10. Tašky a batohy nevesajte na rukoväť - nebezpečenstvo prevrátenia!
11. Na strmých povrchoch používajte prevádzkovú brzdu.
12. Nikdy nepoužívajte chodítka na mobilitu, keď je zložené!
13. Ak sa príliš opriete o rukoväť, chodítka sa môže nakloniť dozadu.
14. Používanie chodítka na iné účely ako na chôdzu, ako je preprava ťažkých nákladov, je nevhodné a nebezpečné.
15. Použitie na tvrdých povrchoch.
16. Nepoužívajte ako náhradu za invalidný vozík.
17. Nepoužívajte na svahovitý terén.
18. Akýkoľvek vážny incident súvisiaci s pomôckou sa musí nahlásiť výrobcovi.

⚠ POZOR! Nedodržanie vyššie uvedených bezpečnostných pravidiel môže viesť k vážnym nehodám.

⚠ POZOR! Poradte sa so svojím lekárom alebo fyzioterapeutom, aby ste určili vhodný spôsob používania chodítka podľa vašich funkčných možností a každodenných činností.

⚠ POZOR! Nižšie uvedené informácie sú odporúčaním výrobcu, ale je potrebné ich konzultovať s lekárom alebo fyzioterapeutom.

⚠ POZOR! Ak je chodítka správne nastavené, používateľ by mal byť schopný udržať vzpriamený postoj s mierne pokrčenými laktami a chodítka pri chôdzi nesie časť telesnej hmotnosti.

PRVKY CHODÍKA A INŠTALÁCIA

Prvky chodítka sú znázornené na obr. 1.



Montáž chodítka:

1. Vyberte zo škatule všetky diely: operadlo, rukoväť s rúrkou, rám chodítka a košík.
2. Otvorte rám chodidla. Priložte operadlo k rámu a skontrolujte, či sú viditeľné montážne otvory na ráme a operadle. Zaskrutkujte upevňovacie skrutky.
3. Vložte rukoväťe rúr do rámu a nastavte rukoväťe do vhodnej výšky. Zaskrutkujte montážne motýlinky.

SKLADANIE A ROZKLADANIE CHODÍTKA

Rozloženie chodítka:

1. Potiahnite sedadlo nadol, kým sa rám úplne nevytiahne a nepocítite odpor.
2. Nainštalujte kôš a zakryte ho sedadlom.

Zloženie chodítka:

1. Zdvihnite sedadlo a vyberte kôš.
2. Zložte rám vytiahnutím sedadla nahor.

BRZDY

1. Počas pohybu je možné brzdy aktivovať pritlačením brzdovej rukoväte k rukoväti chodítka. Každá brzda zaberá nezávisle.
2. Každá z brzd sa dá zablokovať – za týmto účelom zatlačte rukoväť brzdy nadol. Ak chcete uvoľniť zaseknutú brzdú, potiahnite rukoväť brzdy nahor.

⚠ POZOR! Pred použitím chodítka skontrolujte, či brzdy správne fungujú a sú správne nastavené. Keď používateľ sedí, uistite sa, že sú zatahnuté brzdy. Brzdový výkon môže byť ovplyvnený odieraním kolies.

NASTAVENIE VÝŠKY RÚČKY

1. Výšku rukoväti je možné prispôbiť užívateľovi.
2. Odskrutkujte montážne spony z rámu na pravej a ľavej strane.
3. Ťahajte trubicu nahor alebo nadol, kým nedosiahnete požadovanú výšku.
4. Naskrutkujte montážne spony.

KOŠÍK


1. Kôš je možné namontovať do stredu rámu a na prednú časť rámu. Košík je odnímateľný, čo uľahčuje prepravu a čistenie. Maximálne zaťaženie košíka je 5 kg.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

1. Chodítko sa odporúča pravidelne kontrolovať, či nie je poškodené alebo či nemá viditeľné známky opotrebovania. Pravidelne kontrolujte, či:

- na ráme sa neobjavili žiadne praskliny ani zalomenia;
- skrutky sú riadne utiahnuté;
- uzamykacie tlačidlá správne zaisťujú nastavenú výšku rukovätí;
- brzdové lanká nie sú rozstrapkané;
- sú brzdy správne nastavené;
- žiadne iné časti chodítka nie sú uvoľnené alebo poškodené.







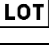



 **POZOR!** V prípade potreby vymeňte alebo upravte príslušné diely. V prípade potreby namažte mechanické časti.

 **POZOR!** Chodítko sa odporúča pravidelne čistiť mäkkou handričkou a mydlovou vodou. Po vyčistení treba chodítko osušiť mäkkou handričkou. Na čistenie chodítka nepoužívajte rozpúšťadlá, bielidlá ani abrazívne prostriedky. Zariadenie je možné dezinfikovať alkoholom alebo derivátmi, ale v nízkych koncentráciách.

Zoznam použitých materiálov

Rám	aluminium
Kolesá	PVC (polyvinylchlorid) + PP (polypropylén)
Rukoväť	PVC (polyvinylchlorid)
Košík	ocel'
Predná vidlica	PP (polypropylén)
Brzdy	PP (polypropylén) + aluminium + ocel'

Vysvetlenie symbolov

	Výrobca	
	Označenie CE	
	Referenčné číslo	
	Dátum výroby	
	Pozrite si návod na použitie	
	POZOR	
	Sériové číslo	
	Hore, neprevracajte	
	Skladovať na suchom mieste	
	Krehké, zaobchádzajte opatrne	

VÝROBCA

Reha Fund Sp. z o.o.

ul. Staniewicka 14

03-310 Warszawa, Poľsko

tel. 48 22 59 40 300

fax. 48 22 59 40 307

e-mail: info@rehafund.pl

www.rehafund.pl

DOVOZCA

SANITAS – zdravotnícke pomôcky, s.r.o.

Polárna 6

040 12 Košice

t.č.: 055/62 229 25

e-mail: sanitaske@sanitaske.sk

www.sanitaske.sk

CE Verzia: 1.3

Vydané: 02/2021

Záručný list
Chodítko štvorkolesové RF-615

Model:	Sériové číslo:	Dátum predaja:	Podpis a pečiatka predajcu:

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

1. Výrobca ubezpečuje zákazníka, že predajný predmet, na ktorý je vydaný tento záručný list, je úplne nový a vo vysokej kvalite.
2. Na chodítko sa vzťahuje záruka 24 mesiacov od dátumu predaja v záručnom liste.
3. Základom pre posúdenie reklamácie je predloženie správne vyplneného záručného listu spolu s priloženým dokladom o kúpe.
4. Prípadné závady na zariadení odstráni REHA FUND Sp. z o. alebo autorizovaný servisný technik za predpokladu, že sa zariadenie používalo v súlade s určeným účelom a odporúčaniami v návode na použitie.
5. Oprava bude vykonaná čo najskôr, maximálne do 30 dní, odo dňa prevzatia zariadenia na servisnom mieste.
6. Záruka sa nevzťahuje na:
 - činnosti údržby, čistenia a nastavovania opísané v návode na použitie;
 - diely podliehajúce opotrebovaniu pri bežnom používaní;
 - mechanické a tepelné poškodenie
 - poškodenie spôsobené používaním zariadenia v rozpore s návodom na použitie, nedbalosťou, vykonávaním nezávislých opráv, úprav alebo konštrukčných zmien.
7. Pred vrátením zariadenia autorizovaným servisným technikom je potrebné ho vyčistiť v súlade s návodom na použitie, aby bolo vhodné na servisnú kontrolu.
8. Opravy a výmeny náhradných dielov by mali vykonávať autorizovaní servisní technici spoločnosti Reha Fund Sp. z o.
9. V prípade neoprávnenej reklamácie budú zákazníkovi účtované náklady na dopravu a reklamáciu
10. Územný rozsah záručnej ochrany pokrýva územie Slovenskej republiky.
11. Záruka na predávaný tovar nevylučuje, neobmedzuje ani nepozastavuje práva zákazníka vyplývajúce z nesúladu tovaru so zmluvou.

ZOZNAM SERVISNÝCH OPRAV (vyplní servis)

	Dátum nahlásenia	Objednávacie číslo	Popis závady/rozsah opravy	Dátum opravy	Pečiatka a podpis servisu
1.					
2.					