

NÁVOD NA POUŽITIE
SPRCHOVACIA STOLIČKA S NOSNOSŤOU DO 136KG RF-822

MODEL		
Číslo katalógové	RF-822	RF-822
Číslo SKU	RF-822/N	RF-822/B
Max. bezpečné zaťaženie	136 kg	136 kg

Hmotnosť produktu:	2,5 kg	2,5 kg
Regulácia výšky sedadla	40-57,5 cm	40-57,5 cm
Priemer sedadla	32 cm	32 cm
Farba sedadla	modrý	biely

! POZOR! Pred použitím stoličky si pozorne prečítajte nižšie uvedené pokyny.



POUŽITIE

Stolička do sprchy umožňuje ľuďom s obmedzenou pohyblivosťou každodennú osobnú hygienu pri zachovaní značnej nezávislosti. Vďaka tejto výbave sa výrazne znižuje riziko pádu alebo iných zranení, ku ktorým môže dôjsť v sprche.

BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ


Pre vašu bezpečnosť dodržujte nasledujúce odporúčania:

1. Pred použitím stoličky sa uistite, že:
 - a. výška sedadla je správne nastavená;
 - b. uzamykacie tlačidlá fungujú správne;
 - c. gumené čiapky sú v dobrom stave;
 - d. všetky prítlačné pätky sú nastavené v rovnakej výške.
2. Používajte iba originálne príslušenstvo. Používanie neoriginálnych dielov môže mať za následok nesprávne prispôbenie stoličky, čo môže mať za následok riziko pádu.
3. Neprekračujte maximálne povolené zaťaženie taburetu.
4. Neskladujte pri teplotách pod 0°C.
5. Pred použitím sa uistite, že nožné rúrky sú v rovnakej výške.
6. Nepokúšajte sa posunúť stoličku nahor alebo nadol zo svahu pomocou vody, ľadu alebo oleja.
7. Stolička sa musí používať na rovnom povrchu.
8. Akýkoľvek vážny incident súvisiaci s pomôckou sa musí nahlásiť výrobcovi.

! POZOR! Nedodržanie vyššie uvedených bezpečnostných pravidiel môže viesť k vážnym nehodám.

VÝŠKOVÉ NASTAVENIE

1. Stlačte bezpečnostné tlačidlo na nohe stoličky a jemne ním otáčajte, ako je znázornené na obrázku nižšie.
2. Nastavte vhodnú výšku.
3. Nasmerujte tlačidlo na príslušný otvor, aby ste zaistili prítlačnú pätku v požadovanej výške.
4. Opakujte vyššie uvedené kroky na každej prítlačnej pätky a uistite sa, že sú všetky prítlačné pätky nastavené výške

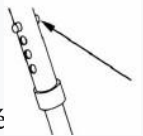

! POZOR! Uistite sa, že sú všetky nožičky správne zaistené a nastavené na rovnakú výšku.

SEDENIE A VSTAVANIE

1. Uistite sa, že stolička je stabilná a pripravená na použitie.
2. Postavte sa chrbtom k stoličke tak, aby sa vaše kolená dotýkali prednej časti stoličky.
3. Natiahnite ruky za seba a položte ich na sedadlo.
4. Pomaly sa posaďte na stoličku, pokrčte lakty a ak je to možné, kolená a boky.
5. Ak chcete vstať zo stoličky, položte ruky na sedadlo a vytlačte sa.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

1. Odporúča sa pravidelne kontrolovať stoličku, či nie je poškodená a či nemá viditeľné známky opotrebovania. Pravidelne kontrolujte, či:
 - na ráme sa neobjavili žiadne praskliny ani zalomenia;
 - uzamykacie tlačidlo správne zaisťuje nastavenú výšku;

- otvory v rúrach nie sú zväčšené alebo predĺžené;
 - spodné kryty nie sú opotrebované – ak áno, mali by byť vymenené;
 - žiadne iné časti sprchovacieho kresla nie sú uvoľnené alebo poškodené.
2. Stoličku sa odporúča pravidelne čistiť mäkkou handričkou a mydlovou vodou. Po vyčistení treba stoličku osušiť mäkkou handričkou.

! **POZOR!** Na čistenie stolice nepoužívajte rozpúšťadlá, bielidlá ani abrazívne prostriedky.

KOMPONENTY PRODUKTU



Vyššie uvedená fotografia je len ilustračná.

SPÔSOB INŠTALÁCIE











1. Položte operadlo na tvrdý povrch plochou stranou nadol (A). Otočte tiež jednu zo štruktúr hornej časti nohy (B) a zarovnajte otvory pre skrutky s otvormi sedadla (A).
2. Umiestnite druhú konštrukciu hornej časti nôh (B) na predchádzajúcu v tvare kríža a zarovnajte otvory pre skrutky s otvormi sedadla (A).
3. Umiestnite kovové podložky (C) na upevňovacie skrutky (D) a vložte ich do otvorov pre nohy a sedadlo (A). Otáčajte skrutkami, kým nezapadnú.
4. Umiestnite spodné časti nôh (E) na konce kríža. Uistite sa, že každý zámok nôh je správne zaistený.
5. Nastavte sedadlo sprchy do správnej polohy. Inštalácia je teraz dokončená.

A, B	C, D	E	Zmontovaný produkt

Zoznam použitých materiálov

Rám	aluminium
Sedadlo	PP (polypropylen)
Násadka	guma
Skrutka	Nehrdzavejúca oceľ

Vysvetlenie symbolov

	Výrobca
	Označenie CE
	Referenčné číslo
	Dátum výroby
	Pozrite si návod na použitie
	Pozor
	Sériové číslo
	Hore, neprevracajte
	Skladujte na suchom mieste
	Krehké, zaobchádzajte opatrne

VÝROBCA

Reha Fund Sp. z o.o.

ul. Staniewicka 14

03-310 Warszawa, Poľsko

tel. 48 22 59 40 300

fax. 48 22 59 40 307

e-mail: info@rehafund.pl

www.rehafund.pl

DOVOZCA

SANITAS – zdravotnícke pomôcky, s.r.o.

Polárna 6

040 12 Košice

t.č.: 055/62 229 25

e-mail: sanitaske@sanitaske.sk

www.sanitaske.sk

CE Verzia: 1.3

Vydané: 07/2022

Záručný list
Sprchovacia stolička s nosnosťou do 136 kg RF-822

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

1. Výrobca ubezpečuje zákazníka, že predajný predmet, na ktorý je vydaný tento záručný list, je úplne nový a vo vysokej kvalite.
2. Na sprchovaciu stoličku sa vzťahuje záruka 24 mesiacov od dátumu predaja v záručnom liste.
3. Základom pre posúdenie reklamácie je predloženie správne vyplneného záručného listu spolu s priloženým dokladom o kúpe.
4. Prípadné závady na zariadení odstráni REHA FUND Sp. z o. alebo autorizovaným servisným technikom za predpokladu, že stolička bola používaná v súlade s jej určeným účelom a odporúčaniami v používateľskej príručke.
5. Oprava bude vykonaná čo najskôr, maximálne do 30 dní, odo dňa prevzatia zariadenia na servisnom mieste.
6. Záruka sa nevzťahuje na:
 - činnosti údržby, čistenia a nastavovania opísané v návode na použitie;
 - diely podliehajúce opotrebovaniu pri bežnom používaní;
 - mechanické a tepelné poškodenie invalidného vozíka, napr.
 - poškodenie spôsobené používaním zariadenia v rozpore s návodom na obsluhu, nedbalosťou, vykonávaním nezávislých opráv, úprav alebo konštrukčných zmien.
7. Pred odovzdaním zariadenia autorizovanému servisnému technikovi je potrebné ho vyčistiť v súlade s návodom na použitie, aby bolo vhodné na servisnú kontrolu.
8. Opravy a výmeny náhradných dielov by mali vykonávať autorizovaní servisní technici spoločnosti Reha Fund Sp. z o.
9. V prípade neoprávnenej reklamácie budú zákazníkovi účtované náklady na dopravu.
10. Územný rozsah záručnej ochrany pokrýva územie Slovenskej republiky.
11. Záruka na predávaný tovar nevyklučuje, neobmedzuje ani nepozastavuje práva zákazníka vyplývajúce z nesúladu tovaru so zmluvou.

ZOZNAM SERVISNÝCH OPRAV (vyplní servis)

	Dátum nahlásenia	Objednávacie číslo	Popis závady/rozsah opravy	Dátum opravy	Pečiatka a podpis servisu
1.					
2.					