

NÁVOD NA POUŽITIE CHODÍTKO RF-131

POZOR! Pred použitím chodúľka si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny.

ÚČEL

Chodúľka je určená pre staršie a zdravotne postihnuté osoby s poruchami pohybového aparátu alebo s problémami so státím. Môže sa používať v interiéri aj exteriéri. Pomáha pri každodenných činnostiach, napr. pri vstávaní z postele, chôdzi, používaní toalety, prechádzkach.



MODEL	RF-131/S	RF-131/BR	RF-131/N
Obj. č.	RF-131	RF-131	RF-131
Výška	77-95 cm / 79-97 cm	77-95 cm / 79-97 cm	77-95 cm / 79-97 cm
Celková šírka (bez koliesok/s kolieskami)	57 cm / 60 cm	57 cm / 60 cm	57 cm / 60 cm
Celková dĺžka (bez koliesok/s kolieskami)	46 cm / 49 cm	46 cm / 49 cm	46 cm / 49 cm
Priemer predných kolies (bez kolies / s kolesami)	neaktuálne / 5	neaktuálne / 5	neaktuálne / 5
Maximálne bezpečné zaťaženie (bez kolies / s kolesami)	100 kg / 100 kg	100 kg / 100 kg	100 kg / 100 kg
Hmotnosť (bez kolies / s kolesami)	2,4 kg / 2,75 kg	2,4 kg / 2,75 kg	2,4 kg / 2,75 kg

PRAVIDLÁ BEZPEČNÉHO POUŽÍVANIA

V záujme vašej bezpečnosti dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné opatrenia:

1. Pred každým použitím chodítka skontrolujte, či:
 - chodítko je nastavená na správnu výšku;
 - či je uzamykací mechanizmus a tlačidlá na nastavenie výšky správne zaistené;
 - sú všetky nožičky nastavené v rovnakej výške; ak nie, nastavte ich.
2. Neprekračujte maximálne povolené zaťaženie chodítka.
3. Pri používaní chodítka vždy dbajte na zvýšenú opatrnosť. Vyhnite sa všetkým potenciálnym nebezpečenstvám, ako sú nerovný alebo mäkký povrch, prekážky v ceste, mokrá podlaha atď.
4. Používajte iba originálne príslušenstvo. Použitie neoriginálnych dielov môže spôsobiť nevhodné prispôbenie chodítka, čo môže mať za následok riziko pádu.
5. Chodítko neskladujte pri teplotách nižších ako 0 °C.
6. Každú závažnú udalosť súvisiacu so zariadením nahláste výrobcovi .

POZOR!!!

Nedodržanie vyššie uvedených bezpečnostných opatrení môže viesť k vážnym nehodám.

POZOR!!!

Výber vhodného chodítka a príslušenstva a spôsob používania konzultujte so svojim lekárom alebo fyzioterapeutom podľa svojich funkčných schopností a každodenných činností.

POZNÁMKA:

Nasledujúce údaje sú odporúčaním výrobcu, ale mali by ste ich konzultovať so svojim lekárom alebo fyzioterapeutom.

POZNÁMKA: Ak je chodítko správne nastavené, používateľ by mal byť schopný udržať vzpriamený postoj s mierne ohnutými lakt'ovými kĺbmi. Hmotnosť tela potom pri chôdzi preberá balančný rám.


SKLADANIE A ROZKLADANIE CHODÍTKA

Ak chcete chodítko rozložiť:

1. Položte chodítko pred seba a oprite ju o predné nohy.
2. Nakloňte oba bočné rámy chodítka, kým sa tlačidlo C-sklopky v strede priečného rámu nezaistí na mieste (obr. 1).

Ak chcete chodítko zložiť:

1. Stlačte tlačidlo v strede priečného rámu (obr. 1). Tým sa uvoľní blokovací mechanizmus.
2. Počas držania tlačidla sklopte oba bočné rámy dovnútra.

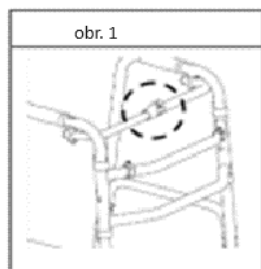

FUNGOVANIE

Chodítko pomáha udržiavať stabilitu pri pohybe a umožňuje, aby mal používateľ neustále oporu. Vďaka inovatívnym riešeniam ho možno používať ako chodítko: krokovacie, pevné alebo s prednými kolieskami.

NASTAVENIE PRÍSLUŠNEJ FUNKCIE CHÔDZE

KROKOVANIE

Ak chcete chodítko nastaviť na funkciu krokovacej chôdze, nastavte blokovacie tlačidlo na hornom otvore na bočnom ráme (obr. 2).

PEVNÉ

Ak chcete nastaviť chodítko na funkciu pevného chodítka, nastavte blokovacie tlačidlo na spodnom otvore na bočnom ráme (obr. 3).


MOBILNÁ – S PEVNÝMI KOLIESKAMI

Ak chcete nastaviť chodítko na mobilnú funkciu, nasadzte kolieska na miesto predných gumených násadcov (obr. 4):

- a) Stlačte bezpečnostné tlačidlo c-clip, jemne pootočte nožičky a vytiahnite ich z rámu chodítka.
- b) Stlačte bezpečnostné tlačidlo na kolieskovej pätky, nasuňte nožičku na rám chodúľky tak, aby aretačné tlačidlo zapadlo do otvoru.
- c) Nastavte výšku, ktorá vám vyhovuje (pozri nastavenie výšky).

NASTAVENIE VÝŠKY

1. Stlačte blokovacie tlačidlo (obr. 5) na nožičke a jemne ňou otočte.
2. Nastavte nožičku do správnej výšky.
3. Namierte tlačidlo na požadovaný otvor, aby sa nožička uzamkla v požadovanej výške.
4. Zopakujte vyššie uvedené kroky na každej nožičke a uistite sa, že všetky sú v rovnakej výške.

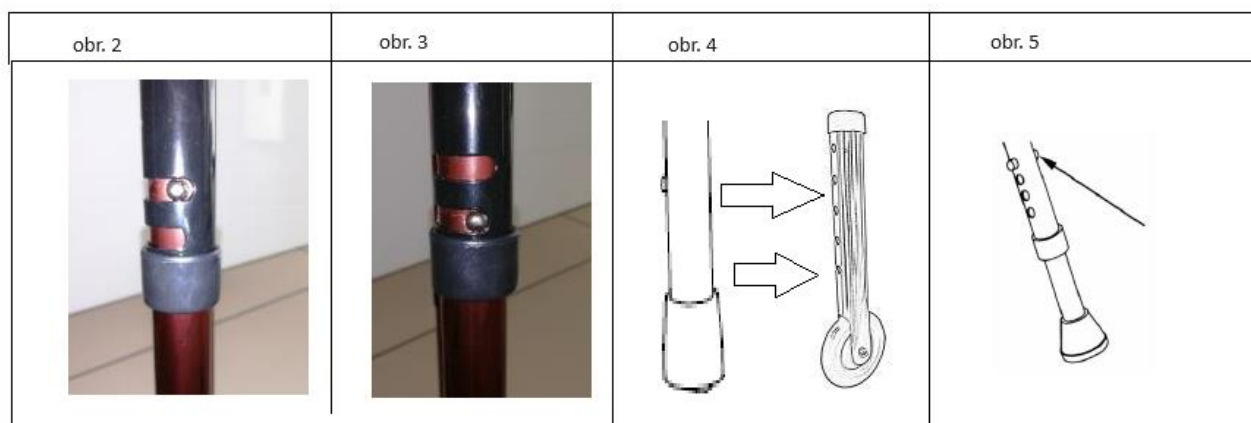

ČASTI CHODÍTKA



ČISTENIE A ÚDRŽBA

1. Odporúča sa chodítko pravidelne kontrolovať, či nie je poškodené alebo nemá viditeľné známky opotrebovania. Pravidelne kontrolujte, či:

- sa na ráme neobjavili praskliny alebo prehnutie;
- blokovacie tlačidlo správne zabezpečuje nastavenú výšku;
- otvory v rúrkach nie sú zväčšené alebo predĺžené,
- spodné krytky nie sú opotrebované - ak sú, vymeňte ich;
- žiadne iné časti chodítka nie sú uvoľnené alebo poškodené.

2. Odporúča sa chodítko pravidelne čistiť mäkkou handričkou a mydlovou vodou. Chodítko po vyčistení treba vysušiť mäkkou handričkou.











POZOR!!! Na čistenie chodítka nepoužívajte rozpúšťadlá, bieliná ani abrazívne prostriedky.

POZOR! Ak máte akékoľvek pochybnosti o vhodnosti zariadenia na používanie, kontaktujte servisné oddelenie výrobcu.

ZOZNAM POUŽITÝCH MATERIÁLOV

Rám	hliník
Rukoväť	pena
Kolesá	PVC (polyvinylchlorid)
Násadec	TPR (termoplastická guma)
Uzamykacie tlačidlo	ocel'

VYSVETLENIE SYMBOLOV

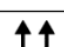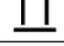	Výrobca
	Označenie CE
	Referenčné číslo
	Dátum výroby
	Pozri návod na použitie
	Upozornenie
	Číslo šarže
	Vrchná časť, neprevracat'
	Skladujte na suchom mieste
	Krehký, manipulujte s ním opatrne

VÝROBCA

Reha Fund Sp. z o.o.
ul. Staniewicka 14
03-310 Warszawa, Poľsko
tel. 48 22 59 40 300
fax. 48 22 59 40 307
e-mail: info@rehafund.pl
www.rehafund.pl

DOVOZCA

SANITAS – zdravotnícke pomôcky, s.r.o.
Polárna 6
040 12 Košice
t.č.: 055/62 229 25
e-mail: sanitaske@sanitaske.sk
www.sanitaske.sk

**ZÁRUČNÝ LIST
CHODÍTKO RF-131**

Model:	Sériové číslo:	Dátum predaja:	Podpis a pečiatka predávajúceho:

PODMIENKY ZÁRUKY

- (1) Výrobca ubezpečuje zákazníka, že predmet, na ktorý je vystavený tento záručný list, je úplne nový a kvalitný.
- (2) Na chodítko sa vzťahuje záručná doba 24 mesiacov od dátumu predaja v záručnom liste.
- (3) Podkladom na posúdenie reklamácie je doručenie správne vyplneného záručného listu s priloženým dokladom o kúpe.
- (4) Prípadné závady zariadenia budú odstránené spoločnosťou REHA FUND Sp. z o.o. alebo autorizovanými servisnými technikmi za predpokladu, že zariadenie bolo používané v súlade s jeho určením a návodom na použitie.
- (5) Oprava bude vykonaná v čo najkratšom možnom čase, najneskôr do 30 dní, odo dňa prijatia zariadenia v servisnom stredisku.
- (6) Záruka sa nevzťahuje na:
 - úkony údržby, čistenia a nastavenia opísané v návode na použitie;
 - diely podliehajúce opotrebovaniu počas bežného používania;
 - mechanické a tepelné poškodenie, napr. ohnutie, poškrabanie, zlomenie atď.
 - poškodenia spôsobené používaním zariadenia v rozpore s návodom na použitie, nedbalosťou, vykonávaním samostatných opráv, úprav alebo konštrukčných zmien.
- (7) Pred odovzdaním zariadenia do autorizovaného servisného strediska na servis treba zariadenie vyčistiť v súlade s návodom na použitie.
- (8) Opravy a výmenu náhradných dielov by mali vykonávať autorizovaní servisní technici spoločnosti Reha Fund s.r.o.
- (9) V prípade neopodstatnenej reklamácie budú zákazníkovi účtované náklady na dopravu.
- (10) Územný rozsah záručnej ochrany sa vzťahuje na územie Slovenskej republiky.
- (11) Záruka na predaný tovar nevyklučuje, neobmedzuje ani nepozastavuje práva zákazníka vyplývajúce z nesúladu tovaru so zmluvou.

ZOZNAM SERVISNÝCH OPRÁV (vyplní servis)

	Dátum podania žiadosti	Číslo objednávky	Popis závady/rozsah opravy	Dátum opravy	Pečiatka a podpis servisného strediska
1.					
2.					