

# NÁVOD NA POUŽITIE REHABILITAČNÝ VALČEK AD-7

Unni

## STANDARD 100

### ROZMER

- $\phi$ 10x40cm      $\phi$  13x60cm      $\phi$ 20x100 cm
- $\phi$ 10x50cm      $\phi$ 15x50cm      $\phi$  30x100 cm
- $\phi$ 13x40cm      $\phi$ 15x60cm      $\phi$ 40x100 cm
- $\phi$ 13x50cm      $\phi$  20x60cm      $\phi$ 50x100 cm

Určený na použitie pri rehabilitáciách a fyzioterapiách, korekčnej gymnastike alebo pri masážach na rehabilitačných klinikách i doma.

Pomáha udržiavať správnu polohu tela

V nepremokavom, ľahko umývateľnom poťahu so zipsom.

Vyrobené z peny s vysokou hustotou - odolné voči deformácii

Vyrobené v Poľsku

### ÚČEL

Rehabilitačná penová výplň v nepremokavom umývateľnom poťahu. Určená je na použitie pri rehabilitáciách, korekčnej gymnastiky alebo masážach. Môže sa používať na rehabilitačných klinikách i doma.

### VLASTNOSTI

Výplň je vyrobená z polyuretánovej peny. Poťah je z nepremokavej tkaniny (umelá koža). Balenie obsahuje jeden kus výrobku.

### ČISTENIE A ÚDRŽBA

Poťah čistíte hubkou alebo mäkkou kefou namočenou v teplej vode s jemným čistiacim prostriedkom. Nakoniec vyčistenú plochu utrite vlhkou handričkou a utrite do sucha. Celú penu nenamáčajte do vody.

### KONTRAINDIKÁCIE

Nepoužívajte vlhký výrobok priamo v kontakte s pokožkou.

Nepoužívajte v prípade výskytu alergických kožných reakcií.

Nepoužívajte, ak dôjde k mechanickému poškodeniu výrobku (napr. prasknutie, roztrhnutie).

### UPOZORNENIA

Pred použitím konzultujte celkovú vhodnosť použitia, výber výrobku a spôsob použitia s lekárom alebo rehabilitačným špecialistom.

Pred prvým použitím umyte poťah, v ktorom sa nachádza výplň.

Výrobok by sa mal vyberať podľa telesnej veľkosti.

Výrobok nevystavujte otvorenému ohňu ani iným zdrojom vznietenia. Pena vystavená otvorenému ohňu sa rýchlo vznieti.

Nevystavujte výrobok dlhodobo nízkym teplotám (pod 5 °C).

Obal výrobku nie je hračka.

Akúkoľvek závažnú udalosť súvisiacu s výrobkom treba nahlásiť výrobcovi.

### POZOR!

Výrobok nevystavujte dlhodobému priamemu slnečnému žiareniu, pretože pod vplyvom slnečného žiarenia môže zmeniť farbu. Zmena farby peny nemá vplyv na fyzikálno-mechanické vlastnosti výrobku.

### ZÁRUKA

Na výrobok sa vzťahuje 24-mesačná záruka. Mal by sa používať v súlade s jeho určením a podľa odporúčaní v návode na použitie. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené používaním výrobku v rozpore s návodom na použitie, nedbalosťou, vykonávaním samostatných opráv, úprav alebo konštrukčných zmien. Výrobok musí byť do servisného strediska doručený čistý. V prípade neopodstatnenosti reklamácie budú kupujúcemu účtované náklady na spracovanie a reklamáciu. Záruka sa poskytuje na základe dokladu o kúpe. Územný rozsah záručnej ochrany sa vzťahuje na územie Slovenskej republiky. Záruka na predaný tovar nevyklučuje, neobmedzuje ani nepozastavuje práva kupujúceho vyplývajúce z nesúladu tovaru so zmluvou.

### VÝROBCA

Reha Fund Sp. z o.o.  
ul. Staniewicka 14  
03-310 Warszawa, Poľsko  
tel. 48 22 59 40 300  
fax. 48 22 59 40 307  
e-mail: info@rehafund.pl  
www.rehafund.pl

### DOVOZCA

SANITAS – zdravotnícke pomôcky, s.r.o.  
Polárna 6  
040 12 Košice  
t.č.: 055/62 229 25  
e-mail: sanitaske@sanitaske.sk  
www.sanitaske.sk