

# NÁVOD NA POUŽITIE

## ORTOPEDICKÝ VANKÚŠ PRI TERAPII SPÁNKOVÉHO APNOE MORFEUSZ 665

Katalógové číslo: 665

Rozmery: 55 cm × 36 cm × 11/14 cm




 **POZOR!** Pred použitím vankúša si pozorne prečítajte nižšie uvedené pokyny.

### POUŽITIE

Vankúš je určený na prevenciu a prevenciu degenerácie a bolestí krčnej chrbtice spôsobených nesprávnym polohovaním počas spánku a zároveň na prevenciu kĺzania masky pre ľudí používajúcich prístroje CPAP, pre ľudí trpiacich spánkovým apnoe, ktorí majú problémy vyplývajúce z nesprávnej polohy krku a hlavy počas spánku, ktorí potrebujú stabilnú oporu hlavy a dobrú oporu krčnej chrbtice počas spánku pri znížení tlaku na telo, ktorí vyžadujú dojem mimoriadnej mäkkosti a veľmi vysokého komfortu spánku na vankúši, ktorý sa prispôsobí tvaru hlavy, pre všetky telesné tvary a výšky, pre ľudí spiacich na chrbte alebo na boku.

### ČISTENIE A ÚDRŽBA

Čistite mäkkou handričkou namočenou v teplej vode a jemných čistiacich prostriedkoch. Vyperte a vyčistite obliečku na vankúš podľa údajov na štítku. Po vyčistení dobre osušte.

 **POZOR!** Nenamáčajte celú penu do vody.

### KONTRAINDIKÁCIE

Vlhký prípravok nepoužívajte priamo v kontakte s pokožkou. Nepoužívať v prípade alergických kožných reakcií. Nepoužívajte, ak došlo k mechanickému poškodeniu (napr. roztrhnutie, prasknutie). Nepoužívajte inak, ako je určené.


### UPOZORNENIA

Pred použitím sa poraďte s lekárom alebo rehabilitačným špecialistom o absencii kontraindikácií pri používaní prípravku. Výrobok by sa mal prispôbiť veľkosti tela, či už pomocou podložky na nastavenie výšky alebo nie.

Nevystavujte výrobok otvorenému ohňu alebo iným zdrojom ohňa, ktoré by mohli spôsobiť vznietenie. Pri vystavení otvorenému ohňu sa pena prudko vznieti.

Nevystavujte výrobok dlhodobému pôsobeniu nízkych teplôt (pod 5°C). Obal produktu nie je hračka.








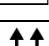
Akýkoľvek vážny incident súvisiaci s pomôckou je potrebné nahlásiť výrobcovi a Úradu pre registráciu liekov, zdravotníckych pomôcok a biocídných výrobkov.








 **POZOR!** Pena by mala byť chránená pred slnečným žiarením, pretože môže vplyvom slnečného žiarenia zmeniť farbu. Zmena farby peny neovplyvňuje jej fyzikálne a mechanické vlastnosti.

### ZOZNAM POUŽITÝCH MATERIÁLOV

Penová vložka	100% polyuretánová pena
Podšívka	100% polyester
Obliečka na vankúš	100% bavlna

### Vysvetlenie pojmov

	Výrobca
	Označenie CE
	Referenčné číslo
	Dátum výroby
	Pozrite si návod na použitie
	POZOR
	Číslo parcely
	Hore, neprevracajte

	Skladujte na suchom mieste
	Krehké, zaobchádzajte opatrne
	Nenamáčať
	Nebieliť
	Nežehliť
	Nečistiť chemicky
	Sušte rozložené v tieni

#### VÝROBCA

**Reha Fund Sp. z o.o.**

ul. Staniewicka 14

03-310 Warszawa, Poľsko

tel. 48 22 59 40 300

fax. 48 22 59 40 307

e-mail: [info@rehafund.pl](mailto:info@rehafund.pl)

[www.rehafund.pl](http://www.rehafund.pl)

#### DOVOZCA

SANITAS – zdravotnícke pomôcky, s.r.o.

Polárna 6

040 12 Košice

t.č.: 055/62 229 25

e-mail: [sanitaske@sanitaske.sk](mailto:sanitaske@sanitaske.sk)

[www.sanitaske.sk](http://www.sanitaske.sk)

CE Verzia: 1.3

Vydané: 01/2021

## Záručný list

### ORTOPEDICKÝ VANKÚŠ PRI TERAPII SPÁNKOVÉHO APNOE MORFEUSZ 665

#### ZÁRUČNÉ PODMIENKY

1. Výrobca ubezpečuje zákazníka, že predajný predmet, na ktorý je vydaný tento záručný list, je úplne nový a vo vysokej kvalite.
2. Na vankúš sa vzťahuje záruka 24 mesiacov od dátumu predaja v záručnom liste.
3. Základom pre posúdenie reklamácie je predloženie správne vyplneného záručného listu spolu s priloženým dokladom o kúpe.
4. Prípadné závady na zariadení odstráni REHA FUND Sp. z o. alebo autorizovaným servisným technikom za predpokladu, že vankúš bol používaný v súlade s jeho účelom a odporúčaniami v návode na použitie.
5. Oprava bude vykonaná v čo najkratšom čase, maximálne však do 30 dní odo dňa prevzatia produktu na servisnom mieste.
6. Záruka sa nevzťahuje na:
  - činnosti súvisiace s údržbou, čistením a úpravou vankúša popísané v návode na použitie;
  - diely podliehajúce opotrebovaniu pri bežnom používaní;
  - mechanické a tepelné poškodenie, napr.
  - poškodenie spôsobené používaním zariadenia v rozpore s návodom na obsluhu, nedbalosťou, vykonávaním nezávislých opráv, úprav alebo konštrukčných zmien.
7. Pred vrátením výrobku autorizovanému servisnému technikovi ho vyčistíte v súlade s návodom na použitie, aby bol vhodný na servisnú kontrolu.
8. Opravy a výmeny náhradných dielov by mali vykonávať autorizovaní servisní technici spoločnosti Reha Fund Sp. z o.
9. V prípade neoprávnenej reklamácie budú zákazníkovi účtované náklady na dopravu.
10. Územný rozsah záručnej ochrany pokrýva územie Slovenskej republiky.
11. Záruka na predávaný tovar nevylučuje, neobmedzuje ani nepozastavuje práva zákazníka vyplývajúce z nesúladu tovaru so zmluvou.

#### ZOZNAM SERVISNÝCH OPRAV (vyplní servis)

	Dátum nahlásenia	Objednávacie číslo	Popis závady/rozsah opravy	Dátum opravy	Pečiatka a podpis servisu
1.					
2.					