

## NÁVOD NA POUŽITIE SPRCHOVÝ STOLČEK KEVIN RF-821

<b>Katalógové číslo:</b>	<b>RF-821</b>
<b>Celková šírka:</b>	50 cm
<b>Šírka sedadla:</b>	50 cm
<b>Celková výška:</b>	41-51 cm
<b>Celková dĺžka:</b>	39 cm
<b>Hĺbka sedadla:</b>	31 cm
<b>Výška sedadka:</b>	39-49 cm
<b>Max. bezpečné zaťaženie:</b>	110 kg
<b>Hmotnosť produktu:</b>	1,9 kg



**! POZOR!** Pred použitím stoličky si pozorne prečítajte nižšie uvedené pokyny.

### POUŽITIE

Sprchový stolček umožňuje ľuďom s obmedzenou schopnosťou pohybu a seniorom každodennú osobnú hygienu pri zachovaní značnej nezávislosti. Vďaka tejto výbave sa výrazne znižuje riziko pádu alebo iných zranení, ku ktorým môže dôjsť v sprche.

### BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ


Pre vašu bezpečnosť dodržujte nasledujúce odporúčania:

1. Pred použitím sprchovej stoličky sa uistite, že:
  - a. výška sedadla je správne nastavená;
  - b. uzamykacie tlačidlá fungujú správne;
  - c. gumené čiapky sú v dobrom stave;
  - d. všetky prítlačné pätky sú nastavené v rovnakej výške.
2. Používajte iba originálne príslušenstvo. Používanie neoriginálnych dielov môže mať za následok nesprávne prispôsobenie stoličky, čo môže mať za následok riziko pádu.
3. Neprekračujte maximálne povolené zaťaženie taburetu.
4. Neskladujte pri teplotách pod 0°C.
5. Pred použitím sa uistite, že nožné rúrky sú v rovnakej výške.
6. Nepokúšajte sa posunúť stoličku nahor alebo nadol zo svahu pomocou vody, ľadu alebo oleja.
7. Stolička sa musí používať na rovnom povrchu.
8. Pred každým použitím skontrolujte stabilitu kresla a dotiahnutie skrutiek.
9. Akýkoľvek vážny incident súvisiaci s pomôckou sa musí nahlásiť výrobcovi.

**! POZOR!** Nedodržanie vyššie uvedených bezpečnostných pravidiel môže viesť k vážnym nehodám.


### ČASTI PRUDUKTU

- A a B. skrutky a podložky  
C. sedadlo  
D a E. rám, trubky a uzáver

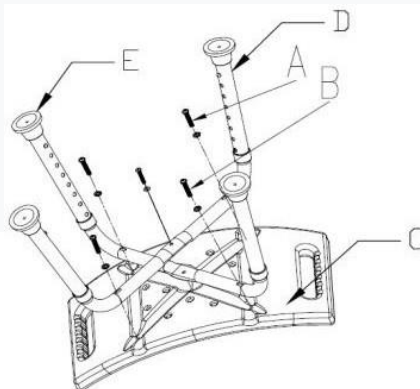

### VÝŠKOVÉ NASTAVENIE

1. Stlačte bezpečnostné tlačidlo na nohe stoličky a jemne ním otočte.
2. Nastavte vhodnú výšku.
3. Nasmerujte tlačidlo na príslušný otvor, aby ste zaistili prítlačnú pätku v požadovanej výške.
4. Opakujte vyššie uvedené kroky na každej prítlačnej pätky a uistite sa, že sú všetky prítlačné pätky nastavené v rovnakej výške.

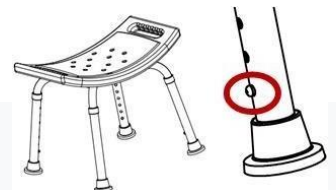


**POZOR!** Uistite sa, že sú všetky nožičky správne zaistené a nastavené na rovnakú výšku.

Vyššie uvedené ilustrácie slúžia len na ilustračné účely.

## INŠTALÁCIA

1. Pripravte si inštalačnú súpravu (obr. 1).
2. Nastavte nohy zo spodnej časti sedadla (obr. 2).
3. Vložte skrutky do otvorov a potom ich rovnomerne zaskrutkujte – každú skrutku zaskrutkujte po trochu. Ak skrutky zaskrutkujete úplne jednu po druhej, môžete mať problémy s montážou (obr. 3).

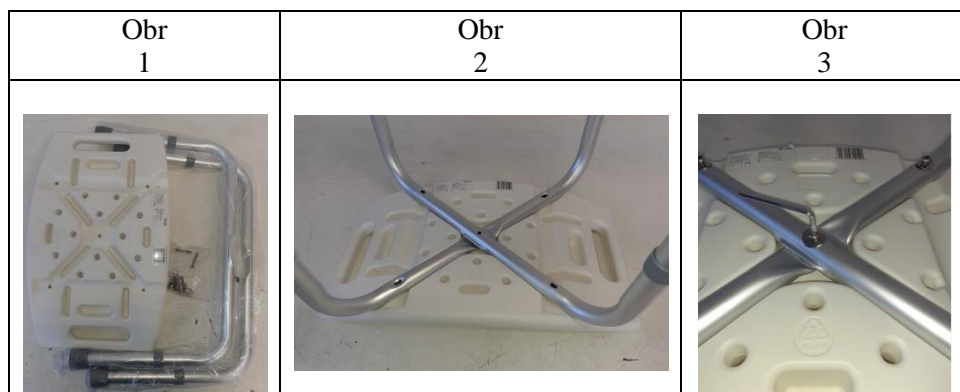

Vyššie uvedené fotografie sú len ilustračné.

## SEDENIE A VSTAVANIE

1. Uistite sa, že stolička je stabilná a pripravená na použitie.
2. Postavte sa chrbtom k stoličke tak, aby sa vaše kolená dotýkali prednej časti stoličky.
3. Natiahnite ruky za seba a položte ich na sedadlo.
4. Pomaly sa posaďte na stoličku, pokrčte lakty a ak je to možné, kolená a boky.
5. Ak chcete vstať zo stoličky, položte ruky na sedadlo a vytlačte sa.

## ČISTENIE A ÚDRŽBA

1. Odporúča sa pravidelne kontrolovať stoličku, či nie je poškodená alebo či nemá viditeľné známky opotrebovania. Pravidelne kontrolujte, či:

- a. na ráme nie sú žiadne praskliny ani zlomy;
- b. zaistovacie tlačidlo správne zaistí nastavenú výšku;
- c. otvory v rúrkach nie sú zväčšené alebo predĺžené;
- d. spodné kryty nie sú opotrebované – ak áno, mali by byť vymenené;
- e. žiadne iné časti stoličky nie sú uvoľnené alebo poškodené.











2. Stoličku sa odporúča pravidelne čistiť mäkkou handričkou a mydlovou vodou.
3. Po vyčistení treba stolicu osušiť mäkkou handričkou.
4. Pred použitím skontrolujte dotiahnutie skrutiek a stabilitu stoličky.
5. Pravidelným čistením predídete zašpineniu hadičiek a zabezpečíte správne fungovanie stolice.

**POZOR!** Na čistenie stoličky nepoužívajte rozpúšťadlá, bielidlá ani abrazívne prostriedky.

## ZOZNAM POUŽITÝCH MATERIÁLOV

Rám	aluminium
Sedadlo	PE (polyetylen)
Násadka	TPR (termoplastická guma)
Tlačidlo nastavenia výšky	ocel'

## Vysvetlenie symbolov

	Výrobca
	Označenie CE
	Referenčné číslo
	Dátum výroby
	Pozrite si návod na použitie
	Pozor
	Sériové číslo
	Hore, neprevracajte
	Skladujte na suchom mieste
	Krehké, zaobchádzajte opatrne

### VÝROBCA

**Reha Fund Sp. z o.o.**

ul. Staniewicka 14

03-310 Warszawa, Poľsko

tel. 48 22 59 40 300

fax. 48 22 59 40 307

e-mail: [info@rehafund.pl](mailto:info@rehafund.pl)

[www.rehafund.pl](http://www.rehafund.pl)

### DOVOZCA

SANITAS – zdravotnícke pomôcky, s.r.o.

Polárna 6

040 12 Košice

t.č.: 055/62 229 25

e-mail: [sanitaske@sanitaske.sk](mailto:sanitaske@sanitaske.sk)

[www.sanitaske.sk](http://www.sanitaske.sk)

CE Verzia: 1.3

Vydané: 04/2022

**Záručný list**  
**Sprchovací stolček KEVIN RF-821**

**ZÁRUČNÉ PODMIENKY**

1. Výrobca ubezpečuje zákazníka, že predajný predmet, na ktorý je vydaný tento záručný list, je úplne nový a vo vysokej kvalite.
2. Na sprchovaciu stoličku sa vzťahuje záruka 24 mesiacov od dátumu predaja v záručnom liste.
3. Základom pre posúdenie reklamácie je predloženie správne vyplneného záručného listu spolu s priloženým dokladom o kúpe.
4. Prípadné závady na zariadení odstráni REHA FUND Sp. z o. alebo autorizovaným servisným technikom za predpokladu, že stolička bola používaná v súlade s jej určeným účelom a odporúčaniami v používateľskej príručke.
5. Oprava bude vykonaná čo najskôr, maximálne do 30 dní, odo dňa prevzatia zariadenia na servisnom mieste.
6. Záruka sa nevzťahuje na:
  - činnosti údržby, čistenia a nastavovania opísané v návode na použitie;
  - diely podliehajúce opotrebovaniu pri bežnom používaní;
  - mechanické a tepelné poškodenie invalidného vozíka, napr.
  - poškodenie spôsobené používaním zariadenia v rozpore s návodom na obsluhu, nedbalosťou, vykonávaním nezávislých opráv, úprav alebo konštrukčných zmien.
7. Pred odovzdaním zariadenia autorizovanému servisnému technikovi je potrebné ho vyčistiť v súlade s návodom na použitie, aby bolo vhodné na servisnú kontrolu.
8. Opravy a výmeny náhradných dielov by mali vykonávať autorizovaní servisní technici spoločnosti Reha Fund Sp. z o.
9. V prípade neoprávnenej reklamácie budú zákazníkovi účtované náklady na dopravu.
10. Územný rozsah záručnej ochrany pokrýva územie Slovenskej republiky.
11. Záruka na predávaný tovar nevylučuje, neobmedzuje ani nepozastavuje práva zákazníka vyplývajúce z nesúladu tovaru so zmlouvou.

**ZOZNAM SERVISNÝCH OPRAV (vyplní servis)**

	Dátum nahlásenia	Objednávacie číslo	Popis závady/rozsah opravy	Dátum opravy	Pečiatka a podpis servisu
1.					
2.					