


NÁVOD NA POUŽITIE

ORTOPEDICKÝ CESTOVNÝ VANKÚŠ MORFEUSZ 663

Katalógové číslo: 663
Rozmery: 32 cm x 25 cm x 10/13 cm



 **POZOR!** Pred použitím vankúša si pozorne prečítajte nižšie uvedené pokyny.

POUŽITIE

Vankúš je určený na používanie pri prevencii a predchádzaní degenerácii a bolesti krčnej chrbtice spôsobenej nesprávnou polohou počas spánku, pre osoby, ktoré majú problémy kvôli nesprávnej polohe krku a hlavy počas spánku (napr. bolesti chrbta, svalové napätie, mravčenie a necitlivosť končatín a pod.), ktoré počas spánku potrebujú stabilnú opierku krku a hlavy. Pre všetky typy postavy a telesné výšky, pre osoby spiacie na chrbte alebo na boku.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Čistite mäkkou handričkou namočenou v teplej vode a jemných čistiacich prostriedkoch. Vyperte a vyčistite obliečku na vankúš podľa údajov na štítku. Po vyčistení dobre osušte.

 **POZOR!** Nenamáčajte celý vankúš do vody.

KONTRAINDIKÁCIE

Vlhký prípravok nepoužívajte priamo v kontakte s pokožkou. Nepoužívať v prípade alergických kožných reakcií. Nepoužívajte, ak došlo k mechanickému poškodeniu (napr. roztrhnutie, prasknutie). Nepoužívajte inak, ako je určené.


UPOZORNENIA

Pred použitím sa poraďte s lekárom alebo rehabilitačným špecialistom o absencii kontraindikácií pri používaní prípravku. Výrobok by sa mal prispôbiť veľkosti tela, či už pomocou podložky na nastavenie výšky alebo nie.

Nevystavujte výrobok otvorenému ohňu alebo iným zdrojom ohňa, ktoré by mohli spôsobiť vznietenie. Pri vystavení otvorenému ohňu sa pena prudko vznieti.

Nevystavujte výrobok dlhodobému pôsobeniu nízkych teplôt (pod 5°C). Obal produktu nie je hračka.








Akýkoľvek vážny incident súvisiaci s pomôckou je potrebné nahlásiť výrobcovi a Úradu pre registráciu liekov, zdravotníckych pomôcok a biocídnych výrobkov.







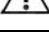

 **POZOR!** Pena by mala byť chránená pred slnečným žiarením, pretože môže vplyvom slnečného žiarenia zmeniť farbu. Zmena farby peny neovplyvňuje jej fyzikálne a mechanické vlastnosti.

ZOZNAM POUŽITÝCH MATERIÁLOV

Penová vložka	100% polyuretánová pena
Podšívka	100% polyester
Obliečka na vankúš	100% bavlna

Vysvetlenie pojmov

	Výrobca
	Označenie CE
	Referenčné číslo
	Dátum výroby
	Pozrite si návod na použitie
	POZOR
	Číslo parcely

	Hore, neprevracajte
	Skladujte na suchom mieste
	Krehké, zaobchádzajte opatrne
	Nenamáčať
	Nebieliť
	Nežehliť
	Nečistiť chemicky
	Sušte rozložené v tieni

VÝROBCA

Reha Fund Sp. z o.o.

ul. Staniewicka 14

03-310 Warszawa, Poľsko

tel. 48 22 59 40 300

fax. 48 22 59 40 307

e-mail: info@rehafund.pl

www.rehafund.pl

DOVOZCA

SANITAS – zdravotnícke pomôcky, s.r.o.

Polárna 6

040 12 Košice

t.č.: 055/62 229 25

e-mail: sanitaske@sanitaske.sk

www.sanitaske.sk

CE Verzia: 1.3

Vydané: 01/2021

Záručný list

ORTOPEDICKÝ CESTOVNÝ VANKÚŠ MORFEUSZ 663

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

1. Výrobca ubezpečuje zákazníka, že predajný predmet, na ktorý je vydaný tento záručný list, je úplne nový a vo vysokej kvalite.
2. Na vankúš sa vzťahuje záruka 24 mesiacov od dátumu predaja v záručnom liste.
3. Základom pre posúdenie reklamácie je predloženie správne vyplneného záručného listu spolu s priloženým dokladom o kúpe.
4. Prípadné závady na zariadení odstráni REHA FUND Sp. z o. alebo autorizovaným servisným technikom za predpokladu, že vankúš bol používaný v súlade s jeho účelom a odporúčaniami v návode na použitie.
5. Oprava bude vykonaná v čo najkratšom čase, maximálne však do 30 dní odo dňa prevzatia produktu na servisnom mieste.
6. Záruka sa nevzťahuje na:
 - činnosti súvisiace s údržbou, čistením a úpravou vankúša popísané v návode na použitie;
 - diely podliehajúce opotrebovaniu pri bežnom používaní;
 - mechanické a tepelné poškodenie, napr.
 - poškodenie spôsobené používaním zariadenia v rozpore s návodom na obsluhu, nedbalosťou, vykonávaním nezávislých opráv, úprav alebo konštrukčných zmien.
7. Pred vrátením výrobku autorizovanému servisnému technikovi ho vyčistite v súlade s návodom na použitie, aby bol vhodný na servisnú kontrolu.
8. Opravy a výmeny náhradných dielov by mali vykonávať autorizovaní servisní technici spoločnosti Reha Fund Sp. z o.
9. V prípade neoprávnenej reklamácie budú zákazníkovi účtované náklady na dopravu.
10. Územný rozsah záručnej ochrany pokrýva územie Slovenskej republiky.
11. Záruka na predávaný tovar nevyklučuje, neobmedzuje ani nepozastavuje práva zákazníka vyplývajúce z nesúladu tovaru so zmluvou.

ZOZNAM SERVISNÝCH OPRAV (vyplní servis)

	Dátum nahlásenia	Objednávacie číslo	Popis závady/rozsah opravy	Dátum opravy	Pečiatka a podpis servisu
1.					
2.					