

NÁVOD NA POUŽITIE FRANCÚZSKA BARLA RF-220

Katalógové č.: RF-220

Maximálne bezpečné zaťaženie: 113 kg

Výškové nastavenie: 73,6 cm - 96,5 cm 0,62 kg

Hmotnosť: 113 kg

POZOR!

Predtým, než začnete používať barlu, si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny.

ÚČEL

Francúzske barly sú určené pre osoby, ktoré potrebujú oporu pri zaistení mobility, pri chôdzi, pri udržiavaní rovnováhy a prenášaní telesnej hmotnosti. V prípadoch úrazov a ortopedických stavov dolných končatín, keď je zakázané plné zaťaženie končatiny. Určené sú pre pacientov po úrazoch, nehodách, zlomeninách, podvrtnutiach, vykĺbeniach, seniorov.

ZÁSADY BEZPEČNÉHO POUŽÍVANIA

V záujme bezpečnosti je potrebné dodržiavať nasledujúce odporúčania:

1. Neprekračujte maximálne prípustné zaťaženie.
2. Pri používaní barle vždy dbajte na maximálnu opatrnosť. Vyhýbajte sa všetkým potenciálnym nebezpečenstvám, ako sú: nerovný alebo mäkký povrch, prekážky na ceste, mokrá podlaha atď.
3. Používajte len originálne príslušenstvo. Použitie neoriginálnych dielov môže mať za následok nedostatočné prispôsobenie barly, čo vedie k riziku pádu.
4. Každú závažnú udalosť týkajúcu sa pomôcky nahláste výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má používateľ alebo pacient bydlisko.

NASTAVOVANIE VÝŠKY

Ak chcete nastaviť barlu na požadovanú výšku,:

- stlačte uvoľňovacie tlačidlo na spodnej časti barly a mierne otočte spodnú rúrku;
 - nastavte požadovanú výšku;
 - otočte spodnú rúrku tak, aby sa tlačidlo uzamklo v otvoroch;
- Dôkladne skontrolujte, či je tlačidlo zaistené v otvoroch.



POZOR!

Nasledujúce odporúčania sú odporúčaniami výrobcu, ale mali by ste ich konzultovať so svojim lekárom alebo fyzioterapeutom.

Výšku barly treba nastaviť tak, aby používateľ mohol udržať vzpriamený postoj s nohou mierne pokrčenou v kolennom kĺbe. Rukoväť by mala byť nastavená tak, aby ruka zostala mierne ohnutá v lakt'ovom kĺbe a aby skutočná hmotnosť tela spočívala na rukách, a nie na podpazuší.

ČISTENIE

1. Plastové časti treba čistiť len teplou mydlovou vodou.
2. Kovové časti treba čistiť suchou handričkou.

POZOR!

Na čistenie barly nepoužívajte rozpúšťadlá, bielidlá ani abrazívne prostriedky.

ÚDRŽBA


Odporúča sa barlu pravidelne kontrolovať, aby ste sa uistili, že:

1. neobjavili sa praskliny alebo prehnutia;
2. blokovacie tlačidlo správne zabezpečuje nastavenú výšku;
3. otvory v trubici nie sú zväčšené alebo predĺžené;
4. rukoväť a podpazušná opierka sú pevné, nie je v nich žiadna vôľa;
5. spodná násadka sa neopotrebovala – v opačnom prípade ju vymeňte.

POZOR!

V prípade akýchkoľvek pochybností o vhodnosti barly na použitie sa obráťte na servisné oddelenie výrobcu.



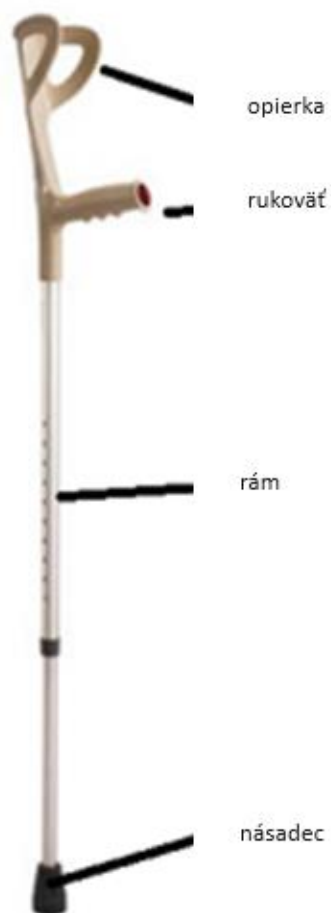







ČASTI BARLY



ZOZNAM POUŽITÝCH MATERIÁLOV

Rám	hliník
Násadka	guma bez lateksu
Opierka a rukoväť	PP (polypropylén)

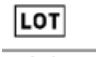VYSVETLENIE SYMBOLOV

	Výrobca
	Označenie CE
	Referenčné číslo
	Dátum výroby
	Pozri návod na použitie
	Upozornenie
	Číslo šarže
	Vrchná časť, neprevracat'
	Skladujte na suchom mieste
	Krehké, zaobchádzať opatrne

POZNÁMKY

VÝROBCA

Reha Fund Sp. z o.o.
ul. Staniewicka 14
03-310 Warszawa, Poľsko
tel. 48 22 59 40 300
fax. 48 22 59 40 307
e-mail: info@rehafund.pl
www.rehafund.pl

DOVOZCA

SANITAS – zdravotnícke pomôcky, s.r.o.
Polárna 6
040 12 Košice
t.č.: 055/62 229 25
e-mail: sanitaske@sanitaske.sk
www.sanitaske.sk

ZÁRUČNÝ LIST
FRANCÚZSKA BARLA RF-220

Model	Sériové číslo	Dátum predaja	Podpis a pečiatka predajcu

PODMIENKY ZÁRUKY

- (1) Výrobca zaručuje zákazníkovi, že výrobok, na ktorý je vystavený tento záručný list, je úplne nový a kvalitný.
- (2) Na barlu sa vzťahuje záručná doba 24 mesiacov od dátumu predaja uvedeného na záručnom liste.
- (3) Základom pre posúdenie reklamácie je doručenie správne vyplneného záručného listu s priloženým dokladom o kúpe.
- (4) Prípadné závady zariadenia budú odstránené spoločnosťou REHA FUND Sp. z o.o. alebo autorizovanými servisnými technikmi za predpokladu, že zariadenie bolo používané v súlade s jeho určením a odporúčaniami v návode na použitie.
- (5) Oprava bude vykonaná v čo najkratšom možnom čase, najneskôr do 30 dní, odo dňa prijatia zariadenia v servisnom stredisku.
- (6) Záruka sa nevzťahuje na
 - úkony údržby, čistenia a nastavovania opísané v návode na použitie;
 - diely podliehajúce opotrebovaniu počas bežného používania;
 - mechanické a tepelné poškodenie, napr. ohnutie, poškrabanie, zlomenie atď;
 - poškodenia spôsobené používaním zariadenia v rozpore s návodom na použitie, nedbalosťou, vykonávaním samostatných opráv, úprav alebo konštrukčných zmien.
- (7) Pred odovzdaním zariadenia autorizovanému servisnému technikovi na servis treba zariadenie vyčistiť v súlade s návodom na použitie.
- (8) Opravy a výmenu náhradných dielov by mali vykonávať autorizovaní servisní technici spoločnosti Reha Fund s.r.o.
- (9) V prípade neopodstatnenej reklamácie budú zákazníkovi účtované náklady na dopravu.
- (10) Územný rozsah záručnej ochrany sa vzťahuje na územie Slovenskej republiky.
- (11) Záruka na predaný tovar nevyklučuje, neobmedzuje ani nepozastavuje práva zákazníka vyplývajúce z nesúladu tovaru so zmluvou.

ZOZNAM SERVISNÝCH OPRAV (vyplňa servis)

	Dátum podania žiadosti	Objednávka č.	Popis závady/rozsah opravy	Dátum vykonania opravy	Pečiatka a podpis servisu
1.					
2.					