



NÁVOD NA POUŽITIE
OPIERKA HLAVY RF – 5/Z



Montáž opierky hlavy:

1. Pripravte si všetky súčasti opierky hlavy.
2. Vložte rám opierky hlavy do rámu (obr. 25).
3. Upevnite rám pomocou skrutky s plastovou maticou (obr. 26).
4. Vložte do rámu rúrky na nastavenie šírky a upevnite ich pomocou skrutiek s plastovou maticou (obr. 27).
5. Vložte opierku hlavy do rámu.
6. Namontujte pridržiavacie koncovky na rúrky na nastavenie šírky (obr. 28).
6. Upevnite pridržiavacie konce pomocou svoriek (obr. 29)
8. Skontrolujte, či sú všetky časti pevne pripevnené (obr. 30)
9. Pomocou imbusového kľúča upevnite svorky na rám vozíka. Na jednej strane svorky je rám vozíka, na druhej strane svorky je pridržiavacia koncovka (obr. 31).
10. V prípade, že je svorka umiestnená na ráme vozíka, je potrebné ju upevniť.
11. Nastavte opierku hlavy pomocou pák na ráme opierky hlavy (obr. 32).
12. Skontrolujte, či je opierka hlavy pevne pripevnená k rámu vozíka (obr. 33).

<p>OBR 25</p> 	<p>OBR 26</p> 	<p>OBR 27</p> 
<p>OBR 28</p> 	<p>OBR 29</p> 	<p>OBR 30</p> 
<p>OBR 31</p> 	<p>OBR 32</p> 	<p>OBR 33</p> 