

NÁVOD NA POUŽITIE

Neoprénový stabilizátor kolenného kĺbu „Ligamax Knee“ O-1201



POZOR! Pred prvým použitím výrobku si prečítajte tento dokument.

Pri kúpe skontrolujte kompletnosť a kvalitatívny stav výrobku. Akékoľvek výhrady nahláste osobe, ktorá výrobok vydala. Pri nahlasovaní kvantitatívnych/kvalitatívnych výhrad postupujte podľa pokynov uvedených na záručnom liste, t. j. predložte doklad o kúpe a záručný list vyplnený predajcom.

I. Opis výrobku

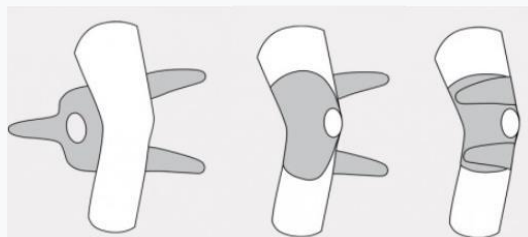
Neoprénový stabilizátor kolenného kĺbu "LIGAMAX KNEE" je vyrobený z prémiového neoprénu. Vďaka otvorenému dizajnu umožňuje dokonalé prispôsobenie stabilizátora končatine. Suché zipsy dávajú možnosť nastavenia úrovne stabilizácie bez obmedzenia voľnosti pohybu a dodatočný silikónový krúžok uvoľňuje kolennú jamku.

II. Vlastnosti

Neoprénový stabilizátor kolenného kĺbu tesne prilieha ku kolenu a poskytuje vynikajúce spevnenie kĺbov. Zachováva primeranú telesnú teplotu, zlepšuje krvný obeh, čo výrazne znižuje opuchy a pocit stuhnutosti v kĺbe, zmierňuje bolesť. Silikónový krúžok okolo pately znižuje jej tlak a riadi dráhu pohybu patelofemorálny kĺb.

III. Spôsob použitia

- uistite sa, že veľkosť produktu je vhodná,
- pred nasadením uvoľnite všetky suché zipsy a nechajte ich voľné,
- vložte patelu do otvoru stabilizátora
- stredný suchý zips zapnite vzadu na úrovni podkolennej jamky
- zvyšný suchý zips upevnite nad a pod jabĺčkom



IV. Veľkostná tabuľka

Veľkosť	Obvod kolenného kĺbu vo výške jabĺčka
1	32 – 43 cm
2	44 – 54 cm

V. Zloženie

100 % neoprén

VI. Pravidlá používania

- tento produkt sa môže používať iba podľa pokynov lekára,
- spôsob nasadenia ortézy by mal ukázať kvalifikovaný zdravotnícky personál, v prítomnosti osoby, ktorá sa stará o používateľa (ak je to potrebné),
- výrobok a jeho súčasti by sa mali používať iba na určený účel,
- produkt sa má aplikovať priamo na telo,
- výrobok by mal byť udržiavaný v čistote v súlade s odporúčaniami uvedenými v tomto návode a na štítku, ktorý je umiestnený na výrobku. Nesprávne čistenie a údržba produktu môže viesť k tvorbe kožných lézií

VII. Aplikácia

Produkt je možné použiť:

- preventívne pri športe a fyzickej aktivite,
- počas rehabilitačného obdobia po sadrovej dlahe,
- v prípade porúch súvisiacich s nestabilitou kolenného kĺbu,
- pri miernych dislokáciách kolenného kĺbu a poškodení väziva.

VIII. Kontraindikácie







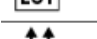
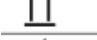







- ak dôjde ku kožným zmenám v miestach prilnutia ortézy, je nevyhnutné jej použitie obmedziť a je možné ho používať len pod lekársym dohľadom,
- je potrebné, aby ošetrojúci lekár zhodnotil používanie ortézy u osôb s poruchami pamäti rôzneho pôvodu, u ľudí s duševnými poruchami a u detí.

IX. Čistenie a údržba

Výrobok sa odporúča pravidelne umývať. Pred praním zatvorte všetky suché zipsy na ortéze.

- prať ručne pri teplote do 30°C vo vode s neutrálnym, antialergickým pracím prostriedkom,
- opláchnite vo vlažnej vode, nepoužívajte zmäkčovadlá,
- nebieliť,
- nežehliť,
- nečistite chemicky,
- nesusiť v sušičke,
- sušte na plocho na tienenom a vetranom mieste – nevystavujte výrobok priamemu slnečnému žiareniu

VYSVETLENIE SYMBOLOV

	Výrobca
	Označenie CE
	Referenčné číslo
	Dátum výroby
	Pozri návod na použitie
	Upozornenie
	Číslo šarže
	Vrchná časť, neprevracat'
	Skladujte na suchom mieste
	Krehké, manipulujte s ním opatrne
	Nprezávajte
	Obal je recyklovateľný
	Umývajte ručne
	Nebielit'
	Nežehliť

VÝROBCA

Reha Fund Sp. z o.o.

ul. Staniewicka 14

03-310 Warszawa, Poľsko

tel. 48 22 59 40 300

fax. 48 22 59 40 307

e-mail: info@rehafund.pl

www.rehafund.pl

DOVOZCA

SANITAS – zdravotnícke pomôcky, s.r.o.

Polárna 6

040 12 Košice

t.č.: 055/62 229 25

e-mail: sanitaske@sanitaske.sk

www.sanitaske.sk



Verzia: 1.1

Vydané:

ZÁRUČNÝ LIST

Neoprénový stabilizátor kolenného kĺbu „Ligamax Knee“ O-1201

Model	Sériové číslo:	Dátum predaja	Podpis a pečiatka predajcu:

PODMIENKY ZÁRUKY

- (1) Výrobca zaručuje zákazníkovi, že výrobok, na ktorý je vystavený tento záručný list, je nový a kvalitný.
- (2) Na výrobok sa vzťahuje 24-mesačná záručná doba od dátumu predaja uvedeného v záručnom liste.
- (3) Podkladom pre posúdenie reklamácie je doručenie riadne vyplneného záručného listu spolu s dokladom o kúpe.
- (4) Prípadné závady budú odstránené spoločnosťou REHA FUND Sp. z o.o. alebo autorizovanými servisnými technikmi za predpokladu, že výrobok bol používaný v súlade s jeho určením a odporúčaniami uvedenými v návode na použitie.
- (5) Oprava/výmena sa vykoná najneskôr do 30 dní odo dňa prijatia výrobku v servisnom stredisku.
- (6) Záruka sa nevzťahuje na:
 - údržbu, čistenie a nastavenie pásu, ako je opísané v návode na použitie;
 - diely podliehajúce opotrebovaniu počas bežného používania;
 - mechanické a tepelné poškodenie pásu, napr. prasknutie, roztrhnutie atď;
 - poškodenia spôsobené používaním zariadenia v rozpore s návodom na použitie, nedbalosťou, neoprávnenými opravami, úpravami alebo konštrukčnými zmenami.
- (7) Pred odovzdaním výrobku autorizovanému servisnému technikovi ho treba vyčistiť v súlade s návodom na použitie.
- (8) Opravy a výmeny by mali vykonávať autorizovaní servisní technici spoločnosti Reha Fund s.r.o.
- (9) V prípade neopodstatnenej reklamácie budú zákazníkovi účtované náklady na dopravu.
- (10) Územná pôsobnosť záručnej ochrany sa vzťahuje na územie Slovenskej republiky.
- (11) Záruka na predaný tovar nevyklučuje, neobmedzuje ani nepozastavuje práva zákazníka vyplývajúce z nesúladu tovaru so zmluvou.

ZOZNAM SERVISNÝCH OPRAV (vyplní servis)

	Dátum nahlásenia	Objednávacie číslo	Popis závady/rozsah opravy	Dátum opravy	Pečiatka a podpis servisu
1.					
2.					