

3046 HYGIENICKÁ PODLOŽKA S GUMIČKOU

- nepremokavá
- priedušná
- mäkká a pružná
- viacnásobne použiteľná (ľahko umývateľná)

Rozmery:

70 x 100 cm , 90 x 100 cm, 90 x 140 cm, 90 x 200 cm, 90 x 200 cm (s podpornými gumičkami),
140 x 200 cm, 180 x 200 cm

NÁVOD NA POUŽITIE HYGIENICKÁ PODLOŽKA 3046

POUŽITIE:

Ochranná podložka je určená na ochranu povrchu (napr. matrace, posteľ) pred kontamináciou telesnými exkrementami (napr. močom, krvou).

OPIS VÝROBKU:

Vyrobená z nepremokavého materiálu: pletenina: 82 % bavlna; 18 % polyester; ochranný potáh: 100 % polyuretán.

ČISTENIE:

Pranie: Podložku perte pri teplote do 70 °C, jemné pranie.

KONTRAINDIKÁCIE:

Nepoužívajte vlhký výrobok priamo v kontakte s pokožkou.

Nepoužívajte v prípade výskytu alergických kožných reakcií.

Nepoužívajte, ak dôjde k mechanickému poškodeniu výrobku (napr. prasknutie, roztrhnutie).

UPOZORNENIA!

Pred použitím sa poraďte s lekárom alebo rehabilitačným pracovníkom.

Nechlórujte (na bielenie nepoužívajte zlúčeniny vylučujúce voľný chlór).

Nečistite chemicky.

Nežehlite (nedovoľte kontakt s vyhrievanými povrchmi, napr. radiátorom).

Používajte na jednej strane (potáh by mal byť obrátený pleteným povrchom nahor).

Nepoužívajte bielicidlá.

Nepoužívajte chemikálie.

Sušte v automatickej sušičke pri teplote do 70 °C.

POZOR!

Zhoršenie vizuálno-estetických vlastností (typ zvrásnenia povrchu) nemá vplyv na zmenu parametrov materiálu (fyzikálno-mechanické vlastnosti).



PRAŤ PRI TEPLOTE.
MAX. 70° C

NEBIELIŤ

NEŽEHLIŤ

MOŽNO SUŠIŤ
V BUBNOVEJ SUŠIČKE

NEČISTIŤ CHEMICKY

MYŤ MOKROU
HUBKOU

VÝROBCA

Reha Fund Sp. z o.o.

ul. Staniewicka 14

03-310 Warszawa, Poľsko

tel. 48 22 59 40 300

fax. 48 22 59 40 307

e-mail: info@rehafund.pl

www.rehafund.pl

DOVOZCA

SANITAS – zdravotnícke pomôcky, s.r.o.

Polárna 6

040 12 Košice

t.č.: 055/62 229 25

e-mail: sanitaske@sanitaske.sk

www.sanitaske.sk