

# NÁVOD NA POUŽITIE

## Viacprstová ortéza na ruku „DIGIMAX“ O-1770



### **POZOR! Pred prvým použitím výrobku si prečítajte tento návod na použitie**

Pri kúpe skontrolujte kompletnosť a kvalitatívny stav výrobku. Akékoľvek výhrady nahláste osobe, ktorá výrobok predala. Pri nahlasovaní kvantitatívnych/kvalitatívnych výhrad postupujte podľa pokynov uvedených na záručnom liste, t. j. predložte doklad o kúpe a záručný list vyplnený predajcom.

### **I. Opis výrobku**


Viacprstová ortéza ruky „DIGIMAX“ s dizajnom rukavice a otvormi pre dlahu vám umožňuje vybrať si, ktorý prst alebo prsty sú vhodné na imobilizáciu. Bočné zapísanie uľahčuje prispôsobenie výrobku konštrukcii ruky a krátke prevedenie ortézy neobmedzuje voľnosť pohybu. Dostupné vo verzii – ľavá/pravá. Sada obsahuje 1 hliníkovú výstuhu.

### **II. Vlastnosti**

Ortéza je určená na stabilizáciu prstov (s použitím prídavných dláh) okrem palca. Hliníkovú výstuhu je možné vytvarovať do požadovaného tvaru a umiestniť na stabilizovanú oblasť.

### **III. Spôsob použitia**

- Uistite sa, že veľkosť produktu je pre vás vhodná
- Pred nasadením ortézy by mali byť všetky upevňovacie prvky uvoľnené a voľne ponechané
- Umiestnite výstuhu dodanú s ortézou do otvoru dlahy umiestnenej na zadnej strane ortézy, aby ste spevnili vybraný prst
- V prípade potreby umiestnite dodatočnú výstuhu do príslušného otvoru
- Ohnite prstovú dlahu do požadovaného tvaru
- Opatrne vložte ruku v rukavici a stabilizovaný prst (prsty) do vrečka výstuhy
- Zapnite suchý zips

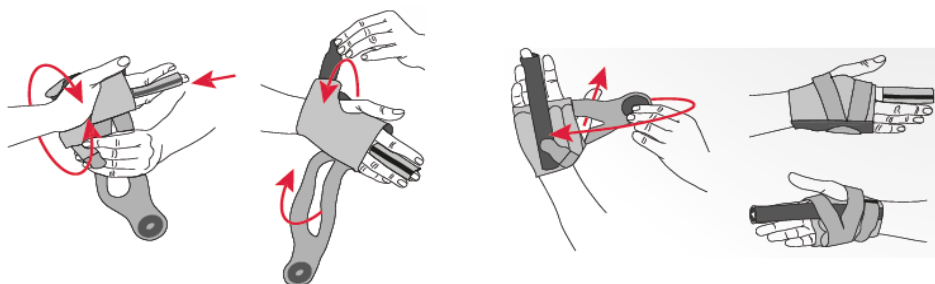

#### IV. Veľkostná tabuľka – verzia ľavá a pravá

Veľkosť	Obvod zápästia
S	17 – 19 cm
M	19,5 – 22 cm
L	22,5 - 25 cm

#### V. Zloženie

80% dvojité zamatová tkanina

20% neoprén

#### VI. Pravidlá používania

- tento produkt sa môže používať iba podľa pokynov lekára,
- spôsob nasadenia ortézy by mal ukázať kvalifikovaný zdravotnícky personál, v prítomnosti osoby, ktorá sa stará o používateľa (ak je to potrebné),
- výrobok a jeho súčasti by sa mali používať iba na určený účel,
- pokožka, kde ortéza prilieha k telu by mala byť čistá
- počas nosenia výrobku môžete používať liečivé obklady, avšak obklady neprikladajte tesne pre nasadením ortézy
- použitie ortézy v noci je povolené len na odporúčanie ošetrojúceho lekára
- dlhodobé používanie ortézy môže mať za následok obmedzené aktívne a pasívne pohyby v kĺboch, preto sa odporúča systematicky vykonávať cvičenia vybrané kvalifikovaným zdravotným personálom na žiadosť ošetrojúceho lekára
- výrobok by mal byť udržiavaný v čistote, v súlade s odporúčaniami uvedenými v tomto návode a na štítku, ktorý je umiestnený na produkte
- nesprávne čistenie a údržba produktu môžu viesť k tvorbe kožných alergií
- produkt nie je vhodné použiť, ak niektorá časť chýba

#### VII. Aplikácia

Produkt je možné použiť:

- podpora konzervatívnej liečby,
- poškodenie extenzorov prstov,
- niektoré typy zlomenín metakarpálov, bazálnych a stredných falangov,
- poškodenie kĺbu a/alebo mäkkých tkanív prsta a záprstnej kosti vyžadujúce imobilizáciu v rovnej polohe
- liečbu a rehabilitáciu trvalých alebo dočasných dysfunkcií časti pokrytej ortézou,

#### VIII. Kontraindikácie

- ak dôjde ku kožným zmenám v miestach prilnutia ortézy, je nevyhnutné jej použitie obmedziť a je možné ho používať len pod lekárskej dohľadom,
- v prípade zápalu hlbokých žíl alebo opuchu končatiny použitie ortézy je možné len po konzultácii s ošetrovateľom
- je potrebné, aby ošetrojúci lekár zhodnotil používanie ortézy u osôb s poruchami pamäti rôzneho pôvodu a u ľudí s duševnými poruchami, deťmi.






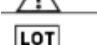
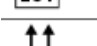
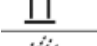







#### IX. Čistenie a údržba

Výrobok sa odporúča pravidelne umývať. Pred praním odstráňte kovové časti výrobku (ak je to možné) a upevnite všetky spoje ortézy na suchý zips.

- Prať ručne pri teplote do 40°C vo vode s neutrálnym, antialergickým pracím prostriedkom,
- Opláchnite vo vlažnej vode, nepoužívajte zmäkčovadlá,

- Nežmýkať
- Nebieliť
- Nežehliť
- Nečistite chemicky
- Nesušiť v sušičke
- Sušte na tienistom a vetranom mieste – nevystavujte výrobok priamemu slnečnému žiareniu
- Výrobok nie je tepelne odolný a stráca svoje vlastnosti pri vysokej teplote nad 120°C

## VYSVETLENIE SYMBOLOV

	Výrobca
	Označenie CE
	Referenčné číslo
	Dátum výroby
	Pozri návod na použitie
	Upozornenie
	Číslo šarže
	Vrchná časť, neprevracajte
	Skladujte na suchom mieste
	Krehké, manipulujte s ním opatrne
	Nprezavajte
	Obal je recyklovateľný
	Umývajte ručne
	Nebieliť
	Nežehliť

### VÝROBCA

**Reha Fund Sp. z o.o.**  
 ul. Staniewicka 14  
 03-310 Warszawa, Poľsko  
 tel. 48 22 59 40 300  
 fax. 48 22 59 40 307  
 e-mail: [info@rehafund.pl](mailto:info@rehafund.pl)  
[www.rehafund.pl](http://www.rehafund.pl)

### DOVOZCA

**SANITAS – zdravotnícke pomôcky, s.r.o.**  
 Polárna 6  
 040 12 Košice  
 t.č.: 055/62 229 25  
 e-mail: [sanitaske@sanitaske.sk](mailto:sanitaske@sanitaske.sk)  
[www.sanitaske.sk](http://www.sanitaske.sk)



Verzia: 1.1  
 Vydané:

## ZÁRUČNÝ LIST

### Viacprstová ortéza na ruku „DIXIMAX“ O-1770

Model	Sériové číslo:	Dátum predaja	Podpis a pečiatka predajcu:

#### PODMIENKY ZÁRUKY

- (1) Výrobca zaručuje zákazníkovi, že výrobok, na ktorý je vystavený tento záručný list, je nový a kvalitný.
- (2) Na výrobok sa vzťahuje 24-mesačná záručná doba od dátumu predaja uvedeného v záručnom liste.
- (3) Podkladom pre posúdenie reklamácie je doručenie riadne vyplneného záručného listu spolu s dokladom o kúpe.
- (4) Prípadné závady budú odstránené spoločnosťou REHA FUND Sp. z o.o. alebo autorizovanými servisnými technikmi za predpokladu, že výrobok bol používaný v súlade s jeho určením a odporúčaniami uvedenými v návode na použitie.
- (5) Oprava/výmena sa vykoná najneskôr do 30 dní odo dňa prijatia výrobku v servisnom stredisku.
- (6) Záruka sa nevzťahuje na:
  - údržbu, čistenie a nastavenie pásu, ako je opísané v návode na použitie;
  - diely podliehajúce opotrebovaniu počas bežného používania;
  - mechanické a tepelné poškodenie pásu, napr. prasknutie, roztrhnutie atď;
  - poškodenia spôsobené používaním zariadenia v rozpore s návodom na použitie, nedbalosťou, neoprávnenými opravami, úpravami alebo konštrukčnými zmenami.
- (7) Pred odovzdaním výrobku autorizovanému servisnému technikovi ho treba vyčistiť v súlade s návodom na použitie.
- (8) Opravy a výmeny by mali vykonávať autorizovaní servisní technici spoločnosti Reha Fund s.r.o.
- (9) V prípade neopodstatnenej reklamácie budú zákazníkovi účtované náklady na dopravu.
- (10) Územná pôsobnosť záručnej ochrany sa vzťahuje na územie Slovenskej republiky.
- (11) Záruka na predaný tovar nevylučuje, neobmedzuje ani nepozastavuje práva zákazníka vyplývajúce z nesúladu tovaru so zmluvou.

#### ZOZNAM SERVISNÝCH OPRAV (vyplní servis)

	Dátum nahlásenia	Objednávacie číslo	Popis závady/rozsah opravy	Dátum opravy	Pečiatka a podpis servisu
1.					
2.					