

NÁVOD NA POUŽITIE

Antidekubitná poduška na sedenie BIOFLOTE 3 PLUS

Model		
Katalógové číslo	Bioflote 3 Plus	Bioflote 3 Plus
Kód modelu	Bioflote 3 Plus / 43	Bioflote 3 Plus / 45,5
Rozmery	40,5 x 43 x 7,5 cm	40,5 x 45,5 x 7,5 cm
Maximálne zaťaženie	130 kg	130 kg

POZOR! Pred prvým použitím výrobku si prečítajte tento návod na použitie

Pri kúpe skontrolujte kompletnosť a kvalitatívny stav výrobku. Akékoľvek výhrady nahláste osobe, ktorá výrobok predala. Pri nahlasovaní kvantitatívnych/kvalitatívnych výhrad postupujte podľa pokynov uvedených na záručnom liste, t. j. predložte doklad o kúpe a záručný list vyplnený predajcom.

I. Opis výrobku

Antidekubitná poduška BioFlote™ 3 Plus je určená na antidekubitnú profylaxiu pre osoby, ktoré dlhodobo zotrávajú v sede.

II. Bezpečnostné pravidlá

1. Uistite sa, že poduška spočíva na nejakej podpore.
2. Nedovoľte, aby sa poduška dostala do kontaktu s ostrými predmetmi, ktoré by mohli poškodiť jej poťah.
3. Poduška by mala byť naplnená primeraným množstvom vzduchu v závislosti od hmotnosti pacienta tak, aby stabilizoval polohu pacienta a neumožnil kontakt panvy s podporou a zároveň nevyvíjal príliš veľký tlak na telo.
4. Udržujte podušku mimo zdrojov ohňa a tepla.
5. Poduška by sa nemala ohýbať, ak je naplnená vzduchom.
6. Poduška by mala byť skladovaná v suchom prostredí. Poduška nemôže byť vystavená dlhodobému kontaktu s vlhkosťou.
7. Akýkoľvek vážny incident súvisiaci s pomôckou sa musí nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má používateľ alebo pacient bydlisko.

III. Spôsob použitia

1. Sadnite si na vankúš.
2. Odskrutkujte gombík na nastavenie tlaku (obr. 1).
3. Nastavte vhodný tlak znížením alebo zvýšením množstva vzduchu vo vnútri. Vankúš sa nafúkne sám.
4. Otočte voličom.

obr. 1



IV. Čistenie a údržba

- Pred čistením podušky sa uistite, že je ventil vždy zatvorený!
- Na umývanie podušky použite antibakteriálne mydlo, resp. mydlovú vodu max 30°C
- Na utretie podušky dosucha použite handričku.
- Nepoužívajte čistiace prostriedky ani iné rozpúšťadlá.
- Neperte v práčke ani nesusťe v sušičke.
- Nezohrievajte ani nesterilizujte v parnom autokláve.
- Sušte pri teplote okolia.






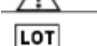
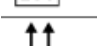
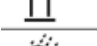







POZOR! Na sušenie podušky nepoužívajte žiadne vykurovacie zariadenia, ako je sušička alebo radiátor. Podušku nie je možné prať v práčke ani sušiť v sušičke. Podušku nie je možné sterilizovať v autokláve.

POZOR! Poťah nie je možné sušiť v sušičke. Poťah by mala používať iba jedna osoba.

Zoznam použitých materiálov

Poťah matraca	100% polyester
Poduška	Vnútoraná vrstva: 100% polyuretánová pena Vonkajšia vrchná vrstva: 50% TPU (termoplast polyuretán) + 50 % polyesterové vlákno Spodná vonkajšia vrstva: 50% TPU (termoplast polyuretán) + 50% protišmykové polyesterové vlákno

VYSVETLENIE SYMBOLOV

	Výrobca
	Označenie CE
	Referenčné číslo
	Dátum výroby
	Pozri návod na použitie
	Upozornenie
	Číslo šarže
	Vrchná časť, neprevracat'
	Skladujte na suchom mieste
	Krehké, manipulujte s ním opatrne
	Nprezavajte
	Obal je recyklovateľný
	Umývajte ručne
	Nebielit'
	Nežehliť

VÝROBCA

Reha Fund Sp. z o.o.

ul. Staniewicka 14

03-310 Warszawa, Polsko

tel. 48 22 59 40 300

fax. 48 22 59 40 307

e-mail: info@rehafund.pl

www.rehafund.pl

DOVOZCA

SANITAS – zdravotnícke pomôcky, s.r.o.

Polárna 6

040 12 Košice

t.č.: 055/62 229 25

e-mail: sanitaske@sanitaske.sk

www.sanitaske.sk



Verzia: 1.3

Vydané: 11/2022

ZÁRUČNÝ LIST

Antidekubitná poduška na sedenie BIOFLOTE 3 PLUS

Model	Sériové číslo:	Dátum predaja	Podpis a pečiatka predajcu:

PODMIENKY ZÁRUKY

- (1) Výrobca zaručuje zákazníkovi, že výrobok, na ktorý je vystavený tento záručný list, je nový a kvalitný.
- (2) Na výrobok sa vzťahuje 24-mesačná záručná doba od dátumu predaja uvedeného v záručnom liste.
- (3) Podkladom pre posúdenie reklamácie je doručenie riadne vyplneného záručného listu spolu s dokladom o kúpe.
- (4) Prípadné závady budú odstránené spoločnosťou REHA FUND Sp. z o.o. alebo autorizovanými servisnými technikmi za predpokladu, že výrobok bol používaný v súlade s jeho určením a odporúčaniami uvedenými v návode na použitie.
- (5) Oprava/výmena sa vykoná najneskôr do 30 dní odo dňa prijatia výrobku v servisnom stredisku.
- (6) Záruka sa nevzťahuje na:
 - údržbu, čistenie a nastavenie pásu, ako je opísané v návode na použitie;
 - diely podliehajúce opotrebovaniu počas bežného používania;
 - mechanické a tepelné poškodenie pásu, napr. prasknutie, roztrhnutie atď;
 - poškodenia spôsobené používaním zariadenia v rozpore s návodom na použitie, nedbalosťou, neoprávnenými opravami, úpravami alebo konštrukčnými zmenami.
- (7) Pred odovzdaním výrobku autorizovanému servisnému technikovi ho treba vyčistiť v súlade s návodom na použitie.
- (8) Opravy a výmeny by mali vykonávať autorizovaní servisní technici spoločnosti Reha Fund s.r.o.
- (9) V prípade neopodstatnenej reklamácie budú zákazníkovi účtované náklady na dopravu.
- (10) Územná pôsobnosť záručnej ochrany sa vzťahuje na územie Slovenskej republiky.
- (11) Záruka na predaný tovar nevylučuje, neobmedzuje ani nepozastavuje práva zákazníka vyplývajúce z nesúladu tovaru so zmluvou.

ZOZNAM SERVISNÝCH OPRAV (vyplní servis)

	Dátum nahlásenia	Objednávacie číslo	Popis závady/rozsah opravy	Dátum opravy	Pečiatka a podpis servisu
1.					
2.					