

NÁVOD NA POUŽITIE ORTOPEDICKÝ CESTOVNÝ VANKÚŠ MORFEUSZ 662

Rozmery: 46 cm x 32,5 cm x 10/13 cm



POZOR! Pred použitím vankúša si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny.

ÚČEL

Vankúš je určený na profylaxiu a prevenciu degenerácie a bolesti krčnej časti chrbtice spôsobenej nesprávnou polohou počas spánku, pre tých:

- ktorí oceňujú prevenciu zdravého spánku, ktorí majú problémy spôsobenými nesprávnou polohou krčnej chrbtice a hlavy počas spánku (napr. bolesti chrbta, svalové napätie, mravčenie a necitlivosť končatín atď.),
- ktorí potrebujú stabilnú oporu hlavy v oblasti krku, podpora hlavy v oblasti krčnej chrbtice a zároveň zníženie tlaku na telo,
- ktorí vyžadujú vysokú úroveň pohodlia pri spánku (vankúš sa prispôbí tvaru hlavy), pre osoby spiace na boku.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Čistite mäkkou handričkou namočenou v teplej vode s jemným čistiacim prostriedkom. Obliečku na vankúš perte a čistite podľa informácií na štítku. Po čistení dobre vysušte.

POZNÁMKA: Nenamáčajte celú penu do vody.

KONTRAINDIKÁCIE:

- Nepoužívajte mokrý výrobok priamo v kontakte s pokožkou.
- Nepoužívajte v prípade alergických kožných reakcií.
- Nepoužívajte, ak došlo k mechanickému poškodeniu (napr. roztrhnutiu, prasknutiu).
- Nepoužívajte inak, ako je určené.

UPOZORNENIA:

Pred použitím sa poraďte s lekárom alebo rehabilitačným pracovníkom o prítomnosti kontraindikácií na používanie výrobku.

Výrobok by sa mal prispôbiť veľkosti tela s použitím alebo bez použitia podložky na nastavenie výšky.

Nevystavujte výrobok otvorenému ohňu ani iným zdrojom vznietenia.

Pena vystavená otvorenému ohňu sa rýchlo vznieti.

Nevystavujte výrobok dlhodobo nízkym teplotám (pod 5 °C).

Obal výrobku nie je hračka.

Akokoľvek závažná udalosť súvisiaca s výrobkom musí byť nahlásená výrobcovi a Úradu pre registráciu liečiv.

Úrad pre registráciu liekov, zdravotníckych pomôcok a biocídnych výrobkov.
















UPOZORNENIE:

Pena musí byť chránená pred slnečným žiarením, pretože pod vplyvom slnečného žiarenia môže zmeniť farbu. Zmena farby peny nemá vplyv na jej fyzikálno-mechanické vlastnosti.

ZOZNAM POUŽITÝCH MATERIÁLOV

Penová vložka	100% polyuretánová pena
Podšívka	100% polyester
Obliečka na vankúš	100% bavlna

Vysvetlenie pojmov

	Výrobca
	Označenie CE
	Referenčné číslo
	Dátum výroby
	Pozrite si návod na použitie
	POZOR
	Číslo parcely
	Hore, neprevracajte
	Skladujte na suchom mieste
	Krehké, zaobchádzajte opatrne
	Nenamáčať
	Nebieliť
	Nežehliť
	Nečistiť chemicky
	Sušte rozložené v tieni

VÝROBCA

Reha Fund Sp. z o.o.
ul. Staniewicka 14
03-310 Warszawa, Poľsko
tel. 48 22 59 40 300
fax. 48 22 59 40 307
e-mail: info@rehafund.pl
www.rehafund.pl

DOVOZCA

SANITAS – zdravotnícke pomôcky, s.r.o.
Polárna 6
040 12 Košice
t.č.: 055/62 229 25
e-mail: sanitaske@sanitaske.sk
www.sanitaske.sk

CE Verzia 1.3

Vydané: 01/2021

Záručný list

ORTOPEDICKÝ CESTOVNÝ VANKÚŠ MORFEUSZ 663

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

1. Výrobca ubezpečuje zákazníka, že predajný predmet, na ktorý je vydaný tento záručný list, je úplne nový a vo vysokej kvalite.
2. Na vankúš sa vzťahuje záruka 24 mesiacov od dátumu predaja v záručnom liste.
3. Základom pre posúdenie reklamácie je predloženie správne vyplneného záručného listu spolu s priloženým dokladom o kúpe.
4. Prípadné závady na zariadení odstráni REHA FUND Sp. z o. alebo autorizovaným servisným technikom za predpokladu, že vankúš bol používaný v súlade s jeho účelom a odporúčaniami v návode na použitie.
5. Oprava bude vykonaná v čo najkratšom čase, maximálne však do 30 dní odo dňa prevzatia produktu na servisnom mieste.
6. Záruka sa nevzťahuje na:
 - činnosti súvisiace s údržbou, čistením a úpravou vankúša popísané v návode na použitie;
 - diely podliehajúce opotrebovaniu pri bežnom používaní;
 - mechanické a tepelné poškodenie, napr.
 - poškodenie spôsobené používaním zariadenia v rozpore s návodom na obsluhu, nedbalosťou, vykonávaním nezávislých opráv, úprav alebo konštrukčných zmien.
7. Pred vrátením výrobku autorizovanému servisnému technikovi ho vyčistite v súlade s návodom na použitie, aby bol vhodný na servisnú kontrolu.
8. Opravy a výmeny náhradných dielov by mali vykonávať autorizovaní servisní technici spoločnosti Reha Fund Sp. z o.
9. V prípade neoprávnenej reklamácie budú zákazníkovi účtované náklady na dopravu.
10. Územný rozsah záručnej ochrany pokrýva územie Slovenskej republiky.
11. Záruka na predávaný tovar nevyklučuje, neobmedzuje ani nepozastavuje práva zákazníka vyplývajúce z nesúladu tovaru so zmluvou.

ZOZNAM SERVISNÝCH OPRAV (vyplní servis)

	Dátum nahlásenia	Objednávacie číslo	Popis závady/rozsah opravy	Dátum opravy	Pečiatka a podpis servisu
1.					
2.					